

Handi 4

# Bruksanvisning Handi och Handifon



Programversion 4.6.0 eller senare

# Innehållsförteckning

1. Inledning.....	4
2. Generella principer .....	5
3. Handimenyn/Startmenyn .....	6
3.1 Anpassa Handimenyn/Startmenyn.....	6
4. Funktioner i Handi .....	8
4.1 Album .....	8
4.2 Anteckningar.....	8
4.3 Användare .....	8
4.4 Bildsamtal .....	8
4.5 Checklista .....	8
4.6 Formulär och Formulärsvar .....	9
4.7 Kalendern .....	9
4.8 Kamera .....	9
4.9 Kontakter i Handi (utan telefon).....	10
4.10 Kontakter i Handifon .....	10
4.11 Krisplan i Handi (utan telefon).....	10
4.12 Krisplan i Handifon.....	10
4.13 Miniräknare .....	11
4.14 MMS .....	11
4.15 Prisräknaren .....	11
4.16 Röstanteckningar .....	11
4.17 SMS.....	12
4.18 Spel .....	12
4.19 Spelaren .....	12
4.20 Telefon.....	12
5. Inställningar .....	13
6. Systeminställningar .....	13
6.1 Datum och tid.....	14
6.2 Ljudvolym .....	14
6.3 Talstöd.....	15
6.4 Tema .....	17
6.5 Tangentbord .....	18
6.6 Kodskydd Inställningar .....	18
6.7 Autostarta funktion .....	18
6.8 Lösenord/Knapplås .....	19

6.9 Batteri .....	20
6.10 Backup.....	20
6.11 Återställning .....	21
6.12 Knappar .....	22
6.13 Apparaten .....	22
6.14 Uppgradera bildarkiv.....	22
6.15 Om Handi.....	23
6.16 Avsluta Handi.....	23
7. Bildarkiv.....	24
7.1 Välj ikonstorlek.....	24
7.2 Redigera bildarkivet .....	25
8. Stödmenyn .....	28
8.1 Varför Stödmeny? .....	28
8.2 Funktioner i Stödmenyn .....	28
8.3 Visa stödmenyn .....	29
8.4 Anpassa Stödmenyn.....	29
9. Grundinställning .....	31

# 1. Inledning

**Handi** är en handdator med program som är anpassade för personer med kognitiva funktionshinder.

**Handifon** är en Handi med telefonfunktion, vibrationssignal och inbyggd kamera.

I detta dokument kallas Handi och Handifon gemensamt för "Handi", så länge det gäller funktionalitet som finns i både Handi och Handifon. Annars kallas apparaterna för sina rätta namn.

Dokumentet innehåller beskrivning av övergripande funktioner och inställningar i Handi. Varje Handi-funktion har en egen bruksanvisning, som man kan öppna via länkar i detta dokument.

Den mest grundläggande skillnaden mellan Handi och "vanliga" handdatorprogram är att Handi har betydligt mindre information och färre valmöjligheter per vy. Detta minskar kraven på kognitiv förmåga vid användningen. Användningen av symboler och talstöd gör det också enklare att ta till sig information.

De olika Handi-funktionerna beskrivs kortfattat i kapitel 4. *Funktioner i Handi*.

Det är inte sannolikt att samtliga Handi-funktioner kommer att användas av en och samma användare. Man kan därför enkelt ställa in vilka funktioner som ska vara tillgängliga.




För att överföra bilder, album, musik, ljudböcker och anteckningar från en PC till Handi används PC-programmet HandiTools. Via HandiTools kan man också skapa och hantera formulär. Andra viktiga funktion i HandiTools är att man kan säkerhetskopiera innehållet i Handi, samt få ut loggfiler som kan användas vid felsökning.

## 2. Generella principer

Funktionaliteten i Handi är uppbyggd efter ett antal grundläggande principer:

- Handi kan ha två olika **teman**; klassiskt och modernt. Det klassiska temat har tydligare kontraster och symboler samt större text. Det moderna temat liknar mera en "vanlig" mobiltelefon.
- Huvudmenyn har olika namn beroende på tema. I klassiskt tema heter den *Handimenyn* medan den i modernt tema heter *Startmenyn*.




- Man växlar mellan **användarläge** och **inställningsläge** genom att trycka Knappkombinationen, se Handboken.
- Val görs i två steg. Först trycker man på en rad/ikon, som då markeras. I detta läge kan man få valet uppläst med talsyntes (om så är inställt). Sedan bekräftas valet genom att trycka på *Nästa*  eller *OK* beroende på var i en sekvens man är. Man kan också bekräfta valet genom att trycka en gång till på den markerade raden. Det blir en typ av "dubbeltryckning". (Denna möjlighet till "dubbeltryckning" finns genomgående i programmen, men beskrivningen nämner bara den förstnämnda metoden.)
- Talstöd ges inte automatiskt, utan bara när man aktiverar det.
- När man gör åtgärder som innebär en hel sekvens av vyer, t ex lägger in en aktivitet, betyder alltid *Nästa*  "fortsätt i sekvensen" och *Backa*  betyder "gå ett steg bakåt i sekvensen". När man kommer till sista vyn i en sekvens så bekräftar man genom att trycka *OK*. Om man trycker på *Avbryt* någonstans i en sekvens kommer man tillbaka till utgångsläget.
- Alla funktioner i Handi (utom Inställningar) är uppbyggda så att man kan styra dem genom att trycka på skärmen med fingret. (Det fungerar naturligtvis också bra att peka med pekpenan.) När man använder fingret för att trycka bör man undvika alltför stor tryckyta, dvs inte "trycka med hela tummen". Att trycka med nageln eller annan "spetsig" del av fingret är bäst.
- Genom att trycka på *Hemknappen*, se Handboken, i mer än 2 sekunder aktiveras den funktion som valts som autostart. (I grundinställningens nivå 1-3 är det Kalendern och i nivå 4 är det Handimenyn.) Syftet med *Hemknappen* är att man på ett enkelt sätt ska komma tillbaka ett känt läge.
- Bara relevanta knappar visas, dvs endast de knappar som har en funktion. Ibland måste man markera en rad/ikon för att knappar ska visas. Se exempel nedan.



I den vänstra vyn är ingen ikon markerad och därmed visas inga knappar i knappraden.

I den högra vyn har ikonen *Kalender* markerats och då visas även knapparna *Talstöd* och *Nästa*, som ju då har blivit relevanta.

- Om det endast finns en funktion i Handimenyn/Startmenyn, t ex Kalendern, och funktionen är vald som autostart, har funktionen ingen *Backa*-knapp . Det innebär att man inte kan komma till Handimenyn/Startmenyn.

### 3. Handimenyn/Startmenyn

Handimenyn/Startmenyn är den enkla och tydliga huvudmeny som alla Handi-funktioner startar ifrån.



I Handimenyn/Startmenyn visas ikoner för de olika Handi-funktionerna. När man markerar en ikon och trycker på *Nästa* startar den valda Handi-funktionen.

Ikonerna kan starta:

- Handi-funktioner (Anteckningar, Kalendern osv)
- Genvägar (Album startas med albumet "Min familj", Formulär startas med "Mina tidiga tecken" osv)

Man kan ha fler ikoner än vad som får plats på en sida. Då visas *Bläddra*-knappar och i rubriken anges vilken sida man är på.

Handimenyn/Startmenyn kan anpassas avseende storleken på ikonerna samt vilka ikoner som ska visas, dvs vilka Handi-funktioner man vill ha tillgång till.

#### 3.1 Anpassa Handimenyn/Startmenyn

För att anpassa Handimenyn/Startmenyn ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



För att komma till inställningarna för Handimenyn/Startmenyn väljer man funktionen överst på första sidan. Redigeringsvyn till höger visas.

Här visas ikonerna och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna "Ny", "Flytta uppåt" och "Flytta nedåt". (Om ingen ikon är markerad visas bara knappen "Ny".)

Hur man anpassar Handimenyn/Startmenyn beskrivs nedan.



##### 3.1.1 Välj ikonstorlek



Via knappen "Ikonernas storlek" ställer man in hur ikonerna ska visas i Handimenyn/Startmenyn. Man kan välja mellan 3 rader, 5 rader, 2x2 ikoner, 2x3 ikoner eller 3x3 ikoner:

3 rader



5 rader



2x2 ikoner



2x3 ikoner



3x3 ikoner



### 3.1.2 Välja/välja bort Handi-funktion

Alla Handi-funktioner finns med i **Inställningar|Handimenyn**, men inte alla är förbockade.

För att välja en Handi-funktion trycker man i den lilla kryssrutan i ikonen och bockar därmed för funktionen.

För att välja bort en Handi-funktion tar man bort bocken i kryssrutan genom att trycka i kryssrutan.

Inställningarna sparas när man trycker på **OK**.



### 3.1.3 Flytta ikon




För flytta en ikon markerar man den och trycker sedan på knappen *Flytta åt vänster* eller *Flytta åt höger*. Då ändras ikonens placering i Handimenyn/Startmenyn. Inställningarna sparas när man trycker på **OK**.

### 3.1.4 Ny genväg



För att lägga in en ny genväg trycker man på knappen *Ny*. En guide startar där man först får välja funktion och sedan vad funktionen ska starta med.

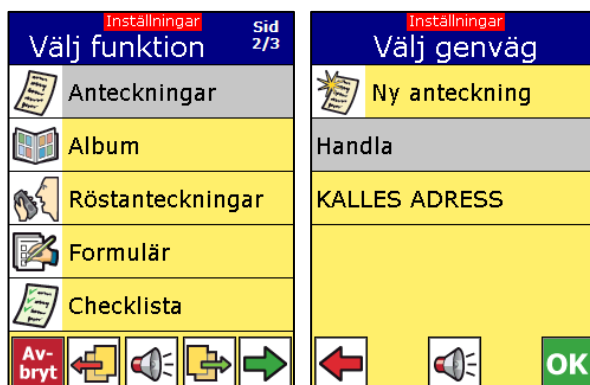

I "Välj funktion" väljer man funktion, t ex "Anteckningar".

I "Välj genväg" visas en lista över funktionens tillgängliga genvägar, vilket kan vara funktioner eller specifika anteckningar/kontakter/album/formulär etc.

När man trycker på **OK** läggs genvägen in sist i listan, se nedan. (Om en ikon var markerad när man valde "Ny genväg" kommer genvägen att läggas in efter denna.)

Nu kan man flytta ikonen till önskad plats, se 3.1.2 *Flytta ikon* ovan.

Inställningarna sparas när man trycker på **OK**.



### 3.1.5 Ta bort genväg



För att ta bort en ikon ur listan markerar man den och trycker sedan på *Ta bort*-knappen. Man får bekräfta att ikonen ska tas bort. Ikonen tas sen bort från listan. Inställningarna sparas när man trycker på **OK**.

OBS! Det går bara att ta bort genvägar, inte Handi-funktioner.

## 4. Funktioner i Handi

I detta kapitel beskrivs samtliga Handi-funktioner översiktligt.

### 4.1 Album

I *Album* kan man ha bildspel med bilder, text och inspelat ljud. Det kan vara sociala bildspel av typen "Min familj", eller bildspel som ger en historia, t ex "Semester 2010".

*Album* kan också användas för mer praktiskt inriktade bildspel som recept eller arbetsinstruktioner.

Albumen skapas direkt i Handi eller via PC-programmet HandiTools.

### 4.2 Anteckningar

Med *Anteckningar* kan man skriva in information med det inbyggda (på skärmen) alfabetiska tangentbordet. Det är enkelt att spara och öppna anteckningar.

Informationen kan läsas upp med talsyntes.

Med PC-programmet HandiTools kan man skriva, redigera och skriva ut anteckningarna i PC:n.

### 4.3 Användare

Funktionen *Användare* gör att användaren kan visa en vy med sitt namn och en bild på sig själv.

Namn läggs in direkt i Handi eller via PC-programmet HandiTools.

Bild läggs in i Handi via PC-programmet HandiTools. I Handifon kan man använda den inbyggda kameran för att lägga in bild.

### 4.4 Bildsamtal

*Bildsamtal* är tänkt att användas för riktad bildkommunikation.

I *Bildsamtal* kan man välja ca 1-4 bilder som läggs upp i en "samtalsremsa". Sedan visar man dessa bilder för den man samtalar med. Det är möjligt att få bilderna upplästa, med talsyntes eller inspelat ljud.

De bilder och ljud som ska användas för kommunikationen – "bildkartor" definieras antingen direkt i Handi eller via PC-programmet HandiTools.

### 4.5 Checklista

Med *Checklista* kan man göra avbockningsbara listor, t ex inköpslistor eller "att göra"-listor.

Checklistorna kan vara textbaserade, bildbaserade eller en blandning av text och bild.

Checklistorna kan användas fristående men även kopplas till en aktivitet i Kalendern. Man kan göra enstaka aktiviteter och återkommande aktiviteter med checklista.

Det finns två sätt att lägga in checklista, ett "snabbsätt" för personer som skriver obehindrat, och ett där man steg för steg-sätt skapar checklista med bild/text.

## 4.6 Formulär och Formulärsvar

Med funktionen *Formulär* kan man skapa olika typer av individuella formulär med ett brett användningsområde, t ex:

- Självskattningsfrågor om t ex symtom (självdiagnostiska frågor). Beroende på hur man besvarar frågorna visas olika handlingsplaner. Formuläret utgör därmed ett anpassat beslutsstöd, men även en självhjälp i krissituationer.
- Formulär med tydliga och konkreta KBT-strategier i hur olika personliga mål ska uppnås t ex i frågor om kost, motion, skolarbete. (Kognitiv beteendeterapi (KBT), med frågor om t ex motion och kost.)
- Frågor för att samla in data som t ex sömnkvalitet, biverkningar, blodsockervärde osv.

Med funktionen *Formulärsvar* kan man i efterhand titta på de svar som angivits i *Formulär*. Man kan både se enskilda svar samt sammanställningar i form av diagram, poäng och "betyg". Via PC-programmet HandiTools kan man få ut ytterligare statistik samt skriva ut formulärsvaren.

I HandiTools skapar och hanterar man formulär direkt i en ansluten Handi. Man kan alltså ansluta en Handi till vilken PC som helst som har HandiTools och arbeta med formulär. Inget av det man gör blir kvar på PC:n, om man inte aktivt sparar det där.

## 4.7 Kalendern

*Kalendern* är en elektronisk kalender som visar inplanerade aktiviteter och larmar när dess start- eller sluttid infaller. Aktiviteterna symboliseras med text och/eller bilder. Tiden till en aktivitet börjar eller slutar visas med kvartursprincipen. Talstöd kan ges i alla lägen m h a talsyntes.

*Kalendern* ger användaren ett kraftfullt verktyg att planera och strukturera sin dag.

*Kalendern* går att anpassa från att fungera som ett enkelt tidshjälpmiddel (Kvarturet) till en i det närmaste komplett elektronisk kalender (Microsoft Outlook). Skillnaden mot en vanlig kalender är att gränssnittet är tydligare med betydligt mindre information och valmöjligheter per vy, vilket därigenom ställer mindre krav på användarens kognitiva förmåga.

*Kalendern* ger även möjlighet att koppla information till en aktivitet. Det kan vara information som underlättar aktiviteten (t ex en inköpslista), men det kan också vara en minnesanteckning (t ex om filmen man såg var bra). Man kan även koppla andra Handi-funktioner till aktiviteten, och därmed t ex kunna ringa ett telefonsamtal eller öppna ett formulär via *Kalendern*.

## 4.8 Kamera

*Kamera* finns endast i Handifon.

Funktionen *Kamera* är en förenklad version av apparatens inbyggda kamera. Med *Kamera* kan man ta albumbilder och bilder till aktiviteter, timers, kontakter mm.

## **4.9 Kontakter i Handi (utan telefon)**

I funktionen *Kontakter* kan man spara information om olika personer. Informationen sparas som en sk "kontakt", och kan innehålla namn, bild, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och extra information.

Kontaktlistan kan visas på två sätt. Antingen i bokstavsordning, eller sorterad i grupper (t ex "Familjen" och "Kompisar") vilket gör det enklare att hitta i kontaktlistan.

Det finns dessutom en sökfunktion som gör att man snabbt kan hitta önskad kontakt.

Via PC-programmet HandiTools kan man överföra bilder till Handi som kan användas i *Kontakter*.

## **4.10 Kontakter i Handifon**

I funktionen *Kontakter* kan man spara information om olika personer. Informationen sparas som en sk "kontakt", och kan innehålla namn, bild, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och extra information.

Kontaktlistan kan visas på två sätt. Antingen i bokstavsordning, eller sorterad i grupper (t ex "Familjen" och "Kompisar") vilket gör det enklare att hitta i kontaktlistan.

Det finns dessutom en sökfunktion som gör att man snabbt kan hitta önskad kontakt.

Om funktionerna Telefon och SMS används och telefonnummer finns angivet för en kontakt är det möjligt att ringa och skicka sms direkt via *Kontakter*.

Via funktionen *Kamera* kan man ta foton och använda direkt i *Kontakter*.

Via PC-programmet HandiTools kan man överföra bilder till Handi som kan användas i *Kontakter*.

## **4.11 Krisplan i Handi (utan telefon)**

Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Det är mycket enkelt att få fram Krisplan.

## **4.12 Krisplan i Handifon**

*Krisplan* är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Om funktionerna *Telefon* och *SMS* används kan man i *Krisplan* lägga in en knapp som direkt ringer upp 1-3 fördefinierade telefonnummer samt en knapp som gör att man kan skicka ett färdigskrivet textmeddelande till 1-3 SMS-nummer.

Det är mycket enkelt att få fram *Krisplan*.

Det går att ringa SOS-Alarm "112" även om funktionen *Telefon* inte används (inget SIM-kort insatt).

#### **4.13 Miniräknare**

*Miniräknare* är en enkel räknare som man kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera med.

Alla siffror och räknetecken som skrivs in visas i inmatningsfönstret fram tills det att man trycker på "lika med"-tecknet. Då visas summan.

Man kan få en överblick av inmatningarna i en lista - "räkneremsa". Om någon siffra har blivit fel kan man enkelt ändra den utan att behöva börja om från början.

*Miniräknare* kan ställas in i tre nivåer; enkel, kvittoräknare och avancerad.

#### **4.14 MMS**

*MMS finns endast i Handifon.*

Via funktionen *MMS* kan man skicka och ta emot multimediameddelanden (Multimedia Messaging Service) i Handi.

*MMS* är standard i moderna mobiltelefoner men kräver ganska hög kognitiv förmåga för att kunna användas, bl a av följande skäl:

- Man måste kunna hantera telefonen för att kunna välja vad som ska ingå i meddelandet (bild, ljud, film, text).
- Det kan kosta ganska mycket att skicka *MMS*, beroende på vilket abonnemang man har.
- *MMS* fungerar inte lika omedelbart som *SMS*. Det tar en stund att skicka och tas ofta emot med fördröjning, beroende på serverbelastning och annat.
- Det behöver göras avancerade inställningar i telefonen, vilket dock sköts automatiskt om man har någon de vanligaste telefonoperatörerna.

I Handi är *MMS*-funktionen förenklad. Man kan endast skicka bilder (nytaget foto eller från bildarkivet) vilka kan kompletteras med text. Det är mycket enkelt att välja mottagare. Dessutom kan man få talstöd i alla lägen, t ex när man skriver egen text.

För bästa förståelse av funktionen *MMS* rekommenderas kännedom om Handi-funktionen *Kontakter*, se funktionsbeskrivningen *Kontakter (med telefon)*.

#### **4.15 Prisräknaren**

*Prisräknaren* är avsedd att ge stöd när man handlar. Användaren ska självständigt kunna välja varor och kontrollera om han har pengar så det räcker, samt kunna kontrollera hur mycket han bör få tillbaka.

*Prisräknaren* innehåller också en valbar stödfunktion som hjälper till att välja lämpliga valörer genom att visa en röd ram runt valören.

*Prisräknaren* förutsätter att användaren själv kan läsa av och skriva in priset på de olika varorna.

#### **4.16 Röstanteckningar**

Med *Röstanteckningar* talar man in information. Det är enkelt att spara och öppna röstanteckningar.

*Röstanteckningar* ställer inget krav på förmåga att skriva, men funktionen kan också användas som ett väldigt enkelt och snabbt sätt att lägga in information även om man kan skriva.

## **4.17 SMS**

*SMS finns endast i Handifon.*

Via funktionen *SMS* kan man skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen gentemot en vanlig mobiltelefon är att det är mycket enkelt både att välja mottagare och att skriva in texten, bl a genom att använda förskrivna s k *basmeddelanden*. Dessutom kan man få talstöd både när man skriver egen text och när man läser mottagna meddelanden.

Det är möjligt att göra inställningar för *Bild-SMS*:

- Man kan ställa in om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Man kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes.

Valbart tangentbord. Man kan ställa in om tangentbordet ska visa bildarkivet eller bildkartan i Bildsamtal. Finessen med att använda bildkarta är att den är anpassad för kommunikation, men också att man ha längre bildtexter till varje bild. När man skriver SMS kan man alltså lägga in en hel mening genom att bara trycka på en bild.

## **4.18 Spel**

Via funktionen *Spel* kan man spela enkla spel i Handi.

Spelen är i första hand tänkta att vara trevlig förströelse, men ger även möjlighet att träna på att använda pekskärmen.

## **4.19 Spelaren**

I *Spelaren* kan man lyssna på musik och ljudböcker i formaten mp3 och wma.

Låtarna kan sorteras "fysiskt" i mappar, men inte på något annat sätt (t ex efter Album, Artist etc).

*Spelaren* har automatiska spellistor. Alla låtar som ligger i samma mapp ingår i en spellista, och när man börjar spela någon av låtarna kommer nästa låt i listan att spelas upp när den första låten är slut.

Det är möjligt att spara ett bokmärke. På så sätt kan man enkelt komma tillbaka till där man slutade lyssna i t ex en ljudbok.

Låtarna läggs in via PC-programmet HandiTools. Här kan man strukturera låtarna i mappar, och välja bilder till låtarna/mapparna.

## **4.20 Telefon**

*Telefon finns endast i Handifon.*

Funktionen *Telefon* är en förenklad mobiltelefon. Via *Telefon* kan man ringa och ta emot samtal, och från den lättanvända *Telefonmenyn* kan man bl a se missade samtal och kolla saldo (om man har refillkort). Man kan se vem det är som ringer eller vem man ringer till.


## 5. Inställningar

Handi kan ställas in för att passa kraven från många användare, men också för att ge användaren möjlighet att utvecklas med sin Handi. För att stödja i användandet av Handi är det viktigt att man har klart för sig hur funktionen *Inställningar* fungerar.

Man kommer till Inställningar (eller Stödmenyn om så är inställt) genom att trycka *knappkombinationen*, se Handboken.

Se kapitel 8. *Stödmenyn* för beskrivning av Stödmenyn.

I inställningsmenyn väljer man vilken funktion man vill göra inställningar för.

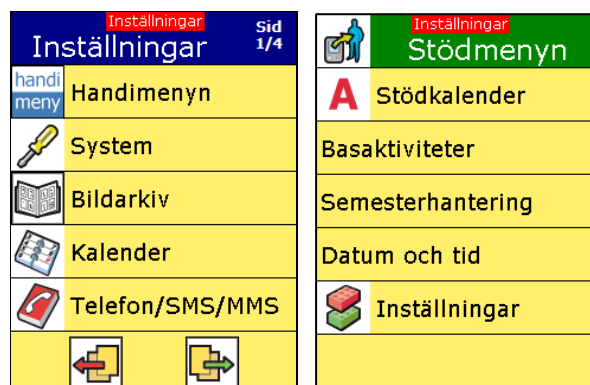

Nedan beskrivs inställningar för följande funktioner:

- **System** (se kapitel 6. *Systeminställningar*)
- **Bildarkiv** (se kapitel 7. *Bildarkiv*)
- **Stödmenyn** (se kapitel 8. *Stödmenyn*)

Inställningar för specifika Handi-funktioner, t ex Kalendern, beskrivs i resp bruksanvisning.


## 6. Systeminställningar

För att göra systeminställningar ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.




För att komma till systeminställningarna väljer man *System* på sida 1.

En meny visas, se nedan.

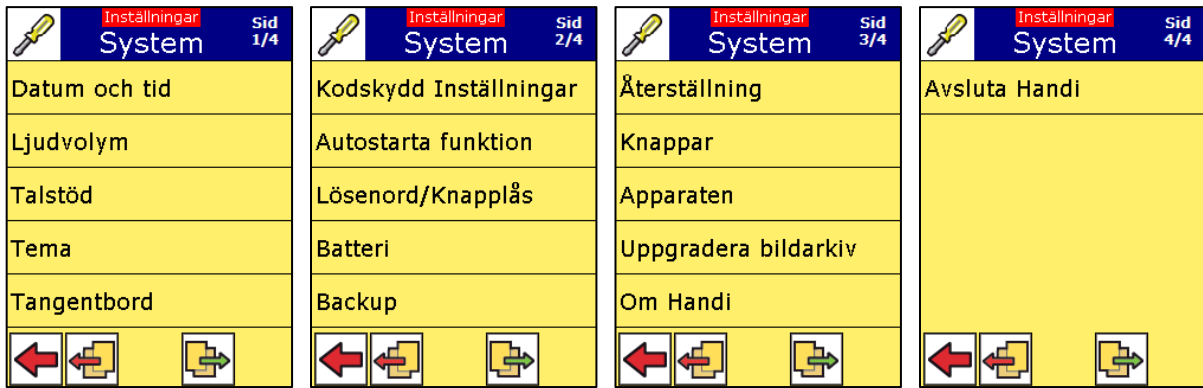

Nedan beskrivs de olika inställningsfunktionerna.

## 6.1 Datum och tid

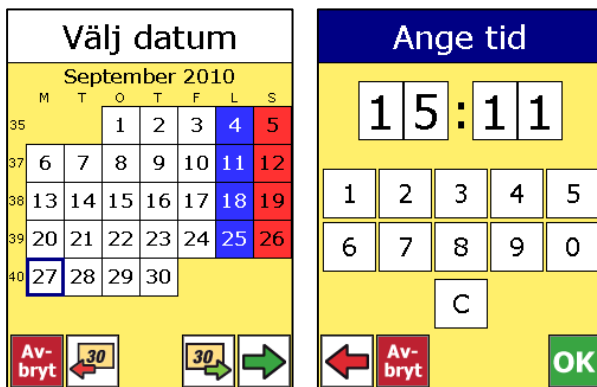


Via **Inställningar|System|Datum och tid** ställer man in rätt datum och tid.

Observera att man bläddra till rätt år med *Bläddra månad*-knappen.

Vid nyinstallation eller total omstart kommer man automatiskt hit.


## 6.2 Ljudvolym

Via **Inställningar|System|Ljudvolym** kan man ställa alla olika volymer i Handi.

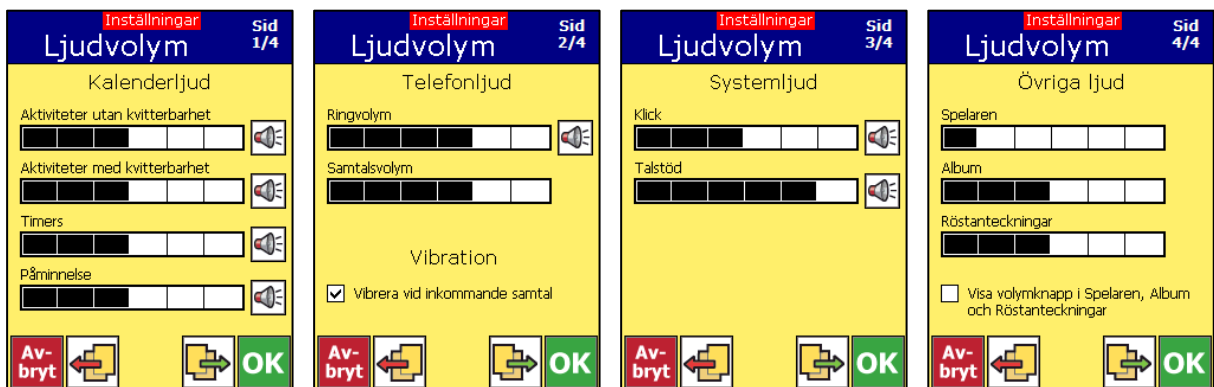

Inställningarna är uppdelade på olika sidor efter typ av volym.

På sida 1 finns Kalenderljud med volymer för de olika larmen. På sida 2 (om Handi har telefonfunktion) finns Telefonljud och Vibration. På sida 3 finns Systemljud med klick och talstöd. På sida 4 finns volymer för Spelaren, Album och Röstanteckningar.

Man ställer in volymen genom att trycka på önskad nivå i listen. Ju svartare desto högre volym. För att provlyssna trycker man på .

Genom att kryssa i *Visa volymknapp i Spelaren, Album och Röstanteckningar* kan användaren reglera volymen direkt i respektive Handi-funktion.

Högtalaren i Handi är inte dimensionerad för hög ljudvolym. Den räcker inte till för att låta andra lyssna i bullriga miljöer, utan är bara avsedd för användaren själv. Om det är bullrig miljö får användaren lyfta upp Handi mot örat för att lyssna, alternativt använda headset. För funktionen Spelaren rekommenderas användning av hörlurar/headset.

## 6.3 Talstöd




När man väljer **Inställningar|System|Talstöd** visas en meny med följande inställningsfunktioner:

- Talstöd-inställningar
- Välj röst
- Korrigera uttal

De olika inställningsfunktionerna beskrivs nedan.

### 6.3.1 Talstöd-inställningar

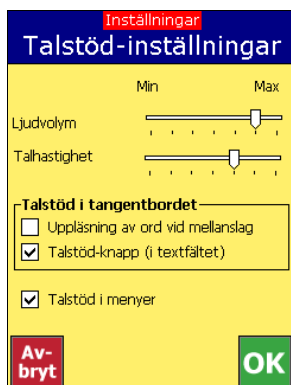

Via **Inställningar|System|Talstöd|Talstöd-inställningar** kan man göra följande inställningar:

- Ljudvolym
- Talhastighet
- Talstöd i tangentbordet
- Talstöd i menyer

Inställningarna beskrivs nedan.

#### 6.3.1.1 Ljudvolym

Man ändrar volymen genom att trycka på reglaget. Frasen "Test av talstödsvoym" läses upp så att man kan höra volymen.

#### 6.3.1.2 Talhastighet

Man ändrar talhastigheten genom att trycka på reglaget. Frasen "Test av talhastighet" läses upp så att man kan höra hur fort det låter.

Läge 5 på den 6-gradiga skalan är normalt.

#### 6.3.1.3 Uppläsning av ord vid mellanslag


När **Uppläsning av ord vid mellanslag** är ikryssat läses orden upp medan man skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort man skriver mellanslag.

### 6.3.1.4 Talstöd-knapp i textfältet


När **Talstöd-knapp** i textfältet är ikryssat visas talstödknappen bredvid textfältet. Se bilden till vänster.

När **Talstöd-knapp** i textfältet inte är ikryssat visas ingen *Talstöd*-knapp. Se bilden till höger.

När man trycker på *Talstöd*-knappen läses hela texten upp.

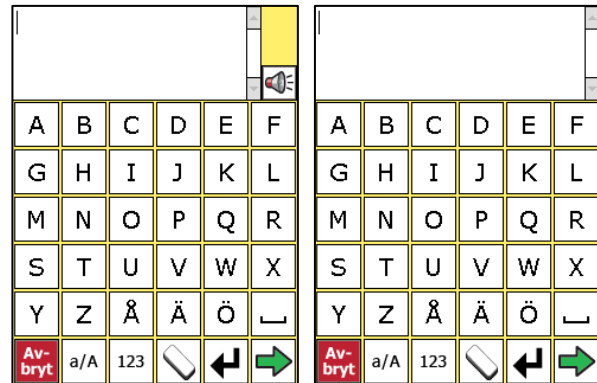

### 6.3.1.2 Talstöd i menyer

När **Talstöd i menyer** är ikryssat visas *Talstöd*-knappen  i alla menyer och listor, se exemplen till höger.

För att *Talstöd*-knappen ska visas måste en ikon/rad vara markerad och talstödvolymen vara större än 0.

När man trycker på *Talstöd*-knappen läses ikonen/raden upp av talsyntesen.

(Talstödet i Kalendervyn och Checklista fungerar annorlunda, se resp bruksanvisning.)



### 6.3.2 Välj röst




Via **Inställningar|Talstöd|Välj röst** väljer man vilken talsyntes-röst som ska användas.

Man kan välja mellan rösterna Erik (manlig) och Elin (kvinnlig).

När man trycker på OK installeras rösten, vilket tar en liten stund.

### 6.3.3 Korrigera uttal

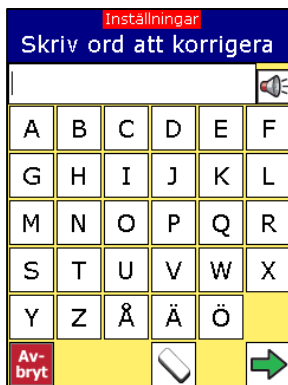

Via **Inställningar|System|Talstöd|Korrigera uttal** kan man styra hur talsyntesen ska uttala ett visst ord.

Man skriver in ordet som ska korrigeras (oftast är det egennamn eller utländska ord), och kontrollerar uttalet genom att trycka på *Talstöd*-knappen. Sedan trycker man på *Nästa*.

Nu ska ordet skrivas in som det ska uttalas. Här kan man behöva laborera lite.

Skriv in ordet "som det låter", t ex skriv "bacon" som "bejkån".

Man kan hela tiden kontrollera uttalet genom att trycka på *Talstöd*-knappen. När man är nöjd trycker man på *OK*. Det nya uttalet gäller sedan överallt där ordet används.

### 6.4 Tema



Via **Inställningar|System|Tema** väljer man vilket tema Handi ska ha.

Handi kan ha två olika teman; klassiskt och modernt. Det klassiska temat har tydligare kontraster och symboler samt större text. Det moderna temat liknar mera en "vanlig" mobiltelefon.

Huvudmenyn har olika namn beroende på tema. I klassiskt tema heter den *Handimenyn* medan den i modernt tema heter *Startmenyn*.



## 6.5 Tangentbord




Via **Inställningar|System|Tangentbord** bestämmer man om bokstäverna i tangentbordet automatiskt ska ändras från versaler till gemener och vice versa.

När alternativet "Alltid VERSALER" är valt visas stora bokstäver i tangentbordet, så länge man inte trycker på knappen a/A.

När alternativet "Automatisk ändring av skiftläge" är valt blir första bokstaven efter en punkt eller ny rad automatiskt versal. Andra bokstaven i ett ord blir sedan gemen.


## 6.6 Kodskydd Inställningar

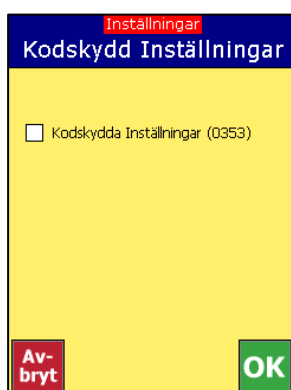

Via **Inställningar|System|Kodskydd** ställer man in kodskydd för Inställningar.

Det innebär att när man trycker *knappkombinationen* visas vyn till höger och man måste mata in koden **0353** för att komma till Inställningar.

Det är till för att hindra användare som mer eller mindre av misstag går in i Inställningar och ändrar inställningarna.

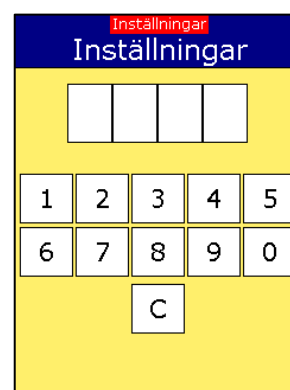

Vid särskilda behov kan man ange en egen kod. Gör så här:

1. Starta Windows Anteckningar.
2. Skriv in den fyrsiffriga koden, t ex 1234.
3. Spara filen med namnet *codeprotect.txt*.
4. Lägg *codeprotect.txt* i mappen *<Minneskort>\Handi\System*.

## 6.7 Autostarta funktion




Via **Inställningar|System|Autostarta funktion** väljer man vilken funktion Handi ska starta med efter en omstart eller när man trycker på *Hemknappen* mer än 2 sekunder (Se Handboken).

Man markerar önskad funktion och trycker på OK.

Valet ska naturligtvis utgå från hur användaren använder sin Handi. Det mest naturliga är Handimenyn eller Kalendern. Om man huvudsakligen använder Kalendern bör den startas automatiskt.

## 6.8 Lösenord/Knapplås

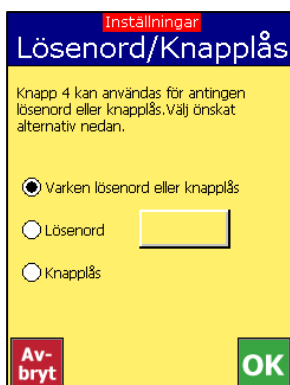


Knapp 4 (Se Handboken) kan användas för antingen lösenord eller knapplås.

Via **Inställningar|System|Lösenord|Knapplås** kan man ställa in om lösenord eller knapplås ska användas.

De olika inställningarna beskrivs nedan.


**Lösenord** innebär att man ställa in så att Handi inte kan startas utan att ange ett lösenord. Detta ger ett bättre integritetsskydd, men ger även en ökad komplexitet i användandet.

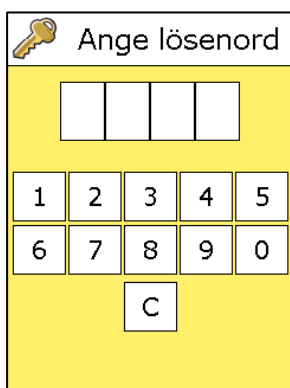

Skyddet aktiveras genom att man håller in knapp 4 i två sekunder. Då visas denna vy. I detta läge kan Handi stängas av eller stänga av sig själv.


Därefter måste man varje gång Handi startas skriva in lösenordet för att komma in.

Om man glömmer bort lösenordet får Handi skickas till återförsäljaren.

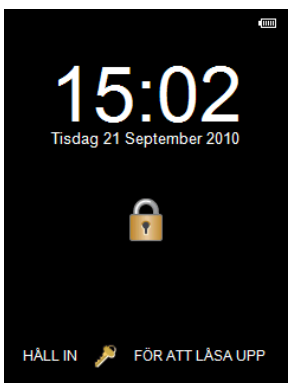

**Knapplås** innebär att alla knappar, även de på skärmen, är låsta och inte kan tryckas på av misstag.

Man **aktiverar knapplåset** genom att hålla in knapp 4 i två sekunder. Då visas Knapplåsvyn. Nu är knapplåset aktiverat, dvs om trycker man på skärmen så händer ingenting.


För att **stänga av knapplåset** håller man in knapp 4 i två sekunder, och trycker sedan på låset mitt på skärmen  för att låsa upp. Nu försvinner Knapplåsvyn och Handi fungerar som vanligt igen.

### 6.8.1 Varken lösenord eller knapplås

Om man inte vill ha vare sig lösenord eller knapplås på knapp 4 ska man välja alternativet "Varken lösenord eller knapplås".

När detta alternativ är valt händer ingenting man trycker på knapp 4.

## 6.8.2 Lösenord

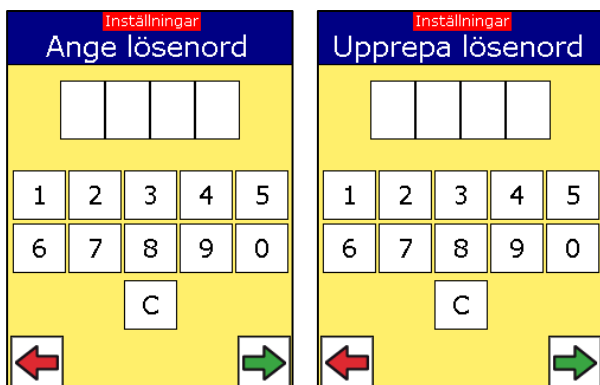

För att välja lösenord trycker man på alternativet "Lösenord" i vyn "Lösenord/Knappplås".


Man får nu ange en fyrsiffrig personlig sifferkod och upprepa koden en gång.

Det är viktigt att man håller reda på sifferkoden om man använder lösenord. Om man glömmer den måste Handi skickas in till Abilia för att nollställas.

## 6.8.3 Knappplås

Om man vill ha knappplås på knapp 4 ska man välja alternativet "Knappplås".

## 6.9 Batteri

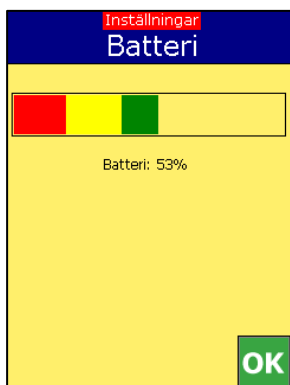


Via **Inställningar|System|Batteri** kan man se batterinivån. Den visas både grafiskt och i %.

Grönt betyder att batteriet har bra laddning (41-100%), gult betyder att det börjar behöva laddas (21-40%), rött betyder att det är i akut behov av laddning (0-20%).

"Batteri" kan läggas in som en genväg i Handimenyn/Startmenyn. Genvägens ikon visar då batterinivån med någon av färgerna rött/gult/grönt.

Hur länge batteriet räcker beror naturligtvis på hur mycket man använder Handi. Men en bra rutin är att ladda Handi varje natt, då fungerar den pålitligt hela dagen.

## 6.10 Backup

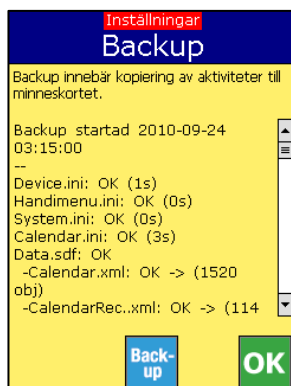


Backup innebär att alla aktiviteter, kontakter, samtal, meddelanden och inställningar kopieras till minneskortet. Samtidigt görs en genomsökning av kalenderdatabasen för att ta bort aktiviteter som är inställda att "tas bort efteråt". Kalenderdatabasen fylls också på med aktiviteter som är utan slutdatum så att de alltid finns inlagda för ett år framåt.

Automatisk backup sker varje natt klockan 03.15.

Andra personliga data i Handi (bildarkivet, basaktiviteter, formulär osv) lagras alltid på minneskortet. Detta innebär att samtliga data finns på minneskortet och att en Handi därmed kan återställas fullständigt även om apparaten går sönder eller det inträffar något allvarligt fel. (Se Handboken.)

Det är lämpligt att man då och då går in i *Backup* och kontrollerar att en backup är utförd som den ska, dvs kl 03.15 den dag man tittar.

Man kan manuellt göra en backup genom att trycka på *Backup*-knappen  i **Inställningar|System|Backup**. Detta kan vara lämpligt att göra om man lagt in väldigt många aktiviteter eller kontakter och vill försäkra sig om informationen ska finnas kvar. (Annars dröjer det alltså till kl 03.15 på natten innan backup görs automatiskt.)

Det rekommenderas att man då och då gör en säkerhetskopiering till en PC via HandiTools. Då kan man återskapa det mesta även om man helt skulle förlora sin Handi eller om minneskortet går sönder.

## 6.11 Återställning



Via **Inställningar|System|Återställning** kan man göra återställning från följande lägen:

- Senaste backup
- Grundinställning nivå 1
- Grundinställning nivå 2
- Grundinställning nivå 3
- Grundinställning nivå 4

De olika återställningarna beskrivs nedan.

### 6.11.1 Återställning från backup

Återställning från backup innebär att alla databaser och inställningar från senaste backup läggs in.

Återställning från backup är endast tänkt att göras om det har blivit problem med någon/några av databaserna.

Efter återställningen görs en omstart.



### 6.11.2 Återställning till grundinställning


Återställning till grundinställning nivå 1-4 innebär att alla inställningar från den valda nivån läggs in. Inga databaser, dvs bilder, kontakter, meddelanden osv tas bort. Det används lämpligen för att ta sig tillbaka till ett utgångsläge när man har provat lite fram och tillbaka.



Efter återställningen görs en omstart.

Grundinställning nivå 1-4 är definierade i kapitel 8. *Grundinställning*.

## 6.12 Knappar

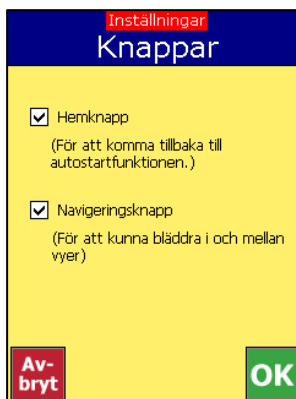

Via **Inställningar|System|Knappar** väljer man om Hemknappen och Navigeringsknappen ska kunna användas i Handi. (Se Handboken)

## 6.13 Apparaten

Via **Inställningar|System|Apparaten** kan man göra följande inställningar.

- Startknapp (Power-knappen/Alla knappar)
- Bakgrundsljus
- Tid till avstängning

Eftersom dessa inställningar är apparatberoende beskrivs de i Handboken

## 6.14 Uppgradera bildarkiv

Om man har mer än 500 bilder i bildarkivet är det lämpligt att uppgradera det för att få förbättrad prestanda, t ex snabbare kunna bläddra mellan bilderna

Uppgraderingen innebär att bilderna sparas i en annan filstruktur.

Det är inte möjligt att återfå den gamla filstrukturen efter att uppgradering gjorts.

OBS! Efter uppgraderingen krävs HandiTools v2.4.5 eller senare för att kunna ändra bildarkivet.

## 6.15 Om Handi



I **Inställningar|System|Om Handi** visas versionen på programmet.

Om man har en Handifon med SIM-kort kan man kontrollera om det finns en nyare version via knappen "Sök uppdatering". (Uppringningen kostar nästan ingenting eftersom det är så lite data som hämtas.)

Om "Sök uppdatering" ger beskedet att det finns nyare version tillgänglig hämtar man den på Abilias eller Handiteks hemsida.

"Om Handi" kan läggas in som en genväg i Handimenyn/Startmenyn.

## 6.16 Avsluta Handi

Via **Inställningar|System|Avsluta Handi** kommer man ut i Windows. Detta har man dock normalt ingen anledning att göra. För att komma tillbaka till Handi gör man en enklast en omstart, se Handboken.







Man kan välja mellan följande storlekar:

- 5x5 ikoner (små)
- 3x3 ikoner (större)
- 3x3 ikoner med text


5x5 ikoner

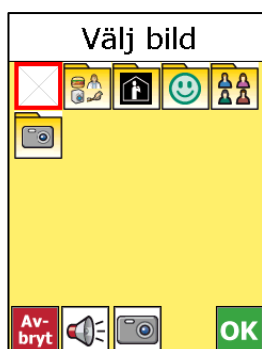


3x3 ikoner

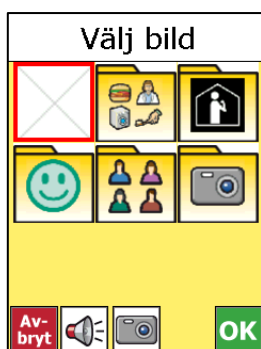

3x3 ikoner med text

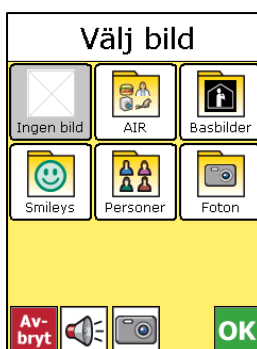

## 7.2 Redigera bildarkivet

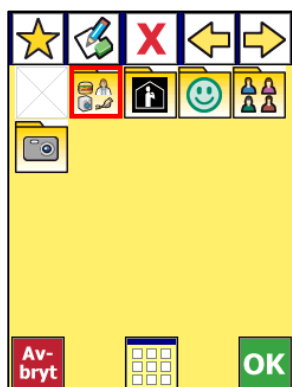


För att redigera bildarkivet använder man redigeringsknapparna i den övre knappraden: "Ny", "Ändra", "Ta bort", "Flytta uppåt" och "Flytta nedåt". (Om ingen ikon är markerad visas bara knappen "Ny".)

Hur man redigerar bildarkivet beskrivs nedan.

### 7.2.1 Lägga in kategori



För att lägga in en ny kategori trycker man på knappen Ny.

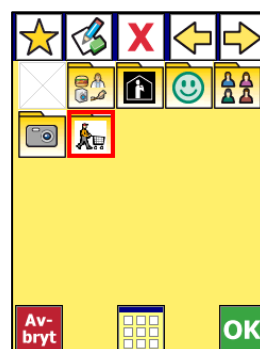


I den första vyn "Välj typ" väljer man alternativet *Kategori*. I den andra vyn väljer man bild för kategorin (eller fotograferar ny bild om Handi har kamera). I den tredje vyn namnger man kategorin.

Kategorin läggs in sist i bildarkivet. (Om en ikon är markerad när man gör en ny kategori läggs kategorin in efter den markerade ikonen.)

Bildarkivet sparas när man trycker på OK.

### 7.2.2 Lägga in mellanrum

★ För att lägga in ett mellanrum trycker man på knappen *Ny*.

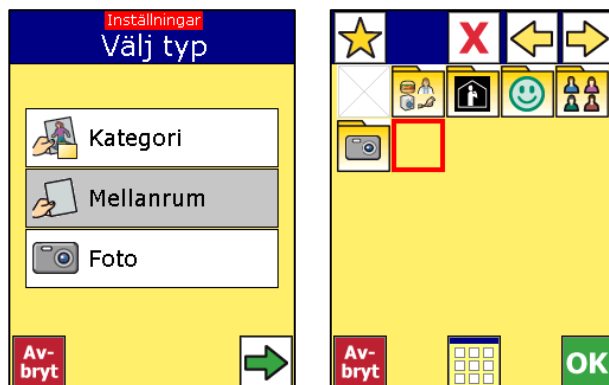

I vyn "Välj typ" väljer man alternativet *Mellanrum*. När man trycker på *Nästa* läggs mellanrummet in sist i bildarkivet.


(Om en ikon är markerad när man gör en ny kategori läggs mellanrummet in efter den markerade ikonen.)

Bildarkivet sparas när man trycker på OK.

### 7.2.3 Lägga in foto

OBS! Detta alternativ finns endast för **Handifon**.

★ För att lägga in ett nytt foto trycker man på knappen *Ny*.

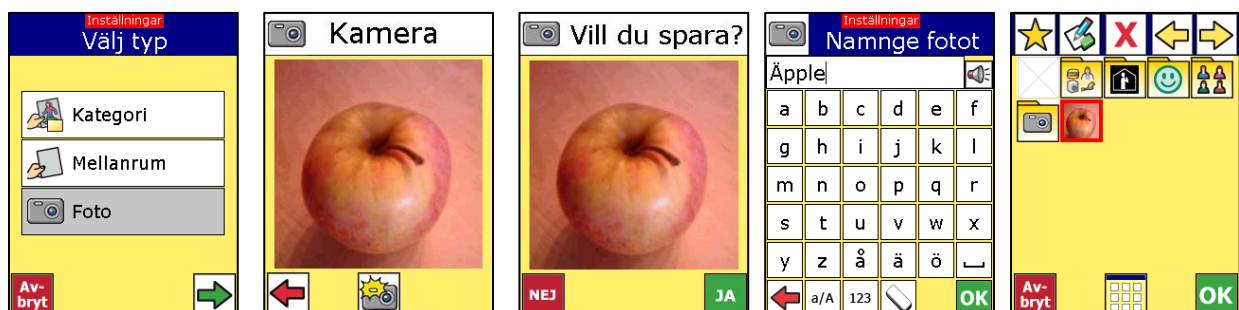

I den första vyn "Välj typ" väljer man alternativet *Foto*. Sedan startar Handi-funktionen *Kamera* och man får fotografera och sedan namnge bilden.

Fotot läggs in sist i bildarkivet. (Om en ikon är markerad när man gör en ny kategori läggs fotot in efter den markerade ikonen.)

Bildarkivet sparas när man trycker på OK.


### 7.2.4 Ändra kategori

✎ För att ändra en kategori markerar man den och trycker på knappen *Ändra*. Samma guide som i 7.2.1 *Lägga in kategori* visas.



### 7.2.5 Byta namn på bild

✎ För att byta namn på en bild markerar man den och trycker på knappen *Ändra*. Tangentbordet visas och man kan ändra bildens namn.

## 7.2.6 Ta bort kategori/bild/mellanrum

-  För att ta bort kategori/bild/mellanrum markerar man den och trycker på knappen *Ta bort*. Efter att man har bekräfta borttagningen och sedan raderas kategorin/bilden/mellanrummet.

## 7.2.7 Flytta kategori/bild/mellanrum

-  För att flytta kategori/bild/mellanrum åt vänster eller höger markerar man den och trycker på knappen *Flytta åt vänster* eller *Flytta åt höger*.
-  Kategorin/bilden/mellanrummet flyttas.

Om man flyttar en bild så att den kommer att läggas före/efter en kategori får man frågan "Vill du flytta ikonen till kategorin x?"

Om man svarar JA flyttas bilden till kategorin x. Om man svarar NEJ läggs bilden före/efter kategorin i nuvarande nivå.



## 8. Stödmenyn

### 8.1 Varför Stödmeny?

Det finns i princip följande kategorier av personer som kommer i kontakt med Handi:

- Användare A, brukare med låg kognitiv kapacitet som alltid har en stödperson för inmatning av aktiviteter mm.
- Användare B, brukare med hyfsad kognitiv förmåga som själv lägger in aktiviteter, men inte förmår överblicka och förstå alla inställningar. Grundinställning görs av en förskrivare eller professionell stödperson.
- Användare C, brukare med bra kognitiv förmåga som helt självständigt hanterar sin Handi.
- Stödpersoner A, dvs personer i användarens närhet (släkt, personal i boende och på dagcenter, kompisar etc).
- Stödperson B, dvs utbildad personal (oftast arbetsterapeuter) som anpassar Handi för brukaren.

Stödpersoner A är mycket viktiga för att användaren ska kunna få optimal nytta av sin Handi. Men dessa stödpersoner saknar ofta djupare insikt om Handi, kognitiva hjälpmedel och kognitiva funktionshinder. I boende och på dagcenter kan bilden kompliceras av stor personalomsättning.

Stödpersoner A och användare B har ofta svårt att hantera mängden inställningar samt hierarkin i dessa. För att förenkla för stödpersoner A och användare B kan man lägga in en första nivå inställningar, en s k **Stödmeny**. När man trycker knappkombinationen kommer man först till stödmenyn och kan där göra de inställningar som stödpersoner A normalt gör.

Via stödmenyn kan stödpersoner B också komma till den "vanliga" inställningsvyn.

Även användare C kan ha nytta av stödmenyn genom att man där samlar de inställningar man oftast använder, stödmenyn blir då en "genväg till vanligaste inställningar", en möjlighet att effektivisera användningen av Handi.

Stödmenyn beskrivs i detta kapitel.

### 8.2 Funktioner i Stödmenyn

Stödmenyn är inställbar, både om den ska visas överhuvudtaget och vilka funktioner som ska visas i den.

Ett urval av Handis alla inställningar och genvägar är möjliga att ha i stödmenyn. Nedan visas vilka.

#### 8.2.1 Inställningar

Nedan anges vilka inställningsfunktioner som är möjliga att lägga in i stödmenyn. (Se resp Handi-funktions bruksanvisning för mera utförlig beskrivning.)

- Handimenyn
- System|Datum och tid
- System|Ljudvolym
- Kalender|Basaktiviteter
- Kalender|Bastimers
- Kalender|Larmljud

- Kalender|Semesterhantering
- Ordna Album
- Användare
- Bildarkiv
- Kontakter|Definiera kontakter
- Telefon/SMS/MMS|Ljud och signaler
- Telefon/SMS/MMS|Basmeddelanden
- Telefon/SMS/MMS|Rensa SMS
- Telefon/SMS/MMS|Rensa samtal
- Bildsamtal|Definiera bildkarta
- Krisplan|Definiera krisplaner

### 8.2.2 Genvägar

Nedan anges vilka genvägar som är möjliga att lägga in i stödmenyn. (Se resp Handifunktions bruksanvisning för mera utförlig beskrivning.)

- Kontakter|Sök kontakt

### 8.2.3 Stödkalender

Stödkalendern är en specialfunktion i stödmenyn. Den fungerar som den vanliga kalendern, men med "alla funktioner på". Alltså, oavsett vilka inställningar det är i användarläget, kan man göra allt och se allt i stödkalendern.

I Stödkalenderns meny visas de funktioner som är relevanta.

Se Kalenderns bruksanvisning för mera utförlig beskrivning.

## 8.3 Visa stödmenyn



När stödmeny är vald (se 8.4 Anpassa Stödmenyn) och man trycker knappkombinationen (se Handboken) kommer man till stödmenyn.


(Vid "Kodskydd Inställningar" får man först ange lösenord.)

I stödmenyn visas de utvalda inställningarna och genvägarna.

När man väljer Inställningar i stödmenyn kommer man till den "vanliga" inställningsmenyn:

## 8.4 Anpassa Stödmenyn

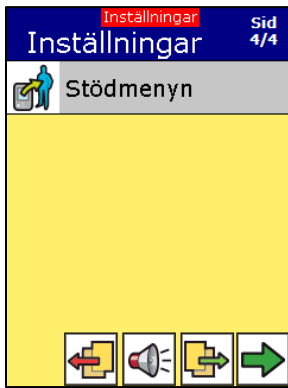

För att göra inställningar för stödmenyn ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



Man väljer Stödmenyn på sida 4. En redigeringsvy för Stödmenyn visas, se vyn till höger.

Här visas alla funktioner som är möjliga att lägga in i Stödmenyn.

Man kryssar i vilka funktioner som stödpersonen är i behov av.

Via  och  kan man ändra ordning på funktionerna.



Om ingen funktion är ikryssad visas inte stödmenyn när man trycker knappkombinationen, utan man kommer direkt till Inställningar.

När man trycker på *OK* sparas stödmenyn.

## 9. Grundinställning

När Handi startas för första gången och när man gör en Återställning eller Total omstart får man välja mellan fyra inställningsnivåer. Detta för att ge rimliga utgångslägen inför den individanpassning som alltid bör ske. Nedan beskrivs vad dessa inställningsnivåer innebär.

Inställningarna för Handimenyn/Startmenyn är endast förslag. Under installationen/återställningen visas alla funktioner i en lista, och de som är ikryssade nedan för respektive inställningsnivå är förvalda i listan.

				Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4
<b>Handimenyn /Startmenyn</b>	<i>Telefon</i>			X	X	X	X
	<i>SMS</i>					X	X
<i>Kursivt= Endast Handifon</i>	<i>Kalender</i>			X	X	X	X
	<i>Batteri</i>					X	X
	<i>Klocka</i>				X	X	X
	<i>Anteckningar</i>					X	X
	<i>Kamera</i>			X	X	X	X
	<i>Foton</i>			X	X	X	X
	<i>Röstanteckningar</i>				X	X	X
	<i>Kontakter</i>						X
	<i>Album</i>						
	<i>Miniräkaren</i>				X	X	X
	<i>Checklista</i>					X	X
	<i>Användare</i>						
	<i>Formulär</i>						
	<i>Formulärsvar</i>						
	<i>Bildsamtal</i>						
	<i>Prisräknaren</i>				X		
	<i>Krisplan</i>						
	<i>Spelaren</i>						
	<i>MMS</i>					X	X
	<i>Spel</i>				X	X	X
		<i>Ikonernas storlek</i>	<i>3x3 ikoner</i>			X	X
			<i>2x2 ikoner</i>				
			<i>2x3 ikoner</i>	X	X		
			<i>5 rader</i>				
			<i>3 rader</i>				
<b>System</b>	<i>Talstöd</i>	<i>Talstöd i tangentbordet</i>	<i>Uppläsning av ord</i>		X		
			<i>Talstödknapp</i>		X	X	
		<i>Talstöd i menyer</i>		X	X	X	
		<i>Talstödsvolym</i>		5			
		<i>Tal hastighet</i>		4			
		<i>Tangentbord</i>	<i>Alltid VERSALER</i>		X	X	
			<i>Automatisk ändring av skiftläge</i>				X
		<i>Autostarta funktion</i>			Kal	Kal	Hm
		<i>Knappar</i>	<i>Hemknapp</i>		X	X	X
							X

		Navigeringsknapp				X	X
<b>Kalendern</b>	Tidvisning	Klocka	Analog klocka	X	X	X	
			Digital klocka				X
		Månadssymbol	Handi			X	
			Pictogram	X	X		
			Veckonr				X
			Inget				
		Visa veckodagsfärger		X	X		
		Visa helgdagar		X	X	X	X
	Kalendervyn	Bläddra bakåt samma dag				X	X
		Bläddra dagar framåt	Max 6 dagar		X		
			Obe gränsat			X	X
		Bläddra dagar bakåt				X	X
		Visa digital tid för aktiviteten				X	X
		Visa text för aktiviteten		X	X	X	X
	Aktivitetsvyn	Ta bort knapp			X	X	X
		Ändra-knapp				X	X
		Sista kvarten som fem punkter				X	X
	Lägga in aktivitet	Lägg in aktivitet via Ändravyn	Vald				X
			Välj typ av aktivitet				X
			Basaktivitet-knapp			X	X
		Lägg in aktivitet via sekvens	Vald	X	X	X	
			Välj typ av aktivitet				X
			Välj basaktivitet	X	X	X	X
			Välj bild			X	X
			Namnge aktiviteten			X	X
			Info-menü			X	X
			Ta bort efteråt				
			Ange kvitterbarhet o larm				
			Ange påminnelse			X	X
		Tillåt starttid som har passerat					X
	Ändravyn		Datum	X	X	X	X
			Namn	X	X	X	X
			Starttid			X	X
			Sluttid				X
			Heldag				X
			Kvittering				X
			Bild				X

			Info-menyn			X	X
			Påminnelse			X	X
			Ta bort efteråt				X
	Info-menyn	Anteckningar				X	X
		Röstanteckningar		X	X	X	X
		Album					
		Kontakter					
		SMS					
		Telefon				X	X
		Formulär					
	Kalendermenyn		Lägga in aktivitet		X	X	X
			Månadsvy		X	X	X
			Veckovy			X	X
			Starta timer	X	X	X	X
			Tidmätare				
			Tidbok				
			Klocka				
			Sök aktivitet				X
	Månadsvy		Visa markering för återkommande aktiviteter				
	Veckovy	Antal dagar i veckovyn	7 dagar	X	X	X	X
			5 dagar				
		Visning av aktivitet	Alltid starttid				
			Bild	X	X	X	X
		Visa återkommande aktiviteter					
		Visa Timvy-knapp					X
	Starta timer	Välj bastimer		X	X	X	X
		Välj bild				X	X
		Namnge timern				X	X
		Timertid	1-99 minuter	X	X	X	X
			1-999 minuter				
			Timmar och minuter				
	Tidmätare	Sekundvisning					
		Visa Paus-knapp				X	X
	Klockvy	Visa datum			X	X	X
		Visa tid på dygnet		X	X	X	X
		Visa knapp för uppläsning varje kvart					
	Basaktiviteter	<b>Endast AIR-bilder</b>	<b>Basbilder (och AIR)</b>	X	X	X	X
		Fika AIR	Fika PCS	X	X	X	X

		Väckning AIR	Stiga upp Pictogram	X	X	X	X
		Mat AIR	Mat Pictogram	X	X	X	X
		Ladda Handi AIR	Ladda Handi tecknad	X	X	X	X
	Bastimers	<b>Endast AIR-bilder</b>	<b>Basbilder (och AIR)</b>	X	X	X	X
		Koka pasta AIR	Koka pasta Pictogram	X	X	X	X
		Tvätten klar AIR	Gul prick 45 min	X	X	X	X
			Tvätten klar PCS	X	X	X	X
	Larmljud	Aktiviteter utan kvitterbarhet	Standard.wav	X	X	X	X
		Aktiviteter med kvitterbarhet	Alarm4.wav	X	X	X	X
		Timers	Alarm8.wav	X	X	X	X
		Påminnelse	Alarm2.wav	X	X	X	X
	Larm	Stäng av larm endast med OK					
		Visa snooze-knapp					
		Vibration vid larm	Alltid vibration	X	X	X	X
			Välj ljudlarm/vibration				
			Aldrig vibration				
	Omstart efter viloläge			X	X	X	
<b>Kontakter</b>	Kontaktlista	Välj ikonstorlek	3x3 ikoner			X	X
			2x2 ikoner				
			2x3 ikoner	X	X		
			5 rader				
			3 rader				
		Ordning	Bokstavsordning				
			Egen ordning (gruppvis)	X	X	X	X
	Kontaktvyn	Adress		X	X	X	X
		Bild		X	X	X	X
		Telefonnummer		X	X	X	X
		Mobilnummer		X	X	X	X
		E-postadress		X	X	X	X
		Info		X	X	X	X
		Ta bort				X	X
		Ändra				X	X
		Avancerad redigering		X	X	X	X
	Kontaktmenyn	Ny kontakt			X	X	X
		Ordna kontakter				X	X
		Sök kontakt					X
<b>Prisräknaren</b>	Föreslå valör			X	X	X	X

<b>Kamera</b>	Ange hur fotot ska sparas						X
	Namnge fotot						X
	Kamera-knapp i Välja bild-vyn			X	X	X	X
	Hemknappen som avtryckare						
<b>Telefon/SMS/SMS</b>							
	Kontaktlista	Välj ikonstorlek	3x3 ikoner			X	X
			2x2 ikoner				
			2x3 ikoner	X	X		
			5 rader				
			3 rader				
		Visa i kontaktlistan	Nytt nummer		X	X	X
			Missade		X	X	X
			Uppringda		X	X	X
		Senast uppringda i "Nytt nummer"			X	X	X
	Ljud och signaler	Ringsignal	Default.wav	X	X	X	X
		SMS-signal	SMS1.wav	X	X	X	X
		Ringvolym		4			
		Samtalsvolym		4			
		Vibration		X	X	X	X
	Telefoninställningar	PIN-kodskontroll					
		Använd telefonknappar		X	X	X	X
		Återställningstid för Ringvolym				X	X
		Visa telefonnummer					X
		Vyn "Samtal pågår"	Knapp för högtalartelefon			X	X
			Knapp för knappsats			X	X
			Knapp för Handimenyn				X
			Avbryt-knapp	X	X	X	X
	Telefonmenyn	Telefon aktiverad		X	X	X	X
		Samtal		X	X	X	X
		Ringvolym		X	X	X	X
		Samtalsvolym		X	X	X	X
		Nät				X	X
		Saldo				X	X
	SMS-inställningar	Visa basmeddelanden vid nytt SMS		X	X	X	X
		Smileyknapp		X	X	X	X
		Text-knapp i Bild-SMS				X	X
		Långa SMS				X	X
		Extra bekräftelsevy innan SMS skickas					

		Spara inkommet meddelande	Spara när SMS besvarats	X	X	X	
			Ange om SMS ska sparas				X
	Basmeddelanden	Ring mig!	<i>Ikryssad</i>	X	X	X	X
		Jag behöver hjälp att handla.	<i>Ikryssad</i>	X	X	X	X
		Vill du gå på bio med mig.	<i>Ikryssad</i>	X	X	X	X
		Jag har kommit hem.	<i>Ikryssad</i>	X	X	X	X
		Grattis på födelsedagen!	<i>Ikryssad</i>	X	X	X	X
		Kram!					
		Kan du hjälpa mig?		X	X	X	X
		Tack för hjälpen!					
		När kommer du?		X	X	X	X
		Var är du?		X	X	X	X
		Grattis på namnsdagen!		X	X	X	X
		Ska vi göra nåt ihop?		X	X	X	X
<b>Miniräknaren</b>	Visa felmeddelanden			X	X	X	
	Heltal och decimaler	Enkel		X	X		
		Kvittoräknare				X	
		Avancerad					X
	Knappsats	123 överst		X	X	X	X
		789 överst					
<b>Stödmenyn</b>	Handimenyn			X	X		
	System	Datum och tid		X	X		
		Ljudvolym		X	X		
	Kalender	Stödkalender		X	X		
		Basaktiviteter			X		
		Bastimers			X		
		Larmljud					
		Semesterhantering					
	Användare						
	Bildarkiv						
	Kontakter	Ordna kontakter		X	X		
		Sök kontakt					
	<i>Telefon och SMS</i>	Ljud och signaler					
		Basmeddelanden			X		
		Rensa meddelanden					
		Rensa samtal					
	Bildsamtal						
	Krisplan						
	<b>Inställningar</b>	<i>obligatorisk</i>		X	X		

