

# HandiTools 2 Revisionshistorik

## **Version 2.0.18**

Loggfiler

*Utfört 2009-11-30*

Knappen "Ta bort" är borttagen.

Ny knapp "Spara" så att man kan spara zipfilen på hårddisken.

Felmeddelande om e-postfunktionen ej öppnas när man klickar på "Skicka".

Nu hämtas även "simlog.txt".

Ny bild

Om man ändrar beskärningsrutan och går vidare utan att klicka på "Beskär" visas nu en fråga om man vill beskära.

## **Version 2.0.17**

Bildsamtal

*Utfört 2009-11-03*

Bilderna sparas i 70x70 pixlar om inställningen är "Stor (3x2 ikoner)" i Handi.

I "Arkiv Bildkartor" kan man ställa in vilken ikonstorlek det ska vara.

## **Version 2.0.16**

Loggfiler

*Utfört 2009-10-28*

Ny funktion. Hämta loggfiler direkt i ansluten Handi och maila dem till önskad mottagare.

Bildsamtal

Bilderna sparas nu i 70x70 pixlar för att se bra ut i inställningen stora ikoner.

Ordningen i "Ny ikon" är nu Kategori/Bild/Mellanrum, dvs samma som i Handi.

Anteckningar

Bugfix. Nu sparas anteckningen även om de första raderna är tomma.

## **Version 2.0.15**

Återställning

*Utfört 2009-09-08*

Bugfix. Undermappar skapas på

<Minneskort>\Handi\Backup om sådana finns i zipfilen. (Gäller främst Alarm och PhoneBook).

## **Version 2.0.14**

Installationsprogram

*Utfört 2009-03-10*

Bugfix. Nu står det Socket istf iPAQ 114 i "Välj handbok" för engelsk version.

## **Version 2.0.14**

Installationsprogram

*Utfört 2009-02-16*

Installerar bruksanvisning för Socket om den finns angiven i install.txt samt ligger i mappen Manuals\Swedish.

Album

Bugfix. Nu fungerar Flytta album i Arkiv-menyn.

Öppna Handi

Bugfix. Nu visas inte meddelanderutan "Uppgradera Handi" för Handi v2 om versionen är högre än 2.2.