

Revisionshistorik HandiTools 2.4

Version 2.4.11 Guide "Ny bild"

Utfört 2012-01-10

Bugfix. Nu fungerar "Bläddra bild" i Windows XP och Vista.

Formulärsvar

Bugfix. Den ändring av betyg för Ja/Nej-formulär som gjordes i v2.4.10 har nu tagits bort.

Allmänt

Några små språkliga ändringar i dansk version.

Version 2.4.10 Spelaren

Utfört 2011-09-19

Bugfix. Nu trimmas mappnamn på mellanslag i början och slutet, vilket förhindrar krasch i Handi.

Bugfix. Nu uppdateras Handi efter att man har flyttat låtar till/från/mellan mappar, vilket förhindrar krasch i Handi.

Formulär

Bugfix. Nu fungerar Ja/Nej-formulär med inställningen "Ja=grönt och Nej=rött".

Bugfix. Det fungerar att ändra Ja/Nej-formulär från inställningen "Ja=rött och Nej=grönt" till "Ja=grönt och Nej=rött".

Formulärsvar

Bugfix. Nu sorteras alltid svaren så att de visas i rätt ordning.

Bugfix. Nu visas betygen korrekt för Ja/Nej-formulär med inställningen "Ja=rött och Nej=grönt" och "lågt betyg vid höga poäng".

Guide "Ny bild"
Bildbaser

Nu är det en begränsning på 200 bilder i "Bläddra bild". AIR-bilder, Basbilder och Handla-bilder (svenska och danska) fungerar nu som vanliga bildbaser, men är registrerade i språkfilen (t ex swedish.ini).

Återställning

MMS-meddelanden i backup-zipfilen kopieras nu till minneskortet vid återställning.

Version 2.4.8 Spelaren

Utfört 2011-05-27

Bugfix. Nu kan man bara ändra taggar (artist och titel) om det först går att läsa ut taggarna från låten. (Vissa wma har ett format som inte stöds av den komponent som används för att läsa/skriva taggar.)

Version 2.4.7 Formulär

Utfört 2011-05-23

I "Ange frågor" kan man nu ta bort frågor i nedscrollad lista och stå kvar i samma position i listan.

Version 2.4.6

Utfört 2011-05-20

Formulär	<p>Nu kan man inte markera frågor och handlingsplaner i tabellerna i Formulär-fliken och Formulärsamling.</p> <p>Bugfix. Formulär med filändelsen FRX istf frx känns nu igen av programmet.</p> <p>Bugfix. Nu kraschar det inte om man råkar "dra" en fråga i "Ange frågor".</p> <p>Bugfix. I Formulärsamling sparas nu exempelformulären (t ex "Mina tidiga tecken") med originalfilnamnet, så det blir inga konstiga dubletter.</p>
Formulärsvar	<p>"Exportera till Excel" sparar frågorna omgiven av citationstecken och det är möjligt att ha semikolon i frågorna.</p> <p>Bugfix. Nu kraschar det inte när man tar bort det sista formulärsvaret.</p>
Version 2.4.5 Återställning Formulär	<p><i>Utfört 2011-05-13</i></p> <p>Bugfix. Nu återställs bildarkiv v2.</p> <p>Bugfix. Nu kan man ändra formulärets namn och frågor samtidigt.</p>
Formulärsvar	<p>Bugfix. Nu visar diagrammet vald period.</p> <p>Ny funktion "Exportera till Excel" sparar formulärsvaren i textfil i formatet "csv".</p>
Loggfiler	<p>Nu hämtas även 4242.upgrade.log.txt från Handi.</p>
Version 2.4.4 Allmänt	<p><i>Utfört 2011-03-07</i></p> <p>Bugfix. Nu fungerar XonD på TCII med danskt operativsystem.</p> <p>Bugfix. Nu blir det ingen krasch efter Återställning. I norsk och dansk version heter det nu "Vil du virkelig slette X?" istället för "Vil du virkelig slette bildet X?" för att frågan ska fungera generellt.</p> <p>Nu används inte MediaPlayer plugin för att spela upp ljud i Album och Bildsamtal. Istället används komponenten amWavePro (används redan för ljudinspelning).</p>
Bildarkiv	<p>Nu sparas bilder till bildarkivet i filformatet JPG om originalbilden är i JPG. (Gäller Handi 3-4.)</p> <p>Nu kan man ändra en bild som ligger i kategorin Kamerabilder.</p> <p>Bugfix. Nu kan man lägga in en ikon vars bild saknas via "Ändra".</p> <p>Nu finns stöd för bildarkiv v2, dvs att bilderna läggs i undermappar efter första bokstaven i filnamnet. Detta för att ge snabbar åtkomst på minneskortet. (Ej infört i Handi än.)</p>
Användare	<p>Bugfix. Nu ser sista vyn rätt ut när man lägger in användarbild och HD Mini är ansluten.</p>

Album	<p>Bugfix. Nu blir det inte felmeddelande "Kunde inte ta bort mappen/filen" när man tar bort en bild i Album Foton.</p> <p>Bugfix. Nu går det att ändra ett ljud efter att man har spelat upp det.</p> <p>Bugfix. Nu är bildrutan i Albumsamling i rätt storlek när HD Mini är ansluten.</p> <p>Bugfix. Nu försvinner inte texten i alumbilderna när man byter namn på albumet.</p>
Formulär	<p>Bugfix. Nu sparas formulärets min- och maxpoäng korrekt när det är ett Ja/Nej-formulär med inställningen "Ja=grönt och Nej=rött".</p>
Formulärsvar	<p>Bugfix. Nu blir det inte "minikrasch" när man väljer "Poäng" i Formulärsvar-menyn utan att ha markerat ett datum först.</p> <p>I diagrammen visas nu lång rubrik på två rader för att inte täcka Ja/Nej-rutorna.</p>
Guide "Ny bild"	<p>Nu kan man välja bilder som har filformaten EMF och PNG.</p> <p>Bilder med filformatet WMF och EMF blir nu i bättre kvalitet tack vare specialhantering. (De läses in via klassbiblioteket GDI+, görs om till PNG 300x300 pixlar och sparas sedan till Handi-bild(er).</p> <p>Nu visas rätt storlek på bilden när man gör symbol (till t ex formulär) och HD Mini är ansluten.</p>
Bildsamtal	<p>Bugfix. Nu visas bildrutan i Bildkartsamling i rätt storlek när HDmini är ansluten.</p> <p>Bugfix. Nu blir nyinlagda ikoner markerade.</p> <p>Bugfix. När man lägger in flera bilder läggs de nu in i rätt ordning (inte omvänd ordning).</p>
Version 2.4.3	
Formulär	Bugfix Nu fungerar Formulärsamling i alla datorer.
Formulärsvar	Bugfix. Nu visas datum korrekt i diagrammen.
Guide "Ny bild"	Bugfix. Nu är lite "skräp" borttaget från vyn "Beskära bild".
Version 2.4.2	
Album	<p><i>Utfört 2011-02-15</i></p> <p>Nu kan man spela in albumljud när HD Mini är ansluten (bilden lägger sig inte över inspelningsknapparna).</p>
Version 2.4.1	
Allmänt	<p><i>Utfört 2011-02-10</i></p> <p>Div översättningsfixar, bl a att det heter "skema" istället för "formular" i dansk version.</p> <p>Det lilla programmet XonD som används för att kolla Handiversion mm kopieras nu inte till Handi varje gång HandiTools startas, utan bara om fel version ligger på Handi.</p> <p>Bugfix. Sökvägen till markerad bild/låt/anteckning mm uppdateras nu när man byter namn på användaren.</p>

Album	Nu kan man ändra en bild i Album-Foton. Då ändras även motsvarande bild i Bildarkiv-Kamerabilder.
Bildarkiv	Nu går det lite snabbare att lägga in och ta bort många bilder när det finns många bilder i arkivet.
Formulär	Bugfix. Images.xml sparas nu med radbrytning. Bugfix. I "Importera formulär" står det nu "Välj formulär som ska hämtas från zipfil" (inte "album"). Bugfix. I "Formulärsymbol - Spara bilden" visas nu rätt vy.
Spelaren	Bugfix. Nu försvinner inte bilden ibland när man ändrar artist/titel på en låt.
Version 2.4.0 Allmänt	<i>Utfört 2011-01-24</i> Anpassning för HTC HD Mini: Nya bilder sparas i större storlek för att passa i HVGA-upplösningen (ikoner är nu 60x60 istället för 45x45 etc). Version 3 av AIR-bilder och Basbilder i installationen (svenska, norska, danska). De är nu i större storlek för att kunna läggas in på HD Mini. Nu visas Handi modellnamn bredvid versionsnummer. Småändringar i engelsk översättning. Dansk översättning.
Spelaren	Nytt sätt att läsa mediataggar när Handi-versionen är >=4.2.4 (via Handis musicfunction.dll.) Innebär att låtinformationen alltid är likadan i HandiTools och Handi. I Handi >=4.2.4 kan man nu läsa/spara låtinformation för WMA.
Bildarkiv	Nu visas ny bild snabbare i HandiTools-fönstret när man har skapat/ändrat bild(er). Nu går det inte ta bort/byta namn på/kopiera kategorin "Kamerabilder". Det går inte heller att göra ny, klippa ut, klistra in bild i mappen. När man tar bort/ändrar bilder i Kamerabilder görs nu samma ändring i Album-Foton. Det går inte att byta namn på kamerabilder/foton (tillfälligt).
Album	Nu visas ny bild snabbare i HandiTools-fönstret när man har skapat/ändrat bild(er). Bugfix. Nu kan man ändra albumbild och behålla markeringen. När man tar bort en bild i Album-Foton, tas motsvarande bild bort i bildarkivets Kamerabilder.

Revisionshistorik HandiTools 2.2

Version 2.2.3 Spelaren	<i>Utfört 2010-11-15</i> Bugfix. Nu kraschar det inte när man lägger in mappar
----------------------------------	---

som innehåller fler filtyper än mp3/wma.
Nu stängs Spelaren i Handi innan man tar bort låtar/mappar. Då får man inte felmeddelande "Kunde inte ta bort mappen/filen p g a den låt som ska tas bort är öppen och "låst" av Mediaplayer i Handi.

Version 2.2.2

Bildsamtal

Utfört 2010-11-08

Bugfix. Nu fungerar det att ändra en bild som man tidigare har bytt namn på (filnamnet är inte samma som namnet). Tidigare blev den gamla bilden kvar vilket ledde till många oanvända bilder.

Formulärsvar

Bugfix. Nu visas diagram med många indata korrekt i "Sammanställning alla frågor".

Bildarkiv

Bugfix. Samma fel som i Bildsamtal ovan.

Säkerhetskopiering

Innan säkerhetskopieringen på Handi 4 börjar görs kontroll att följande fil finns:

Minneskort\Handi\Backup4\device.ini

Återställning

Innan återställningen av handi4 börjar görs kontroll att följande fil finns i backupfilen: \Backup4\device.ini

Version 2.2.1

Kalenderbilder

Utfört 2010-11-xx

Bugfix. Nu går det att lägga in ny kalenderbild.

Version 2.2.0

Allmänt

Utfört 2010-10-19

Denna version krävs till Handi 4.

HandiTools kommunicerar nu med Handi på ett lite annat sätt (RAPI2 istället för RAPI).

När kontakten med Handi avbryts visas ett meddelande i Handi.

Längst ned i HandiTools-fönstret visas Handi-version, ledigt minne på minneskortet samt om Handi är ansluten.

Bildarkiv

Ny flik. Visas endast när Handi 4 är ansluten. Ersätter "Kalenderbilder" för Handi 4. Innebär att man kan organisera bilderna i kategorier, för övrigt samma funktion som "Kalenderbilder".

Album

Albumbilder i Handi 4 kan förses med text.

Ny funktion "Albumsamling". Innebär att man kan göra sitt eget arkiv med album på PC:n, samt dela med sig av sina album till andra Handi-användare.

Spelaren

Ny flik. Visas endast när Handi 4 är ansluten. Ersätter "Musik" för Handi 4. Låtarna kan organiseras i mappar samt förses med symboler.

Formulär och Formulärsvar

Nya flikar. Visas endast när Handi 4 är ansluten.

Ersätter PC-programmet Formulärhanteraren för Handi 4. Via "Formulär" skapar man formulär direkt i ansluten Handi, och kan se svaren i "Formulärsvar".

Via "Formulärsamling" kan man göra sitt eget arkiv med formulär på PC:n, samt dela med sig av sina formulär till andra Handi-användare.

