



Handitek

Revisionshistorik Handi II

Version 2.2.5

Kalendervyn

Utfört 07-11-23

Nu inställbart att kunna bläddra framåt max 6 dagar. Nu ligger timers som infallit samt aktiviteter som larmat för sluttid kvar i 3 minuter i Kalendervyn, pss som aktiviteter med endast starttid.

Bugfix. Om enbart en bild är vald för en aktivitet läses nu bildens namn upp när man trycker på talstöds-knappen.

Aktivitetsvyn

Bugfix. Om enbart bild är vald för en aktivitet läses nu bildens namn upp när man trycker på bilden och på aktivitetsfältet.

Version 2.2.4

”Ladda Handi”

Utfört 07-06-19

Bugfix. Nu kan laddstatus kollas även om batteriet har ytterligare status.

```
if((battery1<40 || battery2<50) && !(sps2.BatteryFlag & BATTERY_FLAG_CHARGING))
```

Version 2.2.3

Aktivitetsvyn

Utfört 07-03-23

Aktiviteten läses nu upp på samma sätt som i Kalendervyn.

Kalendervyn

Nu markeras den aktivitet som läses upp av talsyntesen.

Lägga in aktivitet via Ändravyn

Om Administratörsläge kontrolleras inte att starttid/startdatum är senare än nu.

Larm

Om inte valt larmljud finns spelas ett defaultljud.

Version 2.2.2

Inställning av datum och tid

Utfört 07-02-16

Bugfix. Nu sparas loggfilen som Handi\System\backup.log. I

Inställningar\System\Backup står då nästa backuptid, inte "Ingen backup har gjorts".

Larm

Nu kan ljud med formatet mp3 användas som larmljud.

Ljudvolym

Bugfix. Nu ställs klickljudet in korrekt efter omstart.

Lägga in aktivitet via Ändravyn

Bugfix. Fontstorleken beräknas nu så att t ex "Äta med Birgitta" får plats på en rad.

Almanacka

Bugfix. Nu har februari 29 dagar när det är skottår.

Version 2.21

Kalender

Utfört 070129

Bugfix. Nu läses inte datum upp om talsyntesvolymen är 0 och man först trycker på datum och sedan på en aktivitet.

Musik

Bugfix. Nu visas listan med låtar även efter att man



Handitek

Version 2.2

Inställningar | Kalender |
Basaktiviteter
Anteckningar

Musik

Version 2.2a

Backup

Larmvyn

Timer

Prisräknaren

Lägga in aktivitet i sekvens

Inställningar | Kalender | Lägga
in aktivitet | ... via sekvens
Lägga in återkommande

har spelat en låt.

Utfört 070117

Bugfix. Nu visas basaktivitetens infotext vid ändring av basaktiviteten.

Listan med anteckningar läses in varje gång man startar funktionen.

Listan med musik läses in varje gång man startar funktionen.

Utfört 061214

Bugfix. Vid backup sparas nu datumet "idag+1år" så att programmet fyller på med aktiviteter utan slutdatum fr o m detta datum vid nästa backup.

(Tidigare kunde borttagna aktiviteter läggas tillbaka vid backup.)

Backup görs nu kl 03.15 varje natt.

Nu döljs OK när man har tryckt, så att det inte blir dubbeltryck av misstag.

Om aktiviteten har kvittering och sluttid kommer kvitteravyn vid slutlarmet istället för startlarmet.

Bugfix? Ej tidigare kvitterad aktivitet behåller nu ljudlarm.

Bugfix. Går nu att kvittera aktivitet när larmet kommer i Inställningar.

Bugfix. Ändrad blinkmetod. Ingen läsning i registry för att kolla om tiden ska visas i AM/PM-format.

Bugfix. Om det är flera sidor med larm, blir det nu larmljud även om ljudlarm bara är inställt för en aktivitet på andra sidan.

Nu kan man ändra ljudlarm för timer i Aktivitetsvyn.

Nu kan man gå ur Prisräknaren och behålla inmatade priser.

Nu döljs OK-knappen direkt när man trycker på OK. Bugfix. Blir nu rätt när man backar från "Ange tid" och basaktivitet är vald.

Bugfix. Nu ingen krasch när inställningen är aktivitetstyp och basaktivitet, om man har valt "heldag" och sedan trycker på OK utan att välja basaktivitet.

Bugfix. Ingen "död knapprad" när inställningen är "inget ikryssat" och man trycker OK, och därmed får felmeddelandet "Välj namn eller bild".

"Välj namn" eller "Välj bild" måste vara ikryssad.

Nu döljs OK-knappen så att man inte kan trycka på



Handitek

aktivitet via Ändravyn	den flera gånger och därmed krascha programmet. Nu visas timglas när man trycker på OK.
Ändra återkommande aktivitet	Bugfix. Ändring tisdagar 11.45 krockade med lördagar 11.45 (exempel).
Inställningar System Ljudvolym	Min-läge för larm betyder nu inte avstängd volym.
Starta timer	Bugfix. Man kan nu klicka 2 ggr för att välja bild. Nu döljs OK-knappen direkt när man trycker på OK.
Anteckningar	Programmet uppdateras om man ändrar Anteckningar via Handiladdaren.
Inställningar Kalender Semesterhantering	Bugfix. Ingen krasch när man trycker på OK och listan med aktiviteter är tom.
Textinmatning	Efter 123 blir det CapsMode endast om man har tryckt på punkt eller utropstecken.
Batteristatus	Ändrad dialog med genväg i Handimenyn.
Inställningar Handimenyn	Nu ser "Ny ikon"-vyn likadan ut som andra vyer med blå rubrik och gul bakgrund.
Version 2.19f	<i>Utfört 060914</i>
Backup	Uppdatering av databasen (borttagning av gamla aktiviteter och påfyllning av aktiviteter utan slutdatum) är nu snabbare.
Lägga in återkommande aktivitet via Ändravyn	Bugfix. Nu ingen blå list.
Version 2.19e	<i>Utfört 060913</i>
Backup	Backup kl 2 varje natt är nu borttagen. Istället kopieras kalenderdatabasen till minneskortet varje gång det sker en förändring. Uppdatering av databasen (borttagning av gamla aktiviteter och påfyllning av aktiviteter utan slutdatum) sker i samband med att Kalendervyn visas en gång per dygn. Detta tar en liten stund beroende på antal aktiviteter i databasen. <i>Nu måste det utvärderas om väntetiden är acceptabel.</i>
AM/PM tidformat	Alltid PM vald vid inmatning av ny aktivitet.
Prisräknaren	Bugfix. Som andra siffra kan man skriva in >2. Bugfix. Avrundningsfel 8-7.70=0.31 fixat.
Version 2.19	<i>Utfört 060xxx</i>
AM/PM tidformat	I engelsk version kan man nu välja AM/PM-format i Settings System Date and Time. När AM/PM är valt visas tiden som t ex "3.50 PM" i digital klocka, kalendervyn, aktivitetsvyn och larmvyn. Vid tidsinmatning kan man skriva in tid<10 utan 0 först och trycker på en AM/PM-knapp för att välja för-



Handitek

Prisräknaren	eller eftermiddag. I engelsk version står nu valutasymbolen "£" alltid före summan. Bugfix. Div avrundningsfel med engelsk valuta. Bugfix. Om man trycker på valda pengar i Betala-vyn backar man nu inte tillbaka till "Ta fram"-vyn. Man kan nu trycka på summan längst ned i listan för att avmarkera en post. (Då läser talsyntesen upp summan istället för posten.)
Analog klocka	Bugfix. Nu säger talsyntesen tiden rätt mellan kl 23.25 och 23.59.
Almanacka	Bugfix. Nu visas idag-knappen om valt datum ej är dagens datum när dialogen öppnas.
Version 2.18	<i>Utfört 060621</i>
Röd pil	Ingen röd pil om funktionen är vald som autostart och det är den enda funktionen i Handimenyn.
Timer	Nu kan man lägga in timertid upp till 999 min. Ställs in i Inställningar Kalendern Starta timer.
Ändravyn	Nu är Kvitterra-knappen grå när man ska ändra en återkommande aktivitet.
Databashantering	Nu säkert att databasen alltid sparas på fil efter en ändring.
Larm	Nu sätts nästa WakeUp-tid alltid när handi.exe startar. Dvs larm kommer att fungera även efter soft reset.
Ändra info	Bugfix. Nu sparas separat info-fil när man ändrar "endast denna dag" för återkommande aktivitet som har gemensam info-fil. (Buggen uppstod i v2.1a när tiden för ändring av återkommande aktivitet förkortades.)
Återkommande aktivitet månadsvis	Bugfix. Den 8:e finns nu med som alternativ.
Version 2.17	<i>Utfört 060529</i>
Prisräknaren	Bugfix. Nu läser talsyntesen upp summan korrekt när man trycker på rubrikraden.
Version 2.16	<i>Utfört 060511</i>
Inställningar System Talsyntes Uttalskorrigering	Borttagen för dansk version.
Formulär	Bugfix. Nu anpassas Ja/Nej efter språk.
Ändravyn	Bugfix. Nu kan man bara trycka på Bild när den är synlig.
Version 2.15	<i>Utfört 060413</i>
Prisräknaren	Anpassning för engelska valörer. (Fel vid



Handitek

	konvertering av olika datatyper, vilket upptäcktes vid användning av pence=decimaltal.) Nu skiljer talsyntesen på singular och plural, dvs det blir "en krona" istället för "en kronor". Bugfix. Nu händer samma sak när man trycker på punkten som på siffror efter plus. Nu visas 0 automatiskt i inmatningsrutan om man trycker på punkten först. Bugfix. Fel vid uppläsning av enstaka belopp i listan om man har bläddrat.
Ändravyn	Bugfix. I engelska versionen fick vissa datum ej plats, t ex "Wednesday 12 Apr..".
Anpassning till Qtek S200	Anpassning av hårdvaruknapparna till Qtek S200.
Version 2.14 Återkommande aktivitet utan slutdatum	<i>Utfört 060404</i> Ny funktion. Man kan välja denna variant av återkommande aktivitet via knappen "Inget slutdatum" i "Välj typ av slutdatum". Aktiviteten läggs sedan in med önskat mönster för ett år framåt. Vid backup varje natt kontrolleras att aktiviteten hela tiden är inlagd ett år framåt i tiden.
Ändravyn	Bugfix. Vissa datum fick ej plats att visas med veckonummer, t ex "Onsdag 29 mar v13".
Version 2.13 Anteckningar	<i>Utfört 060329</i> Bugfix. Fel anteckning tas bort när en anteckning på sid 1 ska tas bort.
Röstanteckningar	Bugfix. Fel röstanteckning tas bort när en röstanteckning på sid 1 ska tas bort.
Hem-knapp	Bugfix. Fungerade ej i 2190. (Pga detta har alla dialoger ändrats - bitmappknappar har bytts ut till statiska bilder.)
Lägga in aktivitet via Ändravyn Ange lösenord	Bugfix. Nu kan man stega månader framåt i tiden. Bugfix. Nu läggs lösenordvyn överst efter omstart även om annan autostartfunktion än Handimenyn är vald.
Ändravyn Stegvis inmatning av aktivitet	Nu blir start- och sluttid "gråade" när heldag är valt. Bugfix. När man backar från "Skriv in info" till "Namnge aktiviteten" visas nu hela texten "Namnge aktiviteten".
Spara för dagbok	Heter nu "Ta bort efteråt" med omvänd betydelse. Default är Nej.
Version 2.12 Textinmatning	<i>Utfört 060322</i> Bugfix. Nu finns markören kvar efter att Larmvyn eller annan vy tillfälligt lagt sig över



Handitek

Aktivitetsvyn	<p>texinmatningsvyn i befintlig anteckning. Bugfix. Nu fungerar uppläsning av ord vid mellanslag igen. Bugfix. Nu fungerar mellanslag i A-läge. Anpassning för 2190. Nu uppdateras skärmen på korrekt sätt när man stänger Ändravyn och aktiviteten har textinfo. Rullningslist kan nu visas för textinfo när texten inte får plats på en sida.</p>
Anteckningar	<p>Bugfix. Nu visas kvarturet oavsett (dold) inställning. Anpassning för 2190. Rullningslist kan nu visas när texten inte får plats på en sida.</p>
Avsluta Handi	<p>Bugfix. Nu går det att avsluta Handi när funktionen ”Röstanteckningar” är aktiv.</p>
Basaktiviteter	<p>Bugfix. Nu sparas valet ”Spara för dagbok” när man skapar/ändrar basaktiviteter samt lägger in basaktivitet.</p>
Röstanteckningar	<p>Bugfix. Nu ingen ”hängning” när man försöker ge ljudet ett namn som redan finns. Nu finns Paus-knapp vid uppspelning av befintlig röstanteckning.</p>
”Ladda Handi”	<p>Bugfix. Nu kan man klicka OK och stänga vyn vid detta meddelande.</p>
Stegvis inmatning av aktivitet	<p>Nu är Avbryt alltid näst längst till vänster.</p>
Version 2.11	<i>Utfört 060309</i>
Bildvisning	<p>Känner nu av vilket operativsystem det är, och läser in bilder på annat sätt om WM5.</p>
Textinmatning	<p>Bugfix. Nu finns markören kvar efter att Larmvyn eller annan vy tillfälligt lagt sig över texinmatningsvyn (Inmatning av namn eller röstinfo för aktivitet eller timer.)</p>
Larm	<p>Nu sätts larmljudsmappen till \Handi\System\Alarm. (Alla larmljud ska alltså finnas där.) Om denna mapp saknas gäller den gamla mappen CF Card\Handi\User\Alarm. Förhoppningsvis kan nu larmljuden alltid spelas upp.</p>
FMOD	<p>Ny version av ljudkomponenten.</p>
Version 2.1 Sammanställning	<i>Utfört 060306</i>
Kalenderdatabas	<p>Stor förändring: Egen databas används istf Outlook för hantering av aktiviteter. Databasen heter \Handi\System\calendar.cdb. Om det inte finns någon databas när Kalendern öppnas kommer Outlook-databasen att genomsökas efter aktiviteter. Det kan ta max ett par sekunder om</p>

Spara aktivitet för dagbok	<p>det finns många aktiviteter inlagda.</p> <p>Ny funktionalitet. Nu kan man ställa in om aktiviteten ska sparas när dagen för aktiviteten har passerat. Default är Ja. (Exempelvis vill man kanske spara aktiviteten "Bio", men inte "Borsta tänderna".)</p> <p>Automatisk rensning sker varje natt i samband med backup.</p> <p>Via <i>Inställningar / Kalender / Lägga in aktivitet</i> kan man nu ange om vyn "Spara för dagbok" ska visas vid stegvis inmatning av aktivitet.</p> <p>Via <i>Inställningar / Kalender / Ändravyn</i> kan man nu ange om alternativet "Spara för dagbok" ska visas vid imatning eller ändring av aktivitet via Ändravyn.</p>
Timeout Hemknapp	<p>Nu helt borttagen.</p> <p>Ny funktion. Genom att trycka på hårdvaruknappen i mitten (Enter) kommer man direkt till den funktion som valts som autostart. Dvs samma funktionalitet som timeout hade från början.</p>
Larm	<p>Bugfix. Missade larm beror troligen på att nästa WakeUp-tid inte sattes om nästa aktivitet skulle komma om >1dag.</p> <p>Bugfix. Blå list efter larm om man står i annan vy än Handimenyn.</p>
Stegvis inmatning av aktivitet	<p>Bugfix. Nu visas Nästa-knappen direkt i vyn "Spela in", så det går att gå förbi utan att spela in ljud.</p>
Inmatning av start- och sluttid Kalendervyn	<p>Bugfix. Nu kan man inte skriva in klockslag >23.</p> <p>Ny typ av Bläddra dag-knappar för att man ska kunna bläddra snabbare.</p> <p>Nu är Info-symbolen i aktivitetsfältet mindre för att inte täcka över text.</p>
Power on	<p>Bugfix. Nu fortsätter Inställningar vara överst efter power on, om man innan power off stod i Kalendervyn, öppnade Inställningar och sedan stängde av.</p>
Röstanteckningar	<p>Bugfix. Nu visas uppspelning av tidigare inspelad röstanteckning korrekt. När man trycker på Play nollställs visningen.</p>
Spela in ljud	<p>Bugfix. Nu kraschar inte programmet om man avbryter inspelning genom att trycka på röd pil.</p>
Ljudinfo till aktivitet	<p>Bugfix. Det gick inte att spela in ljud till aktivitet igen när man lyssnat på det första ljudet i Aktivitetsvyn.</p>
Talsyntes	<p>Bugfix. Nu ändras inte ljudvolymen när man trycker på uppläsning innan föregående uppläsning avslutats.</p>
Anteckningar	<p>Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på texten.</p> <p>Bugfix. Nu blir det talstöd när man trycker på</p>



Handitek

Textinmatning	rubriken. Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på talstödsknappen. Bugfix. Nu finns markören kvar efter att Larmvyn annan vy tillfälligt lagt sig över textinmatningsvyn. Symbol för mellanslag införd.
Prisräknaren	Bugfix. Nu är inte två valörer föreslagna när man backar från ”Ta fram” och sedan går dit igen.
Version 2.1i Språkanpassning Textinmatning	<i>Utfört 0603xx</i> Nu finns engelsk tangentbordslayout. Symbol för mellanslag införd.
Version 2.1h Prisräknaren	<i>Utfört 060302</i> Bugfix. Nu är inte två valörer föreslagna när man backar från ”Ta fram” och sedan går dit igen.
Bilder Cachning av bilder	Bugfix. Sidbrytning är nu OK. (PickImageObject) Bugfix. Fel entry när sökväg till minneskortet läses från registry.
Inmatning av start- och sluttid Textinmatning	Bugfix. Nu kan man inte skriva in klockslag >23. Hantering av engelsk tangentbord.
Version 2.1g Heldagsaktiviteter	<i>Utfört 060222</i> Bugfix. Nu läggs heldagsaktiviteter in sist i kalendervyn.
Version 2.1f Nästa larmtid	<i>Utfört 060222</i> Bugfix. Nu utnyttjas exakt aktuell tid när nästa larmtid ska sättas. I v2.1 ingick inte sekunder, vilket gjorde att inmatning av timer gav larm direkt på starttid.
Version 2.1e Inställningar Kalender Rensa gamla aktiviteter	<i>Utfört 060213</i> Funktionen har tagits bort.
Version 2.1d Inmatning av återkommande/ettårig aktivitet via Ändravyn	<i>Utfört 060209</i> Bugfix? Satte datum på ett bättre sätt för att inte få felmeddelandet ”Aktiviteten kunde inte läggas in. Ändra slutdatum eller dagar”. Ändrade så att krock-kontrollen fungerar pss som innan v2.1a.
Stegvis inmatning av återkommande/ettårig aktivitet	Bugfix. Nu visas ett felmeddelande om inga aktiviteter kommer att läggas in. (Detta görs redan vid inmatning via Ändravyn.)
Stegvis inmatning av aktivitet	Bugfix. Nu visas Nästa-knappen direkt i vyn ”Spela



Handitek

Hemknapp	in”, så det går att gå förbi utan att spela in ljud. Bugfix. Nu fungerar Hem-knappen även i Handimenyn.
Spara aktivitet för dagbok	Nu kan ”Spara för dagbok” visas i stegvis inmatning av aktivitet.
Inställningar Kalender Lägga in aktivitet	Nu kan man kryssa i om vyn ”Spara för dagbok” ska visas i stegvis inmatning av aktivitet.
Version 2.1c	<i>Utfört 060207</i>
Talsyntes	Bugfix. Nu ändras inte ljudvolymen när man trycker på uppläsning innan föregående uppläsning avslutats. (TextSpeakerMFCObject)
Larm	Bugfix. Missade larm beror troligen på att nästa WakeUp-tid inte sattes om nästa aktivitet var om >1dag.
Ettårig aktivitet	Ny funktion. Man kan välja denna variant av återkommande aktivitet i ”Välj typ av aktivitet”. Ettåriga aktiviteten läggs sedan in med önskat mönster för ett år framåt. Vid backup varje natt kontrolleras att aktiviteten hela tiden är inlagd för ett år framåt.
Timeout Hemknapp	Nu helt borttagen. Ny funktion. Genom att trycka på hårdvaruknappen i mitten (Enter) kommer man direkt till den funktion som valts som autostart. Dvs samma funktionalitet som timeout hade från början.
Anteckningar	Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på texten. Bugfix. Nu blir det talstöd när man trycker på rubriken.
Version 2.1b	<i>Utfört 060201</i>
Databas	Stor förändring: Egen databas används istf Outlook för hantering av aktiviteter.
Återkommande aktivitet	Ytterligare lite tidsförkortning att spara ändrad tid för en återkommande aktivitet. (<i>Har inte samma stora effekt sedan databas införts, men är ingen nackdel.</i>)
Textinmatning	Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på talstödsknappen. Bugfix. Nu finns markören kvar efter att Larmvyn annan vy tillfälligt lagt sig över textinmatningsvyn.
Power on	Bugfix. Nu fortsätter Inställningar vara överst efter power on, om man innan power off stod i Kalendervyn, öppnade Inställningar och sedan stängde av.
Inställningar Kalender Rensa	Ny funktion. För att ta bort ev aktiviteter som ändrats



Handitek

gamla aktiviteter	till att inte sparas för dagbok. <i>Automatisk rensning ska ske vid backup varje natt – ej implementerat ännu.</i>
Röstanteckningar	Bugfix. Nu visas uppspelning av tidigare inspelad röstanteckning korrekt. När man trycker på Play nollställs visningen.
Kalendermenyn	Bläddra dag-knappar nu CStatic istf CBitmapButton, för att man ska kunna bläddra snabbare.
Version 2.1a	<i>Utfört 060113</i>
Återkommande aktivitet	Nu tar det kortare tid att lägga in en återkommande aktivitet en lång period, eftersom krock-kontrollen gentemot andra aktiviteter förändrats. Det tar även lite kortare tid att ändra tid för en återkommande aktivitet.
Spara aktivitet för dagbok	Ny funktionalitet. I Ändravyn kan man nu ställa in om aktiviteten ska sparas när dagen för aktiviteten har passerat. Default är Ja.
Inställningar Kalender Ändravyn Kalendervyn	Nu kan man kryssa i om knappen ”Dagbok” ska visas i Ändravyn. Nu är Info-symbolen i aktivitetsfältet mindre för att inte täcka över text.
Spela in ljud	Bugfix. Nu kraschar inte programmet om man avbryter inspelning genom att trycka på röd pil.
Ljudinfo till aktivitet	Bugfix. Det gick inte att spela in ljud till aktivitet igen när man lyssnat på det första ljudet i Aktivitetsvyn.
Loggning	Tillfällig loggning vid OutlookControl::setWakeUp och CHandiDlg::OnWakeUp. För att kolla att nästa wakeup-tid sätts ordentligt och att OnWakeUp alltid blir anropad för denna tid.
Larm	Bugfix. Blå list efter larm om man står i annan vy än Handimenyn.
Version 2.06	<i>Utfört 051129</i>
Album	Bugfix. Nu visas rätt album på sida >1.
Omstart	När handi.exe startas töms temp-mapparna.
Formulärsvar	Bugfix. Nu visas Talstöd-knappen först när ett svar är markerat. Uppläsningen avbryts när man trycker på grön eller röd pil.
Version 2.05	<i>Utfört 051125</i>
Formulärsvar	Bugfix. Läste ”10” i VA-skalan som ”1”.
Kopieringsskydd	Bugfix. På 2210 blev det fel ibland när man skrev serienumret via SetupHandiCard. Avläsningen av serienummer blev därmed också fel.



Handitek

Version 2.04

Sökväg till användardata

Utfört 051122

Nu anges sökvägen till minneskortet i registry. På så vis kan minneskortet ha olika namn, t ex CF Card eller Storage Card.

Ljudinspelning

Nu används en inbyggd dialog istf VoiceRecorderObject.

Anpassning till HP 6340 och Qtek 2020

Anpassning av knapparna till 6340 och Qtek 2020. Ingen kontroll görs av kopieringsskyddet för Qtek2020.

Inställningar|Handimenyn
Inställningar|Basaktiviteter
Inställningar|Bastimers
Inställningar|Semesterhantering
Anteckningar

Bugfix. Nu sparas ”ikryssningar” på ett bättre sätt.

Timeout

Nu byts ”ny rad” ut mot ”punkt” för att uppläsningen ska bli bättre.

Timeout finns nu endast kvar i Kalender.

Version 2.03

Användarbild

Utfört 051025

Bugfix. Nu tas gammal usericon.jpg bort i tempmappen och Handimenyn uppdateras när man lägger in användarbild.

Användare

Bugfix. Om det finns en användarbild visas dess ikon i rubriken, ej defaultsymbolen.

Kalendermenyn

Bugfix. Nu hänger sig inte Handi när man trycker på markörknappen.

Formulär

Nu visas handlingsplanens rubrik när handlingsplanen kommer upp som resultat av formulärsvar.

Bugfix. Sidnummer visades med fel font när formuläret hade en symbol.

Album

Bugfix. Nu visas albumen i bokstavsordning.

Larmvyn

Bugfix. Nu stängs larmljudet av även om man spelar musik samtidigt som larmet kommer.

Prisräknaren

Bugfix. Nu blir 18, 38 och 78 öre riktigt uppläst av talsyntesen.

Version 2.02

Lägga in aktivitet – Namnge aktiviteten

Utfört 051010

Bugfix. Rubriken lästes ej upp.

Almanacka

Bugfix. Rubriken lästes ej upp.

Ändravyn

Bugfix. Om man först sätter sluttid och sedan försöker ta bort får man nu felmeddelandet "Sluttid måste anges". För att ”ta bort” ska man sätta samma tid som starttiden.

Lägga in aktivitet via Ändravyn (välj typ av aktivitet) och genväg

Bugfix. När man lade in en aktivitet ett annat datum visades ändå dagens datum när Kalendern sedan startade.



Handitek

Version 2.01

Lägga in aktivitet – välj datum

Utfört 051005

Nu ej svart fyrkant för att indikera vilka dagar det finns aktiviteter.

Bugfix. Kunde ej bläddra bakåt efter årsskifte.

Bläddra-knappar nu CStatic istf CBitmapButton, för att man ska kunna bläddra snabbare.

Bugfix. Nu sparas valt datum även om man efteråt bläddrar till annan månad utan att välja datum där.

Bugfix. Om status är okänd visas nu "?" istf "255%".

Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på knappen "Alla dagar".

Bugfix. Det saknades en linje i kryssrutan "Ta bort-knapp".

Nu heter kryssrutan "Visa markering för återkommande aktiviteter". Dessutom extra info "Markering för enstaka aktiviteter visas alltid."

Inställningar|Batteristatus

Lägga in återkommande

aktivitet – välj period

Inställningar|Kalender|

Aktivitetsvyn

Inställningar|Kalender|

Almanacka

Inställningar|Prisräknaren

Nu visas Tillbaka-knapp om man går till Inställningar|Prisräknaren direkt från Prisräknaren. När man klickar på Tillbaka kommer man till Inställningar.

Inställningar|Användare

Nu visas Tillbaka-knapp om man går till Inställningar|Användare direkt från Användare. När man klickar på Tillbaka kommer man till Inställningar.

Inställningar|Krisplan

Nu visas Tillbaka-knapp om man går till Inställningar|Krisplan direkt från Krisplan. När man klickar på Tillbaka kommer man till Inställningar.

Inställningar|Administratörs-
läge

Nytt namn på "Hjälparläge". A istf H i symbolen.

Lägga in aktivitet

Nu visas "timglas" när aktiviteten läggs in i Outlook. Mediaspelar-komponenten startas nu när ljud ska spelas upp och sedan stängs den. Tidigare var den aktiverad hela tiden.

FMOD

Bugfix. Nu initieras inte FMOD två ggr.

Förhoppningsvis inget felljud vid larm.

Cachning av bilder

När en bild ska läsas in första gången kopieras den till tempmappen (\Temp\Handi). Nästa gång läses den direkt från tempmappen. Tempmappen töms när Handiladdaren och Formulärhanteraren uppdaterar Handi (\Temp\Handi\Pictures, ..\PictureIcon och ..\Album) resp (\Temp\Handi\Forms).

Ändravyn – ändra

Nu kan man ändra datum, men ej heldag eller kvitterbarhet. För heldagsaktiviteter kan man inte ändra start- och sluttid.

återkommande aktivitet

Inställningar|Kalender|

Bugfix. Alla återkommande aktiviteter visades inte i listan, vilket berodde på att deras ID inte var tillräckligt unika. Nu sparas ID som aktuell tid inkl

Semesterhantering



Handitek

Ny röstanteckning	sekunder. Bugfix. Nu sparas röstanteckning även när man gör den via genväg.
Användare	Nu visas ev liten användarbild (usericon.jpg) som ikon i Handimenyn. Om ingen sådan finns visas defaultsymbolen.
Version 2.0	<i>Utfört 050929</i>
Krisplan	Knapp 2 aktiverar nu Krisplan endast om Krisplan finns i Handimenyn.
Version 1.01b	<i>Utfört 050928</i>
Ta bort återkommande aktivitet	Bugfix. När man, istället för att trycka på Ja, tryckte ytterligare en gång på "Endast denna dag" eller "Denna dag och framåt" hängde sig programmet.
Välj bild i Ändravyn	Bugfix. När man, istället för att trycka på OK, tryckte ytterligare en gång på bilden hängde sig programmet. När man tog bort en bild blev ibland en annan bild vald istället.
Larm	Bugfix. Sista sidan med bilder visades ej. Bugfix. Nytt försök att förhindra "fräsande ljud" vid larm. Nu ska powerOnCall (väckning vid en viss tid) bara kunna tas emot en gång/larm.
Inställningar Basaktiviteter och Inställningar Bastimers	Bugfix. Gick inte att ta bort alla basaktiviteter/bastimers.
Ny röstanteckning	Om filnamnet innehåller felaktiga tecken tas de bort automatiskt.
Anteckningar	Om filnamnet (översta raden) innehåller felaktiga tecken tas de bort automatiskt.
Musik	Musiken stängs ej av i Anteckningar och Krisplan.
Uppdatering från Handiladdaren	Bugfix. Tappade fokus i vissa lägen.
Version 1.0	<i>Utfört 050923</i>
Återkommande aktivitet	Nu blir inte slutdatum automatiskt dagens datum. Ingen Nästa-knapp förrän man valt datum.
Prisräknaren	Bugfix. Det gick inte att ta bort pengar som valts från sida 2.
Handimenyn	Bugfix. Nu ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på pilen i boxen "Ikonernas storlek".
Backup	Tänder ej skärmen vid automatisk backup.
Uttalskorrigering	Bugfix. Inget norskt felmeddelande.
Talsyntes	Bugfix. Nu läser talsyntesen upp text efter utropstecken och frågetecken.



Handitek

Version 1.0j

Användare
Formulär

Krisplan

Utfört 050920

Ny funktion plus Inställningar|Användare.
Bugfix. Blev en tom sida 1 för ett testformulär där fråga 1 fyller exakt hela skärmen.
Knapp 2 kan nu användas för att aktivera Krisplan.
Ny text i Inställningar|Krisplan.

Version 1.0i

Formulär

Musik

Utfört 050913

När formuläret har automatisk numrering är texten indragen på alla frågor som inte är rubriker (=fet stil).
Frågenumret visas i egen kolumn till vänster.
Bugfix. Nu skapas en svarsfil endast om formuläret har någon fråga med svar.
Låtarna visas nu i bokstavsordning.

Version 1.0h

Textinmatning

Formulär

Formulär/Handlingsplan

Utfört 050913

Tog bort automatiskt byte till bokstavsläge och versaler när man stod i Num-läge och tryckte ”. ”.
Bugfix. Inget nummer på frågor utan svarsalternativ.
Plus div ändringar i koden.
Bugfix. Nu visas Talstöd-knappen igen när talsyntesen avslutat uppläsningen

Version 1.0g

Textinmatning

Aktivitetsvyn

Formulär/Formulärsvar

Utfört 050912

Bugfix. Caps-knappen fungerade ej. Blev fel efter punkt.
Bugfix. Ingen ring med prickar när man håller pennan/fingret nedtryckt på Info-text.
Nu inbäddad i handi.exe. Tidigare användes komponenten FormObject.dll.