

# Handi version 3.10 Revisionshistorik

<b>Ny uppdatering</b> Handi version 3.10.18 B Handifon version 3.10.21 A	<i>Utfört 2010-10-26</i> 50-öringen borttagen i PrISRÄKNAREN. 50-öringen borttagen i PrISRÄKNAREN.
<b>Version 3.10.21</b> (2582) Touch Cruise II	<i>Utfört 2010-04-20</i> Bugfix. Nu fungerar skärmläckningstiden ”Stäng av om apparaten inte använts på x min” på TCII.
<b>Version 3.10.20</b> (2577) Kontakter	<i>Utfört 2010-02-09 (endast engelsk och finsk)</i> Bugfix. Vid skapande av contacts.xml vid backup kan nu &-tecken i filnamn hanteras.
<b>Version 3.10.19</b> (2561) Touch Cruise II	<i>Utfört 2010-01-04</i> Ytterligare fix för att skärmen ska hållas tänd under telefonsamtal. Apparaten väcks vid SMS (ändring i installation).
<b>Version 3.10.18</b> (2556) Inställningar Datum och tid  Touch Cruise II	<i>Utfört 2009-12-09 (Handifon: 2009-12-21)</i> Bugfix. Nu blir inte skärmen svart när man ställer in datum från sommartid till vintertid eller tvärtom, t ex vid total omstart. Apparaten väcks vid SMS (ändring gjord i programvara, krävs även för installation). Skärmen hålls tänd under telefonsamtal.
<b>Version 3.10.17</b> (2552) Installation	<i>Utfört 2009-11-03</i> Bugfix. Nu blir inte skärmen svart efter att man ställer in datum och tid. (Gäller endast Handi Socket och 2190.)
<b>Version 3.10.16</b> (2540) Kamera  Backup  Bild-SMS	<i>Utfört 2009-10-26</i> Bugfix. Nu leder inte kombinationen kalender i autostart och användning av kamera till att skärmen släcks, och att apparaten sedan måste startas med soft reset. Bugfix. Nu kan föreslaget namn på fotot användas. Bugfix. Nu förhindras att handdatorn går ner i sleep medan backup pågår. <b>Ej testat med långsam backup!</b> Nu matchas inte delar av ord med en bild. T ex <i>Mats</i> kan inte bli <i>&lt;bild på mat&gt;s</i> .
<b>Version 3.10.15</b> (2529) Kamera  Kalender	<i>Utfört 2009-10-20</i> Bugfix. Nu sparas den stora kalenderbilden. (Buggen kom i förra versionen.) Bugfix. Nu ändras inte info för en återkommande aktivitet före angivet datum när man väljer ”Idag och framåt”.
<b>Version 3.10.14</b> (2505)	<i>Utfört 2009-09-11</i>

Kamera	Bugfix. Nu fungerar felmeddelandet att det redan finns en bild med samma namn. (Buggen kom i förra versionen.) Defaultnamn för bild är nu inte "img_x" utan "Bild_x" (språkberoende).
<b>Version 3.10.13</b> (2498)	<i>Utfört 2009-08-24</i>
Bildsamtal	Bugfix. Med en speciell (norsk) bildkarta gick det bara att lägga in några bilder i taget, sedan stannade programmet i "Definiera ikon".
Telefon	Bugfix. Nu fungerar nummerkonvertering bättre (90400 matchar inte längre 0317690400).
Kamera Installation	Nu blir det ett felmeddelande om fotot inte kan sparas. Anpassning för TCII. Windows systemljud vid meddelanden borttaget. (Inställningar Ljud&Meddelande Händelser) Windows-inställningen ClearType borttagen.
<b>Version 3.10.12</b> (2482)	<i>Utfört 2009-06-23 (endast engelsk version)</i>
Kamera Avsluta Handi	Anpassning för apparaten HTC Touch Cruise II. Mera text: <i>Vill du avsluta Handi? Tänk på att larm inte kommer att fungera. Ändringar i Windows kan påverka Handi negativt. Gör en omstart för att komma tillbaka till Handi.</i>
Telefon	Ny inställning för Telefonmenyn. Inställbart vad som ska visas, och möjligt att ta bort menyn helt. Nu visas dolt nummer ("Okänd") i Missade samtal.
SMS	I 123-läget är <b>ü</b> utbytt till <b>é</b> på svenskt tangentbord. Bugfix: Nu visas datum/tid i skickade sms. Bugfix: Knapparna i tangentbordet är nu riktiga hela tiden.
Kalender	Knappen "Bläddra månad bakåt" visas nu när man lägger in slutdatum för återkommande aktivitet.
Backup	Nu görs det backup på larmljud och ringsignaler (\Handi\System\Alarm och (\Handi\System\PhoneBook). <i>För återställning i HandiTools krävs ny version 2.0.15.</i>
Formulär	Nu sätts inställningen System/Apparaten/Sätt på med Power-knappen default för HTC Touch Cruise II. Bugfix. Nu visas formulären i rätt ordning även när de är inmatade samma tid.
<b>Version 3.10.11</b> (2464)	<i>Utfört 2009-04-29 (endast dansk version)</i> <i>2009-05-04 (svensk Handi)</i> <i>2009-05-06 (engelsk Handifon)</i>
Touch Cruise II Socket	Kameran använder nu DirectShow. Specialhantering för WM6 så att inte "minneskort utdraget" visas vid power on.
<b>Version 3.10.10</b> (2457)	<i>Utfört 2009-04-15 (endast norsk version)</i>
Bildsamtal Användare	Bugfix. Ingen seghet när bildkartan saknar bilder. Bugfix. Nu uppdateras Handimenyn när inställningarna

	har ändrats.
Kalender	Bugfix. Nu visas ej vibration i Inställningar Kalender Larm när det är en Handi-konfiguration. (Tidigare var det apparatberoende, men blev fel för iPAQ114.)
Touch Cruise II	Anpassningar för ny apparat.
<b>Version 3.10.9</b> (2436)	<i>Utfört 2009-03-02</i>
Inställningar Bildsamtal Definiera bildkarta	Bugfix. Nu hänger sig inte inställningsvyn när man öppnar den och sedan trycker på Avbryt direkt.
<b>Version 3.10.8</b> (2432)	<i>Utfört 2009-02-25</i>
Inställningar System Apparaten	Bugfix. Nu sätts rätt värde för avstängningstid på 2190.
<b>Version 3.10.7</b> (2428)	<i>Utfört 2009-02-19</i>
Socket	Stöd för "Hold switch" införd.
<b>Version 3.10.6</b> (2421)	<i>Utfört 2009-02-09</i>
SMS	Ny inställning "Långa SMS". Då kan man skicka meddelanden som är längre än 160 tecken. Antal skickade SMS anges i vyn "Skicka meddelande". Vidarebefordra meddelande som ligger i "Skickade".
Inställningar Telefon och SMS	"SIM-kontakter" visas alltid i listan. Om SIM-kort saknas eller telefonen är avstängd är funktionen gråad.
Inställningar System Apparaten	Apparatinställningar för 2190 och Socket. Inställning för startknapp saknas dock.
Tangentbord	I 123-läget är <b>ü</b> utbytt till <b>é</b> på svenskt tangentbord
Telefon	Ny inställning "Ej Avbryt när samtal pågår". Kan bara väljas ihop med telefonknappar. När denna inställning är vald visas inte Avbryt-knappen i vyn "Samtal pågår". Detta för att man inte ska råka lägga på genom att trycka kinden mot Avbryt-knappen.
GPS+SMS Trygghetsstöd	Bugfix. Nu blinkar inte apparaten när GPS per timme-sökning startar. Inte heller tänds apparaten när den är ansluten till PC.
Inställningar Användare	Välja användarbild.
Bildsamtal	Bugfix. Knappkombinationen i Inställningar Bildsamtal Definiera bildkarta leder nu inte till Inställningar.
Kalender	Bugfix. Nu larmar en timer även om man lägger in en ny aktivitet i timerns sista minut.
Anteckningar	Bugfix. Nu kan man göra följande utan att anteckningen försvinner: Skriva ny anteckning, öppna anteckningen, gå till tangentbordet och backa. Bugfix. Nu kan man skriva in två anteckningar med samma namn direkt efter varandra.
Dansk version	25-öring borttagen i Prisräknaren. Nu får texten i Indstillinger System Kodeord/Tastaturlås plats.
<b>Version 3.10.5</b> (2369)	<i>Utfört 2008-11-21</i>

GPS+SMS Trygghetsstöd	Bugfix. Nu fungerar förfrågan om GPS-position (GGPPSS). Ett meddelande visas om om man trycker på powerknappen medan GPS-sökning pågår: <i>Sökning av GPS-position pågår. Handi kan inte stängas av innan den är klar.</i> Bugfix. Nu aktiveras/deaktiveras GPS per timme-sökning direkt när inställningen ändrats.
Bildsamtal	Bugfix. Kraschar inte när någon ikon är tom.
<b>Version 3.10.4</b> (2351)	<i>Utfört 2008-11-18</i>
GPS+SMS Trygghetsstöd	Bugfix. Nu ges felmeddelande vid hämtning av efemerisdata om GPRS-anslutning saknas.
Ljudvolym	Mp3 nivå 1 sänkt ytterligare (till 1 på skalan 100). Klickljudet sänkt pss som wav.
Bildsamtal	Bugfix. Kraschar inte när första ikonen är tom.
Backup	Bugfix. Nu kan smileys och bilder i sms konverteras till xml (gammal typ av sms-databas).
<b>Version 3.10.3</b> (2340)	<i>Utfört 2008-11-14</i>
Telefon/SMS	Bugfix. Inget avhuggen/utebliven ring- eller smssignal när larmvyn ligger i bakgrunden. Gäller även vibration.
Musik	Bugfix. "Spela alla" fungerar.
Ljudvolym	Sänkta lägstanivåer. <i>OBS! Nivå 1 är mycket lägre än tidigare.</i>
Bildsamtal	När Handi startar kontrolleras att Bildsamtals bilder ligger i mappen Communication. Om inte kopieras de från mappen PictureIcon. Detta för att göra uppgradering från 3.8 till 3.10 säkrare.
GPS+SMS Trygghetsstöd	Nu fungerar avstängningskontrollen när sökning av GPS-position pågår. <i>OBS! Nya systemprogram behövs!</i> GPS-position sparas när man testar GPS-anslutningen. Om positionsförfrågan (GGPPSS) redan pågår i Handi när man skickar en förfrågan kommer svar om att det är upptaget.
Kalendern	Nu visas fyrkanterna för redan inlagda aktiviteter när man väljer datum för ny aktivitet. Bugfix (engelsk version). Nu visas hela månadsnamnet endast om månadsbilder är valda att inte visas.
Miniräknaren	Inget felmeddelande "För många räknetecken" när man trycker flera gånger på =-knappen.
Anteckningar	Bugfix. Nu går det inte att spara en anteckning som är tom. Därmed löstes även problemet med de som trycker för snabbt och då bara sparar anteckning med A.
<b>Version 3.10.2</b> (2312)	<i>Utfört 2008-10-30</i>
Klocka	Bugfix. Nu läses AM/PM upp av talsyntesen.
<b>Version 3.10.1</b> (2307)	<i>Utfört 2008-10-30</i>
Kalender	I engelsk version visas inte veckonummer utan hela

Larm

månadens namn. "Almanac" ändrat till "Month View".  
Nu kan ett larm komma upp till 20 sekunder efter utsatt  
tid. (Tidigare var gränsen 10 sekunder.) Detta fixades i  
v3.6.6 men har av okänd anledning inte följt med till  
senare versioner.