

Handi version 4 Revisionshistorik

Version 4.8.1	<i>Utfört 2012-04-02</i>
Telefon	Bugfix. Volymen stängs nu inte av när man har fått inkommande samtal med wav-ringsignal. (#2374)
MMS	Bugfix. Nu kan man skicka mms till en definierad kontakt. (#2378)
Version 4.8.0	<i>Utfört 2012-03-02</i>
Generellt	<p>Avsevärda minnesförbättringsåtgärder utförda, vilka kommer att leda till mer stabilitet i Handi4.</p> <p>Loggningen har förbättrats, bl a har onödiga loggningar tagits bort, batteri- och minnesnivå loggas, byte av tema loggas och det görs fler rollbacks. Notifieringar från HandiTools loggas.</p> <p>En hel del språkliga ändringar i dansk och holländsk version.</p> <p>Nu görs backup av images.xml (bildarkivet). (#2363)</p>
MMS	<p>Bildhanteringen i MMS avsevärt förbättrad.</p> <p>Fel vid sändning/mottagning av SMS från utlandet åtgärdat.</p> <p>Problem med MMS mellan vissa operatörer åtgärdade, främst Telenor och Tre.</p> <p>Borttagningsknapp i MMS inlagt. (#2263)</p> <p>Inställningen "Nytt nummer" i Inställningar Telefon/SMS/MMS Kontaktlista gäller även i MMS. (#2341)</p> <p>Bugfix. Nu uppdateras listan när man har lagt in telefonnummer som kontakt. (#2278)</p> <p>Bugfix. Nu är sökvägen till bilder skiftokänslig. (#2344)</p>
SMS	<p>Grupp-SMS infört.</p> <p>Optimering utförd i SMS vilket kommer göra funktionen snabbare och stabilare.</p> <p>Vid mottagning av flertalet SMS under pågående samtal kunde vissa SMS falla bort. Detta sker inte längre.</p> <p>Detektering av telefonnummer i SMS infört. Tryck direkt på länken för att kontakta.</p> <p>Inställningen "Nytt nummer" i Inställningar Telefon/SMS/MMS Kontaktlista gäller även i SMS. (#2341)</p> <p>Bugfix. Inställningen för smiley-knapp i tangentbordet styr inte längre talstödsknappen.</p> <p>Bugfix. Nu försvinner inte OK-knappen ibland när man ska skriva in nytt nummer. (#2275)</p>
Krisplan	Nu finns det GPS-stöd i Krisplan: Kris-meddelande med kartlänk, Fråga Handi om dess position.
Telefon	Det går inte att svara på inkommande samtal genom att trycka på Hemknappen. (#2291)

	Bugfix. När man ringer ett samtal pausas nu pågående musik.
Inställningar	<p>I Ljudvolym kan nu klickljudet och talstöd stängas av helt. (#2330)</p> <p>GPRS kan nu testas i Inställningar Telefon/SMS/MMS Testa kommunikation.</p> <p>Bugfix. Sidbrytningen i Bildarkiv är nu korrekt för alla ikonstorlekar. (#2306)</p> <p>Bugfix. Tangentbordet i Uttalskorrigering fungerar nu för alla språk.</p>
Spelaren	<p>Bugfix. Musiken fortsätter inte spela under pågående samtal om det har kommit ett larm under den tiden. (#1892)</p> <p>Bugfix. Nu fortsätter spellistan att spela nästa låt när man har stängt av skärmen med powerknappen. (#2268)</p> <p>Bugfix. Problem med uppspelningssvyn och ring- eller sms-signal har åtgärdats. (#2236)</p> <p>Bugfix. Problem med headset och ändrad volym efter inkommande samtal/sms har nu åtgärdats. (#2301)</p> <p>Bugfix. Problem med uppspelning och talstöd har åtgärdats. (#2262)</p> <p>Bugfix. Nu sparas bokmärket 5 sek före stoppet, som tidigare. (#2279)</p> <p>Bugfix. En krasch i uppspelningssvyn när man lyssnar på en viss ljudbok är åtgärdad. (#2314)</p> <p>Spelaren stoppas nu vid alla ändringar via HandiTools.</p>
Kalender	<p>Spelaren finns nu i Info-menyn.</p> <p>Borttagna kopplade Info-objekt hanteras nu på ett bättre sätt.</p> <p>Heldagsaktiviteter visas i den ordning de läggs in.</p> <p>När man lägger in aktiviteter stegvis visas Kamera-knappen i ”Välj bild”, dvs det är möjligt att fota. (#2319)</p> <p>Bugfix. Annandag påsk är nu en högtidsdag, inte helgdag.</p> <p>Bugfix. Konflikter mellan larm och påminnelser är åtgärdade. (#2248)</p> <p>Bugfix. Nu försvinner inte bockar i kopplad checklista när aktivitetsvyn är framme och skärmen släcks. (#2292)</p> <p>Bugfix. Talstöd fungerar i kopplad checklista när man trycker på en uppgift.</p> <p>Bugfix. Kvartret visas korrekt i Aktivitetsvyn när aktiviteten ska börja om <1 minut. (#2311)</p> <p>Bugfix. Återkommande aktivitet den 31:e varje månad fungerar nu. (#2313)</p> <p>Bugfix. Nu kraschar inte klockvyn på helgdagar när man trycker på helgdagen i caption. (#2337)</p> <p>Bugfix. I dansk version är fel vid talstöd för vissa tider åtgärdat. (#2349)</p>

	Bugfix. Korrekt talstöd vid uppläsning av helgdagar. (#2302)
Kontakter	Hanteringen av grupper har förbättrats avsevärt. Bugfix. Kontakta-knappen på Handi Socket är nu borttagen. ”Skriv MMS” är tillagt i Kontakta-vyn. I ”Ange telefonnummer” visas plustecknet när textmarkören står längst till vänster. (#2241)
Checklista	Bugfix. Nu blir det korrekt talstöd. (#2276)
Kamera	Bugfix. Nu går det att fota via Inställningar Bildarkiv Ny Foto. (#2270) Bugfix. Nu kraschar det inte när foto får namn med snedstreck ”/”.
Spel	Nytt menyval ”Nollställ topplista”. Bugfix. Nu fungerar Flip-flop även för enheter som har blivit återställda med användare som saknar spel. (#2277) Bugfix. Nu visas >10000 poäng korrekt. (#2293)
Album	I Foton fungerar det nu korrekt att byta namn på bilder och att ta bort dem. (#2300) Bugfix. Nu fungerar det att fota flera bilder på raken när man definierar album. (#2305)
Formulär	Bugfix. När man ändrar formulärikon via HandiTools ändras den nu i alla formulärvyer i Handi.
Version 4.6.6	<i>Utfört 2011-10-04</i>
Generellt	Nu är defaultinställningen för alla nivåer att volymknapp ska visas i Album, Röstanteckningar och Spelaren. När man kopplar in headset sätts nu ljudvolymen till max.
Inställningar	Buggfix. <i>Ljudvolym</i> på Handi utan telefonfunktion visar nu rätt inställningar. I <i>Lösenord/Knapplås</i> raderas nu gammalt lösenord om man väljer att inte använda lösenord. Om man bekräftar med fel lösenord fungerar det nu att skriva in nytt lösenord (buggfix).
Röstanteckningar	Buggfix. Nu uppdateras ljudvolymen när den ändras via Inställningar System Ljudvolym.
Album	Buggfix. Nu blir det inte konstigt talstöd ibland när man öppnar ett album. Nu läses inte bildnamnet upp när man trycker på bilden (infördes i v4.4.3 men var ingen bra funktion). I Foton visas nu kamerabilderna i sin originalstorlek, inte den mindre kopian från bildarkivet.
Version 4.6.4	<i>Utfört 2011-09-13</i>
Generellt	Ny version av den danska talsyntesen införd. Version 7.7 av talsyntesmotorn samt rösterna Mette och Rasmus.
MMS	Div buggfixar.

Kamera	Div buggfixar.
Inställningar	Menyn "Telefon och SMS" har bytt namn till "Telefon/SMS/MMS".
Telefon	Buggfix. Nu kan man välja mellan kontaktens två nummer när man ska ringa (buggen infördes till 4.6.0).
Prisräknaren	Nya danska pengar.
Version 4.6.0	<i>Utfört 2011-09-01</i>
Generellt	Ljudproblem på Handifon HD Mini i samband med headset har lösts.
	Ett allvarligt minnesfel kopplat till databasen är åtgärdat.
	Bilder sparas numera i högre upplösning på HVGA-upplösning.
	Bugg i det numeriska tangentbordet åtgärdat
	Vid backup kontrolleras att minneskortet är tillgängligt innan backupen utförs. Detta för att förhindra att ett "nytt minneskort" skapas som backupen sparas på.
MMS	Ny funktion, MMS!
Spel	Nytt spel till Handi, Flip-Flop.
Kalender	Spelaren är tillagd i Info-menyn
	Återställning av kvitterbarhet är nu möjlig
	Bastimer-tiden har förbättrats. Överflödigt tid är nu inte möjlig.
	Man kan nu välja ordningen i Info-menyn
	Prisräknaren finns nu att välja i Info-menyn
Uppdatera Handi	Ny funktion för att kolla senaste Handi-version inlagd
Användare	Problem vid borttagning av bild i Användare åtgärdad
Checklista	Nu kan man välja mellan 5 eller 6 rader i Checklista
	Vill du spara?-fråga införd i Checklista vid avbryt
	Ordningen på objekten i Checklista har förbättrats
	Uppläsning av Checklista fungerar nu precis som i Kalendern
Spelaren	Nu visas en laddningssymbol när Handi läser in all musik
	Bokmärke i Spelaren är förbättrad
Telefon	Telefonnummer visades inte i Vill du ringa?-vyn, åtgärdat
	Felaktig nummermatchning åtgärdad
	Saldo-nummer sparas nu som senast slagna nummer
	Navigeringspanel inför i Nytt nummer-vyn

Krisplan	Om SMS misslyckas vid aktivering av Krisplan görs nu tre försök
Formulär	Ett meddelandefel i formulär med VAS-skala är åtgärdat
Version 4.4.4	<i>Utfört 2011-05-20</i>
Generellt	Icke använda ljudfiler placeras nu på minneskortet för att spara plats på telefonminnet. Batteri-ikonen har blivit en Live-ikon och visar direkt på Startmenyn/Handimenyn batteristatus. Volyminställningar har fått ett nytt förbättrat utseende. En bugg gjorde att Smileys inte gick att sudda, nu åtgärdat. Flertalet språkrelaterade buggar är åtgärdade. Minnesgränsen på Handi HD Mini har sänkts i hopp om att eliminera minnesrelaterade kraschar. Stöd för Holländskt språk implementerat.
Kalender	Kvarturet visade felaktig tid då en aktivitet gick över ett dygn. Åtgärdat. Nu får man en bekräftelsefråga på sluttiden istället för starttiden på en aktivitet med start- och sluttid. Nya högtidsdagar "Alla hjärtans dag", "Mors dag" och "Fars dag" är införda för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Veckovyn har fått ett nytt utseende och ny funktionalitet. Nu kan man lägga in en aktivitet direkt från veckovyn. En aktivitet över två dagar försvinner inte bort från Kalendervyn när den passerat. Åtgärdat.
Spelaren	Spelaren har fått två inställningar. "Artistinformation i låtlista" och "Reglage för snabbspolning". Man kan nu spola en låt fram och tillbaka i Spelaren.
Inställningar	Lösenordsvyn har åtgärdats för Handi HD Mini.
Bildarkiv	Ett uppgraderingsval för Bildarkiv har implementerats. En uppgradering fördelar ut bildarkivet i undermappar vilket leder till ökad prestanda.
Kamera	Det gick att av misstag aktivera knapplås på Handi HD Mini vilket gjorde att skärmen blev obrukbar. Nu åtgärdat.
Version 4.4.3	<i>Utfört 2011-04-11</i>
Generellt	Textinmatningsfälten har blivit smartare. Det är lättare att stega runt markören och gemen/versal-växlingen

	fungerar korrekt.
	Sparandet av bilder i Bildarkiv har effektiviserats vilket tillåter fler bilder i Bildarkivet utan att Handi blir segt.
	I Bildarkiv finns det nu alltid en uppåtknapp. Det räcker dessutom med att trycka på den en gång för att stega uppåt.
Kalendern	Klocka finns nu alltid som val för Handimenyn/Startmenyn.
	Nu tillåts en minuts överlapp när man lägger in aktiviteter.
	Veckovyn har fått en bättre Caption.
	Kvitterasymbolen har blivit tydligare för modernt tema.
	Numera lägger man in en basaktivitet via Ändravyn.
	Nu kan man lägga in befintlig Checklista/Anteckning/Röstanteckning som Info till en aktivitet.
	Datumraden i Ändravyn har ändrats så att den består av två rader nu.
Kontakter	När man lägger till en ny kontakt kan man välja det senast slagna numret som telefonnummer.
	Grupp-ikoner uppdateras nu om man tar bort den från HandiTools.
Formulär	Man kan inte bläddra till förstasidan från sistasidan i ett Formulär nu.
	På HD Mini utnyttjas den högre skärmen bättre nu.
Installation	Nu är knapparna för Grundinställning lättare att träffa.
Anteckningar	Buggfix. Punkter i filnamn fungerade inte, åtgärdat.
Album	När man trycker på en text i Album får man den nu uppläst.
Telefon	När man har lagt på under uppringning har Handi kraschat, åtgärdat.
	Ibland när man ringer upp missade samtal så kraschar Handi, åtgärdat.
	Saldo fungerat inte alltid utan genererar en vit skärm, åtgärdat.
Version 4.4.2	<i>Utfört 2011-03-02</i>
Generellt	Flertalet engelskspråkiga buggfixar gjorda, t ex am/pm-bekymmer.
	Ett minneskortproblem i 2190 som har med uppväckning att göra är åtgärdat.
Kalender	Funktionaliteten ”Ta bort efteråt” fungerar inte,

	åtgärdat.
	Man kan inte sätta tiden för en påminnelse på en återkommande aktivitet tidigare än ”nu”. Åtgärdat.
	Bugg vid ändring till/från Heldag, ett felaktigt meddelande visas. Åtgärdat.
	Årsvisa aktiviteter fungerar inte bra. Åtgärdat.
	Texten i Kalenderns caption blev jätteliten ibland, åtgärdat.
	A i stödkalender försvunnen, åtgärdat.
	Veckovyn har nu smart scrollfunktion.
SMS	När man har redigerat ett SMS i Utkast och trycker Avbryt så får man nu en fråga om ändringarna skall sparas.
	Vid nytt SMS till kontakt utan bild så visades en gul ruta i modernt tema, åtgärdat nu.
Kontakter	Om en bild på en kontakt har tagits bort på fel sätt blir Handi väldigt seg. Åtgärdat.
	När man skapar en ny grupp i Kontakter är inte gruppen markerad direkt efteråt, åtgärdat.
	Man kan inte göra en genväg till ”Sök kontakt” på Startmenyn. Åtgärdat.
Bildsamtal	Om man har lagt in/tagit bort bilder manuellt för Bildsamtal kan bilder tas bort olyckligt. Åtgärdat.
Formulär	Man kan nu inte stega från sista till först sidan direkt, inte heller åt andra hållet.
	Höjden i Handifon HD Mini utnyttjas nu bättre i frågevyn i Formulär.
Installation	Installationsprocessen har förfinats för Handifon HD Mini.
Telefon	I ett visst läge när man pratar i telefon och får ett nytt inkommande samtal så kraschar Handi, åtgärdat.
Bildarkiv	Tomma kategorier får inte ett frågetecken som bild längre.
Kamera	Hemknappen i Kamera fungerar nu som en Bakåtknapp i alla lägen.
Version 4.4.1	<i>Utfört 2011-02-11</i>
Generellt	Flera ställen där bilder från cachen lästs in får Handi att krascha. Dessa är åtgärdade.
	Några språkbuggar är fixade t ex AM/PM-visning och engelskt tangentbord.
Kalender	Några visuella buggar i Kalenderns caption är åtgärdade.
	Uttal av klockan har förbättrats. Nu läses t ex inte 12:30 upp som ”Halv en”.
Kontakter	Nu är det två rader i Infomenyns Kontakter
	Om man stegar på ett visst sätt kunde man inte lägga till ny kontakt. Åtgärdat.

Version 4.4.0	<i>Utfört 2011-02-09</i>
Generellt	Enbart buggfixar i denna release.
	Bilder från cachen som lästs in i variabler får Handi at krascha på flertalet ställen. Mestadels i Handimenyn där det även leder till att man hoppar ut i Windows. Detta är nu åtgärdat.
	Man kan inte längre trycka på OK när minneskortet är utdraget.
Installation	Bilderna delas nu upp i tre cabbar då de blivit för många.
	Radioknapparna i Installationen var svåra på HD Mini, dom har ändrats.
Checklista	Flertalet vyer har förbättrats för HD Mini.
Röstanteckningar	När man sparar en röstanteckning med enbart ett tecken så "försvinner" den. Åtgärdat.
Kalender	Klickade man på en helgdagsbild så hände inget, nu kommer man till rätt vy.
Tangentbordsvyn	Några buggar i navigeringspanelen som gjorde att Handi kraschade är korrigerade.
Kamera	Texten på standardnamnet är förminskat.
Bildarkiv	Bildarkiv har optimerats för att ladda bilderna snabbare.
Språkstöd	Flertalet justeringar för at hantera danska, norska och engelska har gjorts. Bl a har danska veckofärger införts, danska datum skrivs ut på rätt sätt och engelska helgdagsbilder införts.
Version 4.3.1	<i>Utfört 2011-01-27</i>
Generellt	Flertalet visuella justeringar och anpassningar för Handifon HD Mini. Gester för att scrolla i textfält på Handifon HD Mini införts. Den visuella scrollbar som syns vid sidan av textfält korrigeras visuellt för Handifon HD mini.
Kalender	En bugg i Semesterhantering gör att borttagning av aktiviteter kan låsa sig. Åtgärdat.
Kontakter	Kontakterna i Ordna kontakter visas nu på två rader vid behov.
SMS	Skärmen tänds inte upp när man får ett nytt SMS på Handifon HD Mini. Åtgärdat.
Kamera	Diverse buggar i kameran till Handifon HD Mini korrigeras, t ex kan man inte ta bilder i landscape mode. Storleken på bilder tagna med kameran minskas för att åtgärda minnesproblem.
Användare	Om user.ini inte existerar så sparas inte användarnamnet. Åtgärdat.
Uttalskorrigering	Handi 4 får stöd för uttalskorrigering.
Telefon	Saldoikonen i modernt tema byts ut för att passa bättre internationellt.

Prisräknaren	Man kan inte ta bort "betalda" pengar genom att klicka på dem, åtgärdat.
Version 4.3.0	<i>Utfört 2011-01-21</i>
Generellt	Handi 4 får stöd för HVGA-upplösning. Flertalet vyer och kontroller anpassas efter den nytillkomna upplösningen. Handifon HD Mini får stöd för "proximity sensor". Handifon HD Mini får en navigeringspanel för stegning bland texter. Två klickningar i Textfältet leder till den nya panelen.
TextSpeaker	Norska rösten Olav läggs till i installationen.
Version 4.2.5	<i>Utfört 2011-01-17</i>
HandiTools	Gemensamt bibliotek för taggar m.m används nu i HandiTools.
Bildarkiv	Skadade bilder gör att Handi kraschar. Åtgärdat så att bilden bara skippas.
Version 4.2.4	<i>Utfört 2011-01-13</i>
Kalendern	När man lägger in aktivitet stegvis och "tillåt aktivitet som har passerat" inte är ikryssat går det inte att lägga in återkommande aktivitet med start dagens datum på en tid som har passerat. Åtgärdat.
Telefon	Handi kraschar om man har högtalarfunktionen aktiverat samtidigt som det är upptaget. Åtgärdat. Saldoikonen visades inte längre. Åtgärdat.
SMS	Ett felaktigt meddelande visades när man testade kommunikation och avbröt processen. Åtgärdat.
Bild-SMS	I vissa extrema fall så kraschade Handi i Bild-SMS, felet åtgärdat.
Version 4.2.3	<i>Utfört 2010-12-20</i>
Spelaren	När man spelar musik och får ett samtal kunde Handi krascha eller fortsätta spela musik. Det händer inte längre.
Generellt	Minnesloggning införd, spärr införd för att undvika MemoryOutOfRangeException.
Röstanteckningar	Bugg i Röstanteckningar som gjorde att Handi kraschade fixad.
Återställning	Nu kan man inte göra en backup från en Återställning utan att man faktiskt gjort en backup först.
Kalender	Standardvärdet för återkommande slutdatum sätts rätt nu. Nu är databasens LCID (språkstöd) korrekt satt.
Batteri	Batterivyn laddas inte två ggr längre.
Bildarkiv	Bilder som är mindre än 45x45 har numera vit

	<p>bakgrund. Bildens namn visas när man trycker på ändrknappen. När man byter namn på bild i Kamerabilder så byts namnet både i bildarkivet och i Camera-mappen. Helgdagsbilder är nu inbakat i projektet.</p>
Installation/Uppgradering	<p>Rösten Mette inlagd för dansk installation. Landsberoende data finns nu i egen cab. Kamera- och Telefoninställningar skippas på Socket.</p>
Version 4.2.2	<i>Utfört 2010-11-23</i>
Installation	<p>Flera buggfixar i installation av befintlig användare: ”Talstöd i menyer” blir korrekt installerad. Saldonummer blir korrekt installerad. Settings.ini läses inte in och förstör därmed inte övriga inställningar. #1682</p>
Generellt	<p>Bugfix. Nu kraschar det inte när man trycker på Hemknappen vid tomma listor (buggrapport ang Spelaren och Tidbok). #1657, #1673. Loggning för felsökning i SymbolEditBox tillagd. #1683.</p>
Återställning	<p>Bugfix. Nu rensas registret för Handimenyn, Infomenyn och Stödmenyn före återställning. Gäller både återställning till användarnivå och återställning från backup. #1677, #1687.</p>
Inställningar	<p>Bugfix. Nu kraschar det inte när man bläddrar i Inställningar Stödmenyn. #1670.</p>
Kalender	<p>Bugfix. Nu fungerar ”Ta bort efteråt”. #1678.</p>
Checklista	<p>Bugfix. Nu kraschar det inte när man tar bort bild för en uppgift. #1672.</p>
Telefon	<p>Loggning för felsökning av ringvolym tillagd. #1683.</p>
Röstanteckningar	<p>Bugfix. Nu stängs Windows Media Player ordentligt efter uppspelning(?). Dock kvarstår en del att fixa. #1674.</p>
Version 4.2.1 (xxxx)	<i>Utfört 2010-11-05</i>
Generellt	<p>Bl.a. Bildsamtal fattas i Handimenyn pga. att funktionen heter olika i Handi3/Handi4. #1612 Dansk och Norsk översättning tillagd. #1458</p>
Installation	<p>Vid uppgradering döps Musics mappen om till Music. Strängarna i H324 splashscreen tillagda i resurserna. #1641</p>
Bildsamtal	<p>Avlånga bilder ser nu bättre ut. #1654</p>
Anteckningar	<p>Buggfix. En tom anteckning orsakade tidigare krasch. #1658</p>
Kalender	<p>Helgdagar för Danska/Norska uppdaterade. #1660</p>
Spelaren	<p>Buggfix. Klickade man på hemknappen i en tom lista kraschade det. #1661</p>
Inställningar	<p>Buggfix. I Datum/Tid inställningen visades fel</p>

veckonummer på vissa veckodagar. #1662
--