

# Lägg in ny ring/larmsignal i Handifon (Windows Vista)

Anslut din Handifon till en PC.


Öppna "Den här Datorn" från skrivbordet.




Följande vy kommer visas. Om din Handifon har fått kontakt ser du det här. Symbolen kan variera beroende på vilken modell du har.

Om du inte ser någon symbol alls under Externa enheter, ta ut och sätt i sladden i Handifon igen.

Dubbelklicka på symbolen.

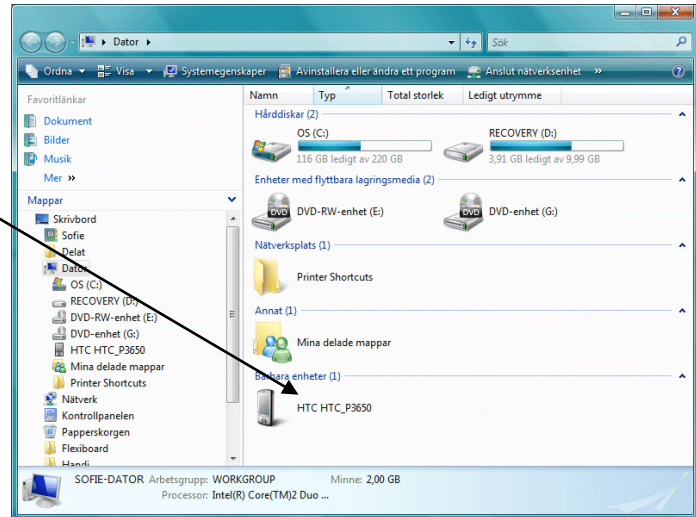


Följande vy visas. Välj det vänstra alternativet: \

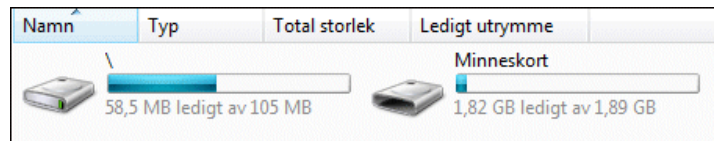

Väl inne går du till:  
*Handi/System/Phonebook*

Här inne finns alla ringsingaler.

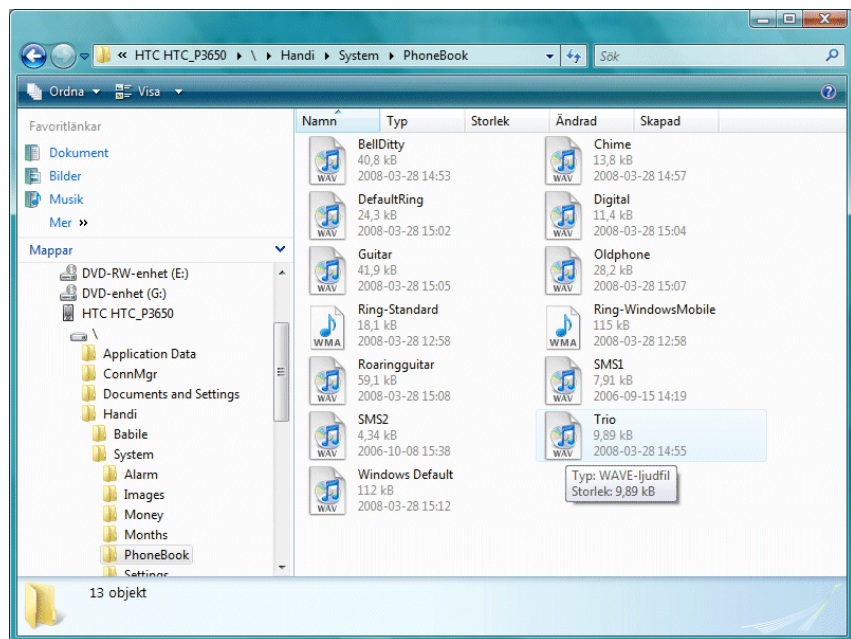


Om du precis ha kopierat din ringsignal är det bara att höger klicka och välja "Klistra in"

Om du inte har gjort det så leta upp din gjorda ringsignal, markera den och högerklicka. Välj Kopiera.


Gå tillbaka till Den här datorn och Klistra in som ovan.

När du är klar kan du koppla ur Handifon från PC:n.

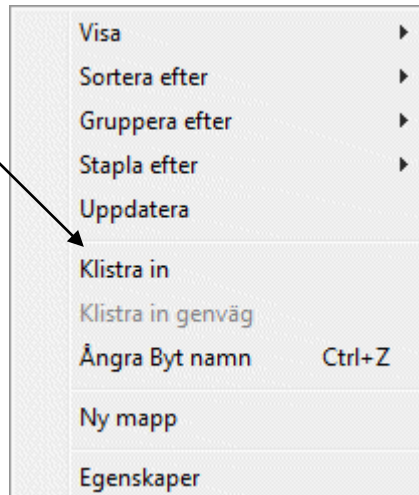


## Välja ringsignal i Handifon

Starta din Handifon. Gå till inställningsläget genom att trycka knappkombinationen (se handbok).

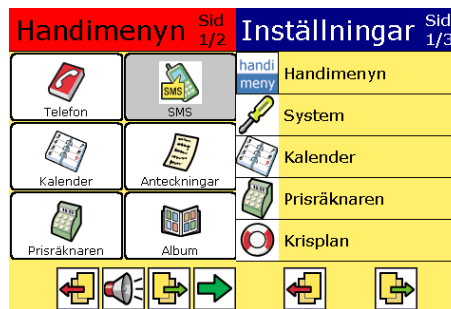


Gå till sida två och välj:  
*Telefon och SMS/Ljud och Signaler*

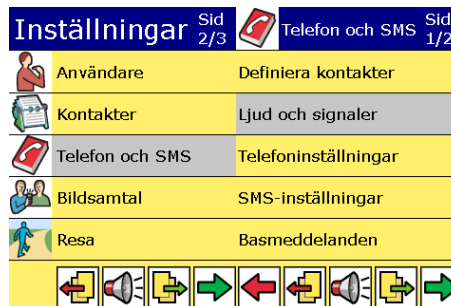

Klicka på rullisten för att få fram alternativen. Tryck på pilarna upp/ner tills du ser din nygjorda signal. Klicka på den för att välja den.

Klicka sedan på OK.

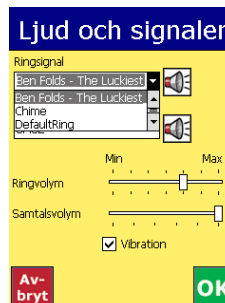

**Nu har du din egna ringsignal.**

Gör sedan motsvarande till Handi\System\Alarm för att lägga in en ny larmsignal. Gå sedan till *Inställningar/Kalender/Larm* och välj larmsignal för de olika larmen.