

## Revisionshistorik Flexiladdaren 5

### Version 5.0.12

Importera överlägg

09-11-20

Bugfix. Nu importeras även bilder, ljud och video i Flexi-kommandon.

### Version 5.0.11

Byta namn på överlägg

09-10-05

Bugfix. Nu ändras sökvägen till bilder i importerade överlägg om man byter namn på överlägget.

Flytta överlägg

Bugfix. Nu går det markera och flytta flera överlägg till ett annat set med drag and drop.

Visa bild

Bugfix. Nu kraschar inte programmet om en bild inte kan visas på ett okänt format.

Kommando till Flexi-program

Bugfix. I dansk version kan nu formatet WMV väljas (ändring i installationen).

Spara överlägg

Bugfix. Nu tas ev mellanslag bort i början och slutet på angivet namn för att slippa problem med att det inte går att spara överlägget på ett visst nummer.

### Version 5.0.10

Laddning av set till PS/2 flexiboard

09-08-10

Bugfix. Nu stängs dialogrutan när man trycker på OK efter laddning. (Det blev fel checksumma vid nedladdning av set till PS/2 flexiboard.)

### Version 5.0.9

Flytta/kopiera importerade överlägg

09-05-07

Nu kopieras filer som ligger i <set>\import till det set som överlägget flyttas/kopieras till.

Placera markör

Bugfix. Nu kan man placera markören på överlägget med <Insert>.

### Version 5.0.8

Definiera knapp

09-04-20

När man har lagt in en bakgrundsbild får nästa knapp automatiskt transparent bakgrundsfärg. (N5)

WMF

Bugfix. Nu kan wmf-bilder visas (igen).

### Version 5.0.7

Ikon

09-04-15

Ny Flexiladdar-ikon.

### Version 5.0.6

F1

09-03-19

Bugfix. Nu kommer inget felmeddelande om att hjälpfil saknas.

### Version 5.0.5

Kommando till Flexi-program

09-03-05

Dialogrutan "Spela in ljud" har nu Rec-, Play- och Stopp-knapp.

Licens

Nu kommer inget felmeddelande om PS2-licens och FB-serienummer inte har

Starta program	registrerats. I "Ladda Flexiboard" visas inte serienumret. Nu läses [FlexiStart] i språkfilen (swedish.ini) istället för flexiloader.ini.
<b>Version 5.0.4</b>	09-02-12
Talsyntes	Bundling av Acapela TTS införd. (Talsyntesen installeras dock med FlexiKom.)
Spara överlägg	Bugfix. Nu uppdateras FlexiUSB om ett aktivt överlägg sparas.
<b>Version 5.0.3</b>	09-01-30
WMF	Bugfix. Nu kan wmf-bilder visas.
Muskommando	Nu sätts repetition på om riktningsskommando väljs.
Flytta överlägg	Bugfix. Nu kraschar det inte när man dialogrutan "Flytta överlägg" ska visas.
Starta program	Nu kan en webbadress, dokument, låt etc anges som program, och FlexiUSB startar det program som filtypen är associerad till.
Uppdatera FlexiUSB	Bugfix. Översyn av uppdateringen efter att filer flyttats, kopierats, raderats etc.
<b>Version 5.0.2</b>	09-01-26
Spara överlägg	Annat anrop för att hitta FlexiUSB när det ska uppdateras pga ändringar i set/överlägg.

## Revisionshistorik FlexiUSB

<b>Version 2.34</b>	2009-06-22 Vid muspositionering togglas x-värdet med en pixel för varannan gång. Musklicket tog inte i vissa flashspel annars.
<b>Version -</b>	2009-06-22 Gjort en mindre rensning i projekt o kod inför uppläggning mot SVN
<b>Version 2.33</b>	2009-02-12 I ”Kommando för att starta program” översattes strängen till gemener. Nu är den oförändrad.
<b>Version 2.32</b>	2009-01-30 I ”Kommando för att starta program” behöver man nu inte ange en .exe-fil. Det räcker med att ange argumentet.
<b>Version 2.31</b>	2009-01-29 Kosmetiska fix i dialogrutan
<b>Version 2.30</b>	2008-12-23 Vid musrörelse tas nu parametrar för acceleration och maxhastighet från överläggsfilen.
<b>Version 2.29</b>	2008-01-07 Lagt till generella kommandon för muspositionering
<b>Version 2.28</b>	2007-12-11 Mera fix angående repetition etc...
<b>Version 2.27</b> Repetition då en tangent skickas via Win API.	2007-12-10 Då snabbaste repetition är vald och en tangent skickas ska datorn (windows) ta över repetitionen. Detta gjordes inte när tangentryckning skickades via API.
<b>Version 2.26</b> Testversion	2007-12-xx Div funktioner för musklick inlagda (för test)
<b>Version 2.25</b> Repetition för spelöverlägg	2007-11-26 Följdfel från 2.24, PC:n tog ej över repetitionen (se 2.23)

<b>Version 2.24</b> Studsskydd <Alt+f>f  Starta program plus muskommando	2007-11-20 Bugfix. Fungerade ej. Bugfix. <Alt+f>f fungerade ej eftersom två lika tecken i rad sändes som ett. Bugfix. Fungerade ej.
<b>Version 2.23</b> Repetition för spelöverlägg (DirectX), då en tangent skickas.	2007-10-22 Då snabbaste repetition är vald och en tangent skickas ska datorn (windows) ta över repetitionen. Detta gjordes inte när man använde "Speltangenter" (via USB)
<b>Version 2.22</b> Kommandon med <Ctrl> och <Alt>	2007-08-24 Kombinationer med <Ctrl> och <Alt> sänds nu alltid via USB. (= "speltangent")
<b>Version 2.20</b> Automatisk nedladdning av firmware till Flexiboard.	2007-06-xx Ny funktionalitet.
<b>Version 2.10</b> Musstyrning Klickpunkter Speltangenter	2006-10-03 Ny funktionalitet. Ny funktionalitet. Ny funktionalitet.
<b>Version 1.14</b> Översyn av anslagsfördröjning, studsskydd, repetition, start av program och identifiering av Flexiboard vid omstart. Grafisk visning av överläggets kod. Ny funktion för att kalibrera Flexiboards detektorenhet.	2005-11-28 <b>Så står det beskrivet på FlexiForum.</b>
<b>Version 1.08</b> Caps lock som infördes i version 1.07 fungerar inte under Win98.	2003-12-04 Bugfix. I WinXP/Win2000 inaktiverar CapsLock så fort ett överlägg sätts i.
<b>Version 1.07</b> Om Caps Lock är aktiv så blir små tecken stora och tvärtom versa.	2003-11-13 Bugfix. Om Caps Lock är aktiv då man trycker på Flexiboarden så inaktiveras Caps Lock .
<b>Version 1.05</b> Starta program.	2003-05-06 Bugfix. Nu sätts startbiblioteket till samma som exe programmet.
<b>Version 1.04</b> Tomsträng i knappens kommando. Läser ej standard överlägg från andra språk än svenska.	2003-03-17 Bugfix. Bugfix

**Version 1.03**

Överlägg nummer.  
Problem med Paus.

2003-03-04

Nu visas även överläggsnummret.  
Bugfix. Sekvensen <Backspace><Paus3.0>  
fungerar inte.

**Version 1.02**

& tecken försvinner i Set och överläggsnamn.  
Ljud och ljus signaler till Flexiboard.

2003-02-19

Bugfix  
Inget ljud eller ljus signaler till Flexiboard då  
inget överlägg är pålagt.

Anslagsfördröjning

Bugfix. Då anslagsfördröjningen var satt  
kraschade FlexiUSB, om inte Log=Yes var  
satt i inifilen.

Laddar inte överlägget.

Bugfix. Om det ligger ett överlägg på  
flexiboard som inte finns, skapar man då ett  
nytt överlägg i flexiladdaren med lika  
nummer så laddas inte flexiboard.

**Version 1.01**

Oregelbundna knappar.

2003-01-21

Bugfix. Överlägg med knappar med  
oregelbunden form alltså inte som inte gjorda  
som rektanglar fungerar bara delvis

Tappar tecken efter ~.

Bugfix.

Win+R fungerar inte.

Bugfix.

Anslagsfördröjningen fungerar bara första  
gången, nästa gång man trycker på en knapp  
händer ingenting.

Bugfix.



## Revisionshistorik FlexiView version 3

### **Version 3.0.5**

Splashvy

*09-10-27*

Bugfix. Nu visas splashvyn utan texten "Serienr" om registreringen gjordes i version 2.

### **Version 3.0.4**

Visa bild

*09-10-05*

Bugfix. Nu kraschar inte programmet om en bild inte kan visas p g a okänt format.

### **Version 3.0.2**

WMF

*09-05-07*

Bugfix. Nu kan wmf-bilder visas.

### **Version 3.0.1**

Användare

*09-04-24*

Bugfix. Ny användare sparades fastän man avbryter.  
Bugfix. I dialogrutan "Genväg på skrivbordet" fick inte texten plats.  
I menyraden står det nu <Standard> istf <Ingen brukarfil>.



Handitek

## Revisionshistorik FlexiWord version 3

<b>Version 3.0.5</b> Splashvy	<i>09-10-27</i> Bugfix. Nu visas splashvyn utan texten ”Serienr” om registreringen gjordes i version 2.
<b>Version 3.0.4</b> Inställningar	<i>09-10-05</i> Nu kan man ändra inställningar utan att dokumentet behöver sparas först.
Inställningar Skärmbild	Nu står det ”bilder per rad” som beskrivning av ”Bildstorlek”.
Inställningar Infoga bild	Nu definieras favoritbilder som Flexi-kommandon, dvs man kan lägga in ljud och bildtext också.
Inställningar Spara	Bugfix. Nu står det ”Bläddra”, inte ”Bläddra bild” i knappen.
Visa bild	Bugfix. Nu kraschar inte programmet om en bild inte kan visas p g a okänt format.
Om FlexiWord	Bugfix. Nu står det ”Om FlexiWord”, inte ”Om FlexiView”.
<b>Version 3.0.3</b> Arkiv Bläddra bild Inställningar Spara	<i>09-05-19</i> Bugfix. Nu står det ”Visa bild” efter kryssrutan. Bugfix. Nu står det ”Bläddra” istf ”Bläddra bild” i knappen på Spara-fliken.
Dansk version	Div översättningsändringar.
<b>Version 3.0.2</b> Användare	<i>09-04-24</i> Bugfix. Ny användare sparades fastän man avbryter. Bugfix. Fel namn och ordning på vyerna i ”Ny användare”. I menyraden står det nu <Standard> istf <Ingen brukarfil>.
<b>Version 3.0.1</b> Läs ljud	<i>09-04-21</i> Bugfix. Nu kan flera ljud läsas upp efter varandra med MediaPlayer=2 (Windows Media Player 9). (B1)