
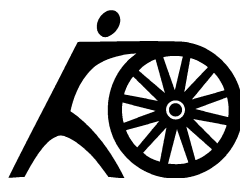


# Bruksanvisning Handi

## Anteckningar

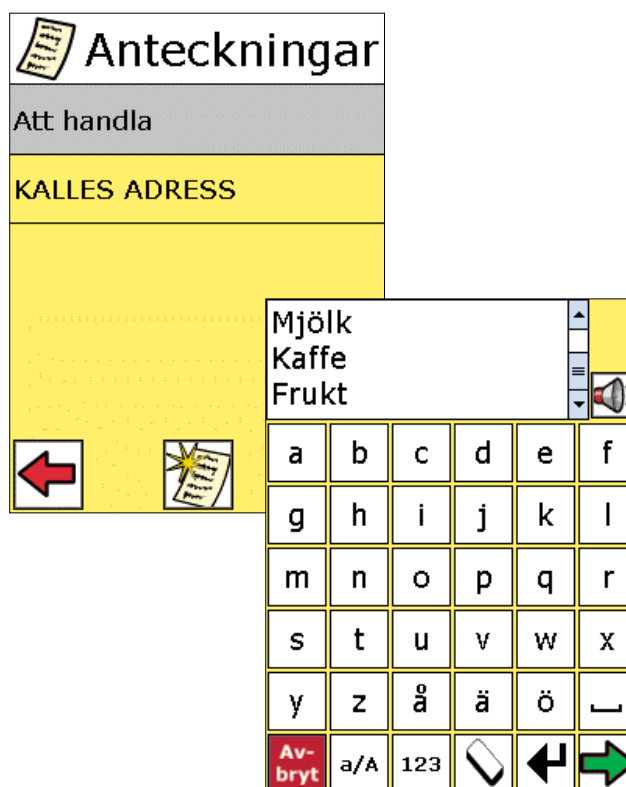

Handitek

Handitek  
Ågatan 1, 795 31 Rättvik  
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983  
[www.handitek.se](http://www.handitek.se)

## Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Anteckningar .....	3
2.1 Tangentbordet .....	3
2.2 Skriva ny anteckning.....	4
2.3 Läs en anteckning.....	4
2.4 Ändra en anteckning.....	5
2.5 Ta bort en anteckning.....	5
3 Inställningar .....	5
3.1 Talsyntes i tangentbordet .....	6
3.1.1 Uppläsning av ord vid mellanslag .....	6
3.1.2 Talstöd-knapp i (textfältet).....	6
3.2 Tangentbord .....	7

## 1 Inledning


Med Anteckningar kan man skriva in information med det inbyggda (på skärmen) alfabetiska tangentbordet. Det är enkelt att spara och öppna anteckningar.

Informationen kan läsas upp med talsyntes.

Med PC-programmet HandiTools kan man skriva, ändra och skriv ut anteckningarna i PCn.

## 2 Använda Anteckningar

När man väljer Anteckningar i Handimenyn visas följande vy:

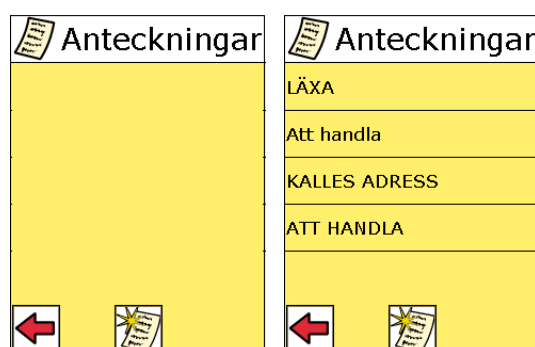


Första gången man kommer till Anteckningar är det tomt, dvs det finns inga anteckningar. Se den vänstra vyn.

När man har gjort anteckningar visas de i en lista, se den högra vyn.

### 2.1 Tangentbordet

Tangentbordet har tre vyer.

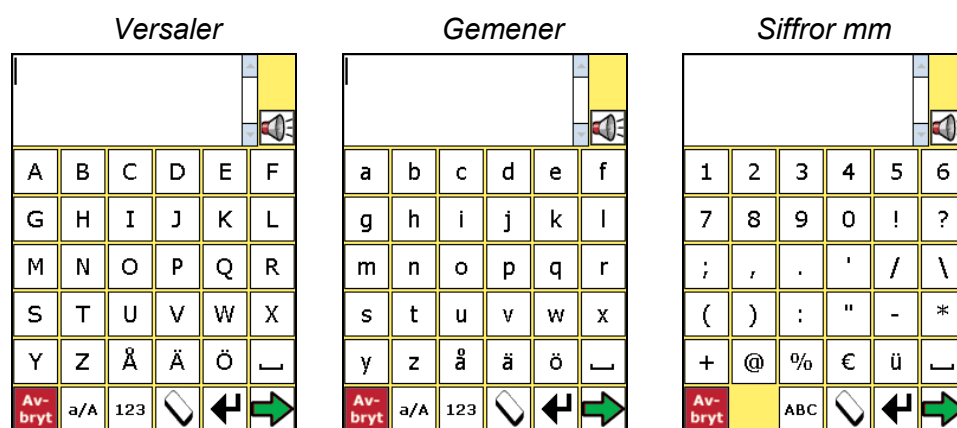


Första bokstaven i anteckningen och första bokstaven efter punkt och ny rad blir automatiskt versal.

ger ny rad och ger mellanslag. Man suddar genom att trycka på .

När man trycker på blir texten uppläst av talsyntesen.

Man växlar mellan *Versaler* och *Gemener* genom att trycka på knappen .

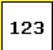Man väljer *Siffror* genom att trycka på knappen .

Man förflyttar sig i texten med markörtangenten (Se Apparätöversikt).

Man har hela tiden överblick över tre rader. Man kan bläddra mellan raderna med blädderlisten (scrollbar) eller med markörtangenten.

Man kan också flytta markören och markera text genom att peka direkt på skärmen.

## 2.2 Skriva ny anteckning



För att skriva ny anteckning ska man trycka på knappen "Ny".

Tangentbordet visas och man skriver in önskad anteckning. När man har skrivit färdigt och trycker på grön pil visas vyn "Vill du spara?":



Här visas anteckningen på ett mer överskådligt sätt.

Om man trycker man på *Talstöd*-knappen läses texten upp med talsyntes.


När man trycker på *OK* sparas anteckningen och läggs in i listan.



Den första raden i anteckningen blir automatiskt dess namn.

Den nya anteckningen hamnar alltid överst.


## 2.3 Läs en anteckning

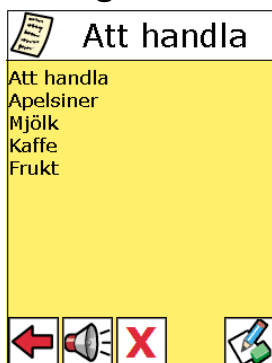

För att läsa en anteckning markerar man den i listan i Anteckningar och trycker på *grön högerpil* (den gröna högerpilen visas inte förrän en anteckning markerats).

När man trycker man på *Talstöd*-knappen läses texten upp med talsyntes.


## 2.4 Ändra en anteckning

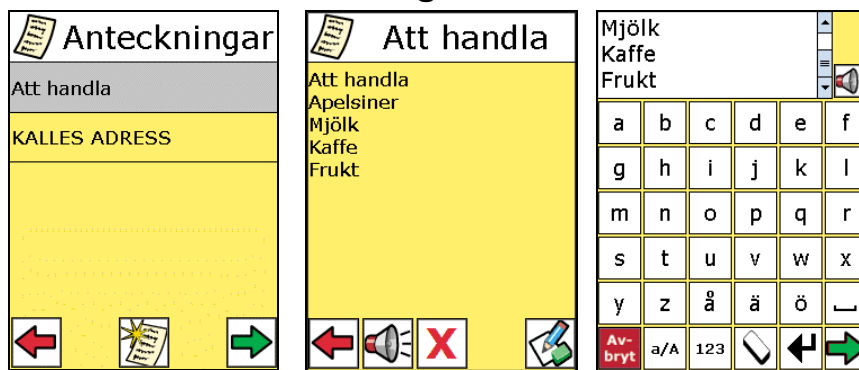

För att ändra en anteckning markerar man den i listan i Anteckningar, trycker på *grön högerpil* och sen på knappen . Då visas tangentbordet och man kan ändra i texten.

När man trycker på grön högerpil visas vyn "Vill du spara?". Man trycker då på OK för att spara anteckningen.

## 2.5 Ta bort en anteckning

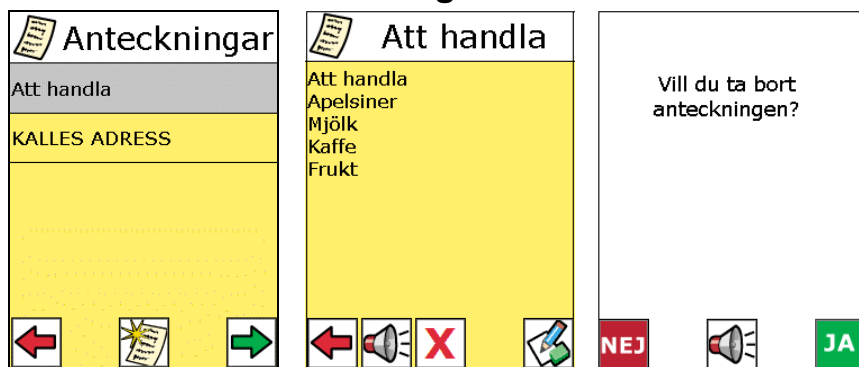

För att ta bort en anteckning markerar man den i listan i Anteckningar, trycker på *grön högerpil* och sen på knappen . Man får bekräfta att man vill ta bort anteckningen genom att trycka på Ja. Anteckningen tas bort från listan.

## 3 Inställningar

För att anpassa Anteckningar ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Apparatöversikt.




En inställningsmeny visas.

Inställningarna för Anteckningar görs i *System* på sida 1 i *Inställningar*.

För Anteckningar kan man göra följande inställningar:

### 3.1 Talsyntes i tangentbordet

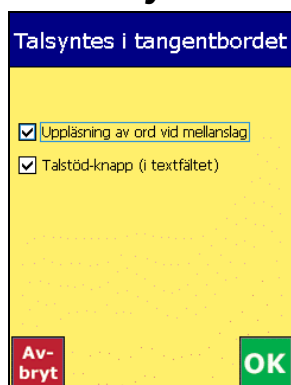

Via *Inställningar|System|Talsyntes|Talsyntes i tangentbordet* bestämmer man om och hur talsyntes ska användas i tangentbordet:

- Uppläsning av ord vid mellanslag
- Talstöd-knapp i (textfältet)

#### 3.1.1 Uppläsning av ord vid mellanslag


När "Uppläsning av ord vid mellanslag" är ikryssat läses orden upp medan man skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort man skriver mellanslag.

#### 3.1.2 Talstöd-knapp i (textfältet)


När "Talstöd-knapp i textfältet" är ikryssat visas talstödknappen bredvid textfältet. Se bilden till vänster.

När "Talstöd-knapp i textfältet" inte är ikryssat visas ingen talstödknapp. Se bilden till höger.


När man trycker på Talstödknappen läses hela anteckningen upp.

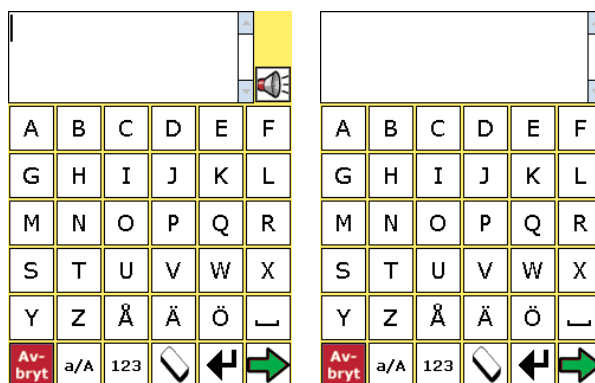

## 3.2 Tangentbord

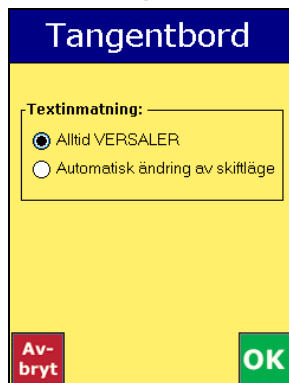

Via **Inställningar|System|Tangentbord** bestämmer man om bokstäverna i tangentbordet automatiskt ska ändras från versaler till gemener och vice versa.

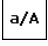När alternativet "Alltid VERSALER" är valt visas stora bokstäver i tangentbordet, så länge man inte trycker på knappen .

När alternativet "Automatisk ändring av skiftläge" är valt blir första bokstaven efter en punkt eller ny rad automatiskt versal. Andra bokstaven i ett ord blir sedan gemen.