
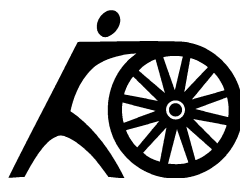


# Bruksanvisning Handi

## Användare

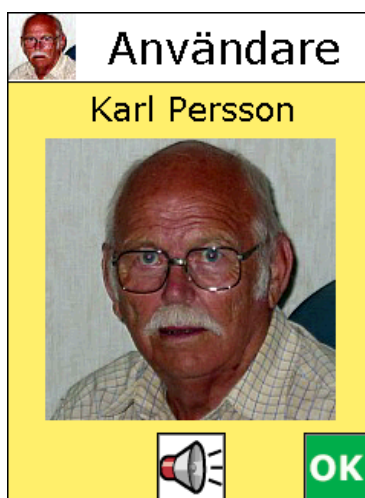

Handitek

Handitek  
Ågatan 1, 795 31 Rättvik  
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983  
[www.handitek.se](http://www.handitek.se)


## 1 Inledning

Funktionen Användare gör att användaren kan visa en vy med sitt namn och en bild på sig själv.

Bild på användaren läggs in via PC-programmet HandiTools. Namn kan anges antingen via Handi eller HandiTools.

## 2 Använda Användare

När man väljer Användare i Handimenyn visas följande vy.

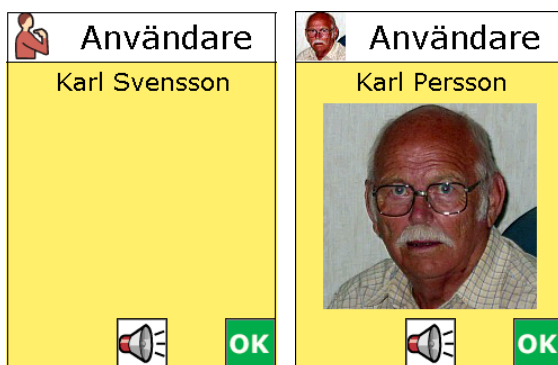

Om man trycker på *Talstöd*-knappen läses namnet upp med talsyntes.

Hur namnet skrivs in beskrivs i nästa kapitel.

## 3 Inställningar

För göra inställningar för Användare ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Apparatöversikt.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Användares inställningar väljer man *Användare* på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man namnge Handi.

När man trycker på Namn-knappen visas tangentbordet och man får skriva in ett namn.

