


Handi Användare

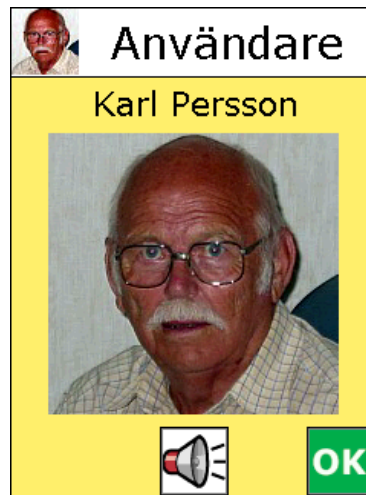

Programversion 3.10.6 eller senare


1 Inledning

Funktionen Användare gör att användaren kan visa en vy med sitt namn och en bild på sig själv.

Namn och bild på användaren läggs in via Handi eller PC-programmet HandiTools.

2 Använda Användare

När man väljer Användare i Handimenyn visas följande vy.

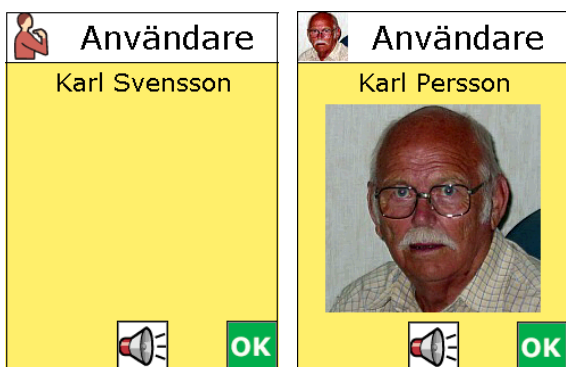

Om man trycker på *Talstöd*-knappen läses namnet upp med talsyntes.

Hur namnet skrivs in beskrivs i nästa kapitel.

3 Inställningar

För göra inställningar för Användare ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Apparatöversikt.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Användares inställningar väljer man *Användare* på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man ange namn samt välja användarbild.

När man trycker på Namn-knappen visas tangentbordet och man får skriva in ett namn. När man trycker på Bild-knappen visas vyn "Välj bild" och man får välja önskad bild.

