


Bruksanvisning Handi Kamera

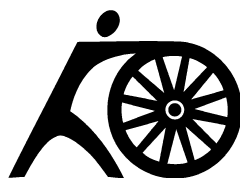

Handitek

Handitek
Ågatan 1, 795 31 Rättvik
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983
www.handitek.se


Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Fotografera från Handimenyn	3
3 Fotografera från Välj bild-vyn	4
4 Titta på bilderna.....	4
5 Inställningar	5
5.1 Ange hur fotot ska sparas.....	5
5.2 Namnge foto	5
5.3 Kamera-knapp i Välj bild-vyn	6
5.4 Hemknappen som avtryckare	6
6 Kamera i HandiTools.....	6
7 Tips på användning av Kameran.....	6

1 Inledning

Funktionen *Kamera* är en förenklad version av apparatens inbyggda kamera.

Kameran kan startas antingen från Handimenyn eller från Välj bild-vyn, dvs vyn där man väljer bilder för aktiviteter, timers och kontakter.

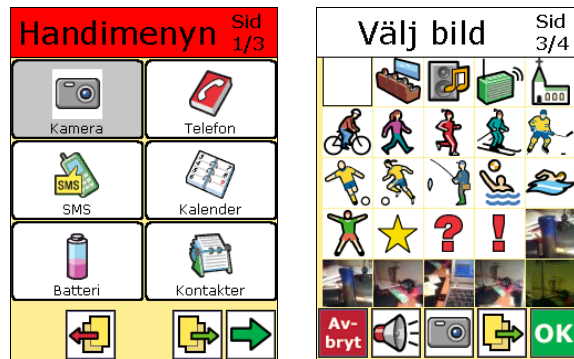


Med Kamera kan man ta två typer av bilder:

- Alumbilder. Sparas i originalstorlek visas i Album.
- Bildbasbilder. Sparas i två storlekar och visas i Välj bild-vyn.

2 Fotografera från Handimenyn

Om man vill ta "alumbilder" startar man lämpligen Kameran i Handimenyn. Då visas följande vyer:



I *Sökarvyn* visas en rörlig sökarbild, När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden.

I vyn *Vill du spara?* visas den bild man har tagit.


I vyn *Hur vill du spara?* anger man om bilden ska sparas i album eller i bildbas. Det är inställbart om denna vy ska visas.


I vyn *Namnge foto* ger man bilden ett namn. Ett namn har redan angivits automatiskt, och detta kan man antingen behålla eller skriva in ett eget. Det är inställbart om denna vy ska visas.

Hur man senare tittar på bilden beskrivs i avsnittet *4 Titta på bilderna* nedan.


3 Fotografera från Välj bild-vyn

Om man ska ta foton för att symbolisera en aktivitet eller för att lägga in en person i Kontakter väljer man lämpligen att ta fotot direkt i Välj bild-vyn.


Man trycker då på Kamera-knappen  längst ned i Välj bild-vyn. Följande vyer visas:

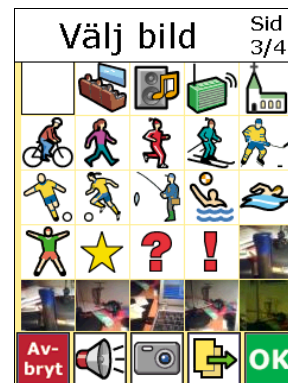


Sökarvyn

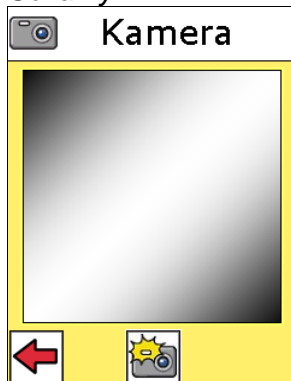


Vill du spara?

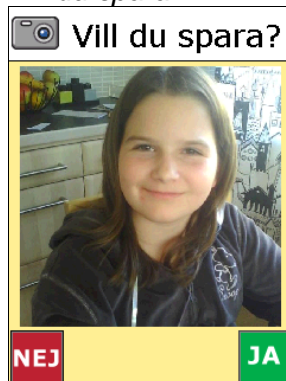

Namnge foto

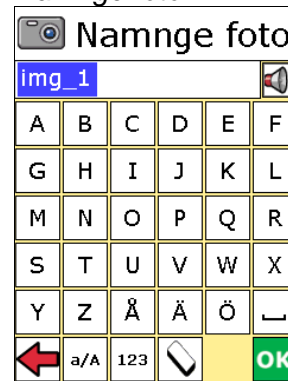

I Sökarvyn visas en rörlig sökbild, När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden.



I vyn Vill du spara? visas den bild man har tagit.

I vyn Namnge foto ger man bilden ett namn. Ett namn har redan angivits automatiskt, och detta kan man antingen behålla eller skriva in ett eget. Det är inställbart om denna vy ska visas.

Hur man senare tittar på bilden beskrivs i avsnittet 4 Titta på bilderna nedan.

4 Titta på bilderna

De bilder som har sparats visas i Handifunktionen Album. De ligger i albumet Kamera.

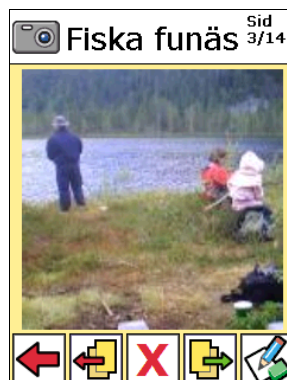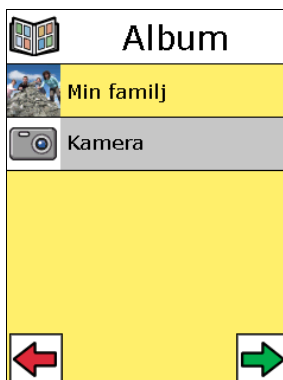

Det senast tagna fotot visas först.

Man bläddrar mellan bilderna via blädderknapparna.



För ta bort ett foto trycker man på Ta bort-knappen.



För att byta namn på ett foto trycker man på Ändra-knappen. Samma vy som i *Namnge foto* visas. (Ändra-knappen visas endast om det är inställt att man ska kunna namnge foto.)

5 Inställningar

För att ändra inställningarna för Kamera ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se *Apparatöversikt*.




En inställningsmeny visas.

För att komma till Kamerans inställningar väljer man Kamera på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man göra följande inställningar:

- Ange hur fotot ska sparas.
- Namnge fotot.
- Kamera-knapp i Välj bild-vyn.
- Hemknappen som avtryckare

De olika inställningarna beskrivs nedan.

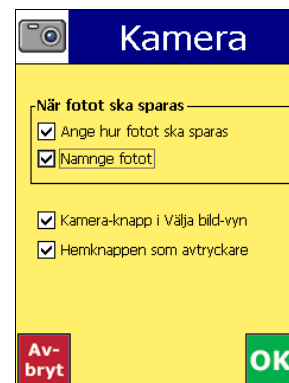

5.1 Ange hur fotot ska sparas

Denna inställning gäller endast när Kamera har startats från Handimenyn.

När "Ange hur fotot ska sparas" är ikryssat kan man välja om fotot ska sparas som en albumbild eller som en bildbasbild. Vyn nedan visas då efter vyn *Vill du spara?*



Om man väljer "Spara i album" läggs fotot i Album|Kamera.


Om man väljer "Spara i bildbas" läggs fotot sist i Välj bild-vyn, dvs vyn där man väljer bilder för aktiviteter, timers och kontakter.

Man väljer önskat alternativ och går vidare med grön högerpil.

Om man trycker på röd vänsterpil kommer man tillbaka till vyn *Hur vill du spara?*


5.2 Namnge foto

När "Namnge foto" är ikryssat kan man ge fotot ett namn. Vyn nedan visas då efter man har valt att spara fotot. (Gäller både när kameran startas från Handimenyn och från Välj bild-vyn.)

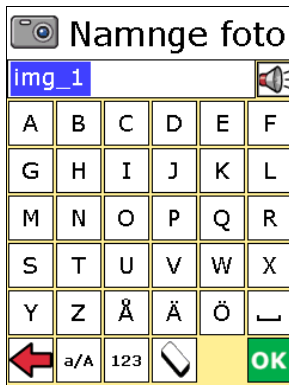

När vyn visas har ett defaultnamn redan angivits. Det kan man antingen behålla eller skriva in ett eget.

5.3 Kamera-knapp i Välj bild-vyn

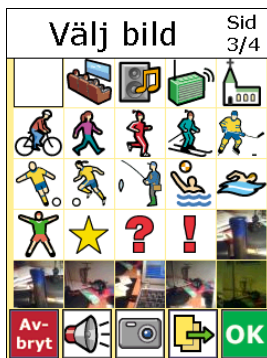

När "Kamera-knapp i Välj bild-vyn" är ikryssat visas kameraknappen i knappraden i Välj bild-vyn.

Om denna inställning inte är vald kan man endast fotografera via Handimenyn.

5.4 Hemknappen som avtryckare

När "hemknappen som avtryckare" är ikryssat kan man trycka på hemknappen (se Apparätöversikt) när man ska ta fotografier. Det innebär också att hemknappen inte fungerar som vanligt i Kameravyn, dvs man kan då inte aktivera den Handifunktion som valts som autostart genom att trycka på hemknappen.

6 Kamera i HandiTools

I HandiTools, fr o m version 1.0.7, kan man se de bilder som tagits med kameran. De som tagits för bildbasen finns under fliken Kalender, och albumbilderna finns under fliken Album.

De bilder som ligger i Album kan redigeras och lägga in i andra album. Man kan t ex skapa ett nytt album "Min födelsedag" och där lägga in de foton som togs på födelsedagen. Bilderna kan då också föras med ljudstöd.

7 Tips på användning av Kameran

- Kameran i Handi har liksom de flesta inbyggda kameror inte särskilt bra prestanda. Bilderna blir lite suddiga, men framförallt har den begränsad ljuskänslighet. Det är alltså viktigt att ha bra ljus när man fotograferar.
- Om man vill ta så bra bilder som möjligt för att använda i bildbasen, t ex på personer i Kontakter, så kan man spara bilderna i Album och sedan med HandiTools beskära och redigera bilden innan den läggs i bildbasen. Det är betydligt krångligare än att ta bilden direkt i Välja bild-vyn, men det blir väsentligt bättre bilder.

