

Handi Kamera




Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Fotografera från Handimenyn	3
3 Fotografera från Välj bild-vyn	4
4 Titta på bilderna.....	5
5 Inställningar	5
5.1 Ange hur fotot ska sparas.....	6
5.2 Namnge foto	6
5.3 Kamera-knapp i Välj bild-vyn	7
5.4 Hemknappen som avtryckare	7
6 Kamera i HandiTools.....	7
7 Tips på användning av Kameran.....	7

1 Inledning

Funktionen *Kamera* är en förenklad version av apparatens inbyggda kamera.

Kameran kan startas antingen från Handimenyn eller från Välj bild-vyn, dvs vyn där man väljer bilder för aktiviteter, timers och kontakter.

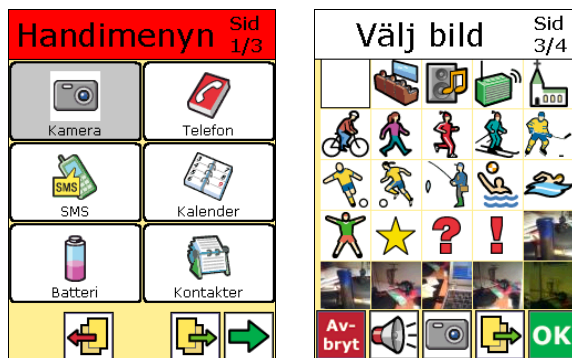


Med Kamera kan man ta två typer av bilder:

- Alumbilder. Sparas i originalstorlek visas i Album.
- Bildbasbilder. Sparas i två storlekar och visas i Välj bild-vyn.

2 Fotografera från Handimenyn

Om man vill ta "alumbilder" startar man lämpligen Kameran i Handimenyn. Då visas följande vyer:



I *Sökarvyn* visas en rörlig sökarbild, När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden.

I vyn *Vill du spara?* visas den bild man har tagit.


I vyn *Hur vill du spara?* anger man om bilden ska sparas i album eller i bildbas. Det är inställbart om denna vy ska visas.


I vyn *Namnge foto* ger man bilden ett namn. Ett namn har redan angivits automatiskt, och detta kan man antingen behålla eller skriva in ett eget. Det är inställbart om denna vy ska visas.

Hur man senare tittar på bilden beskrivs i avsnittet 4 *Titta på bilderna* nedan.


3 Fotografera från Välj bild-vyn

Om man ska ta foton för att symbolisera en aktivitet eller för att lägga in en person i Kontakter väljer man lämpligen att ta fotot direkt i Välj bild-vyn.


Man trycker då på Kamera-knappen  längst ned i Välj bild-vyn. Följande vyer visas:

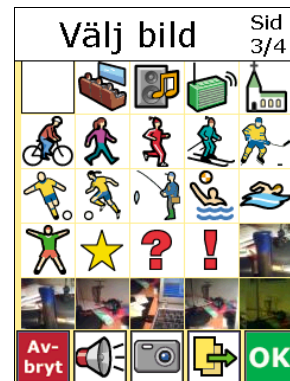

Sökarvyn

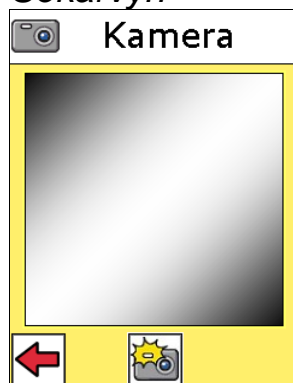


Vill du spara?

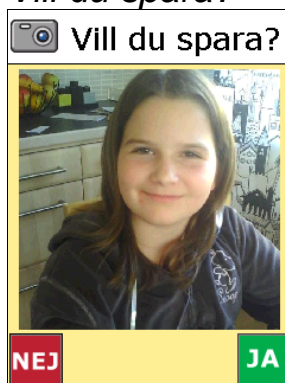

Namnge foto



I Sökarvyn visas en rörlig sökarbild, När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden.



I vyn *Vill du spara?* visas den bild man har tagit.

I vyn *Namnge foto* ger man bilden ett namn. Ett namn har redan angivits automatiskt, och detta kan man antingen behålla eller skriva in ett eget. Det är inställbart om denna vy ska visas.

Hur man senare tittar på bilden beskrivs i avsnittet 4 *Titta på bilderna* nedan.

4 Titta på bilderna

De bilder som har sparats visas i Handifunktionen *Album*. De ligger i albumet Kamera.

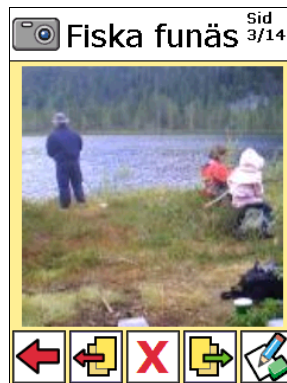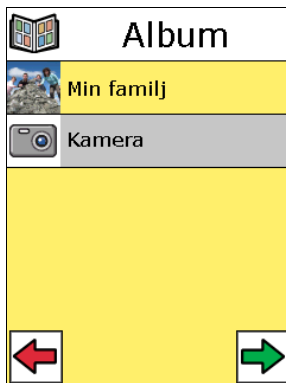

Det senast tagna fotot visas först.

Man bläddrar mellan bilderna via blädderknapparna.



För ta bort ett foto trycker man på Ta bort-knappen.



För att byta namn på ett foto trycker man på Ändra-knappen. Samma vy som i *Namnge foto* visas. (Ändra-knappen visas endast om det är inställt att man ska kunna namnge foto.)

5 Inställningar

För att ändra inställningarna för Kamera ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Apparatöversikt.




En inställningsmeny visas.

För att komma till Kamerans inställningar väljer man Kamera på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man göra följande inställningar:

- Ange hur fotot ska sparas.
- Namnge fotot.
- Kamera-knapp i Välj bild-vyn.
- Hemknappen som avtryckare

De olika inställningarna beskrivs nedan.

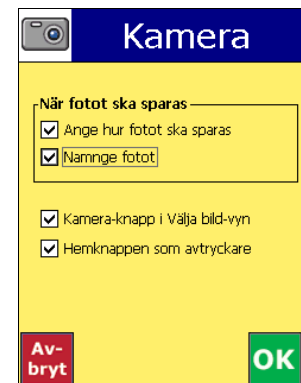

5.1 Ange hur fotot ska sparas

Denna inställning gäller endast när Kamera har startats från Handimenyn.

När "Ange hur fotot ska sparas" är ikryssat kan man välja om fotot ska sparas som en albumbild eller som en bildbasbild. Vyn nedan visas då efter vyn *Vill du spara?*



Om man väljer "Spara i album" läggs fotot i Album|Kamera.

Om man väljer "Spara i bildbas" läggs fotot sist i Välj bild-vyn, dvs vyn där man väljer bilder för aktiviteter, timers och kontakter.

Man väljer önskat alternativ och går vidare med grön högerpil.

Om man trycker på röd vänsterpil kommer man tillbaka till vyn *Hur vill du spara?*

5.2 Namnge foto

När "Namnge foto" är ikryssat kan man ge fotot ett namn. Vyn nedan visas då efter man har valt att spara fotot. (Gäller både när kameran startas från Handimenyn och från Välj bild-vyn.)



När vyn visas har ett defaultnamn redan angivits. Det kan man antingen behålla eller skriva in ett eget.

