


Bruksanvisning Handi

Kontakter

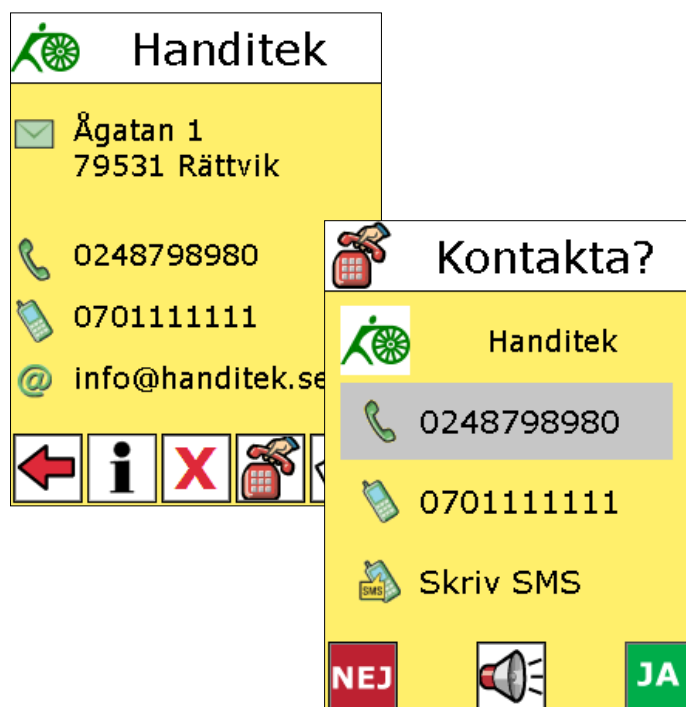

För Handi med telefonfunktion

Version 3.10



Handitek
Ågatan 1, 795 31 Rättvik
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983
www.handitek.se

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Kontakter.....	3
2.1 Kontakter-vyn.....	3
2.2 Kontaktvyn.....	3
2.3 Definiera kontakt.....	4
2.4 Kontakta-vyn.....	5
2.5 Avancerad redigering.....	5
2.5.1 Flytta nummer.....	5
2.5.2 Kopiera nummer mellan kontakter.....	6
3 Inställningar.....	6

1 Inledning

I funktionen Kontakter kan man spara information om olika personer. Informationen sparas som en *s k kontakt*, och kan innehålla namn, bild, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och extra information.

Om funktionerna Telefon och SMS används och telefonnummer finns angivet för en kontakt är det möjligt att ringa och skicka sms direkt till denna via Kontakter.

2 Använda Kontakter

2.1 Kontakter-vyn



När man väljer Kontakter i Handimenyn visas Kontakter-vyn. Här visas de olika kontakterna i bokstavsordning.

När man trycker på en kontakt blir den gråmarkerad. Namnet på kontakten kan då läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen. (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)

När man trycker på *grön högerpil* visas den valda kontakten i *Kontaktvyn*, vilken beskrivs i ett separat avsnitt nedan.



För att skapa en ny kontakt trycker man på *Ny kontakt*-knappen. Då visas vyn *Definiera kontakt*.^{2.3} Definiera kontakt, vilken beskrivs i ett separat avsnitt nedan.

2.2 Kontaktvyn



Här visas den valda kontaktens data. (Det är inställbart vilka data och knappar som ska visas.)

Om man trycker på texten läses den upp av talsyntesen.

Om man trycker på den lilla bilden längst upp i det vänstra hörnet visas en ny vy med större version av bilden.


För att ta bort kontakten trycker man på *Ta bort*-knappen. När man har bekräftat att kontakten ska tas bort kommer man tillbaka till *Kontaktvyn*.



För att **ändra** kontakten trycker man på *Ändra*-knappen. Då visas vyn *Definiera kontakt*.^{2.3} Definiera kontakt där man kan ändra kontaktens data, se separat avsnitt.

Trycker man på  visas extra information om kontakten. Texten kan läsas upp via *Talstöd*-knappen.

Man trycker på *röd vänsterpil* för att komma tillbaka till Kontaktvyn.

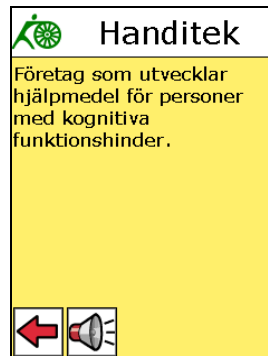


Kontakta-knappen visas om funktionerna Telefon och SMS används och det är minst ett telefonnummer angivet. När man trycker på denna knapp visas *Kontaktavyn*, se separat avsnitt.

2.3 Definiera kontakt

Bild	Namn
Adress	
Telefonnummer	
Mobilnummer	
E-postadress	
Av-bryt	OK

Kontakter skapas och ändras via denna vy:

Här anger man kontaktens namn, bild, adress, telefonnr, mobilnr, e-postadress genom att trycka på respektive post.

Extra information anges genom att trycka på .

När kontakten är klar trycker man på *OK*. Kontakten sparas och man kommer tillbaka till *Kontaktervyn*.

Välj bild

Välj bild Sid 7/7

Av-bryt

Namnge kontakt

Namnge kontakt

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	Å	Ä	Ö	_

Av-bryt a/A 123

Ange adress

Ange adress

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	Å	Ä	Ö	_

Av-bryt a/A 123

Ange telefonnummer

Ange telefonnummer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Av-bryt OK

Ange mobilnummer

Ange mobilnummer

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Av-bryt OK

Ange e-postadress

Ange e-postadress

a	b	c	d	e	f
g	h	i	j	k	l
m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x
y	z	@	_	-	_

Av-bryt a/A 123 . OK

Ange info

Ange info

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	Å	Ä	Ö	_

Av-bryt a/A 123

2.4 Kontakta-vyn

Kontakta-vyn ser olika ut beroende på om telefonnummer och mobilnummer är angivet.



Man väljer vilket nummer man vill ringa till. Om mobilnummer finns angivet kan man även välja att skriva sms.

Om användaren inte klarar att göra valet mellan två nummer ska det aldrig finnas två nummer angivna för en kontakt! Istället kan man då göra två kontakter, t ex "Kalle hemma" och "Kalle mobil".

Man väljer önskat alternativ och trycker sedan på **JA** för att gå vidare. Telefon- och SMS-funktionaliteten beskrivs i separata kapitel.

2.5 Avancerad redigering

När man importerar SIM-kontakter (se bruksanvisning för Telefon och SMS) läggs sannolikt många fasta telefonnummer in felaktigt som mobilnummer. Då behöver man flytta numret till rätt plats.

Man kan även behöva lägga ihop två kontakter till en enda, t ex "Kalle mobil" och "Kalle hem" till "Kalle. kontaktlistan. Det gör man genom att kopiera ett nummer från den ena kontakten till den andra.

Denna s k "avancerade redigering" ställs in via Inställningar.


2.5.1 Flytta nummer




Om endast ett nummer finns angivet för kontakten kan man enkelt flytta telefonnummer till mobilnummer och vice versa.

2.5.2 Kopiera nummer mellan kontakter

1. Kopiera ett befintligt nummer via *Kopiera*-knappen.

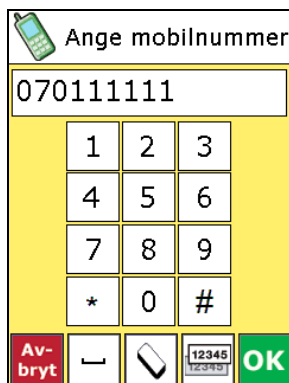

2. Gå till en annan kontakt och klistra in numret via *Klistra in*-knappen.

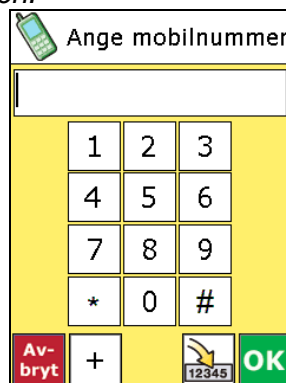

3 Inställningar

För att ändra inställningar för Kontakter ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se *Apparatöversikt*.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Kontacters inställningar väljer man Kontakter på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man kan ställa in:

- Ikonernas storlek i 2.1 *Kontakter-vyn*.
- Om knappen "Ny kontakt" ska visas i 2.1 *Kontakter-vyn*.
- Vilka data och knappar som ska visas i 2.2 *Kontaktvyn*.
- Om avancerad redigering ska kunna göras, se 2.5 *Avancerad redigering*.

