


Bruksanvisning Handi

Krisplan

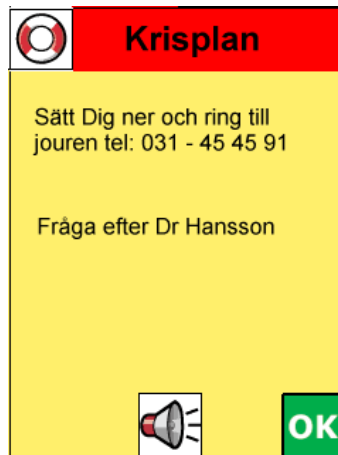

För Handi utan telefonfunktion

Version 3.8



Handitek
Ågatan 1, 795 31 Rättvik
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983
www.handitek.se

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Krisplan	3
3 Inställningar	3
3.1 Ny krisplan	3
3.2 Byt namn på krisplan	4
3.3 Ändra krisplan.....	4
3.4 Ta bort krisplan	4

1 Inledning

Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.


Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Det är mycket enkelt att få fram Krisplan.

2 Använda Krisplan

Det är enkelt att få fram Krisplan; antingen väljer man funktionen i Handimenyn eller så trycker man 2 sekunder på Krisknappen (Se Apparatöversikt).

OBS! För att Krisplan ska visas måste funktionen väljas i Inställningar|Handimenyn.

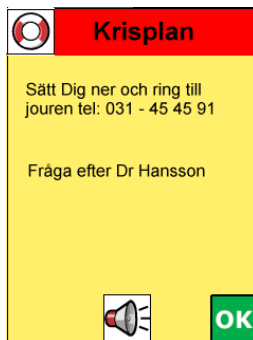

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Hur krisplanen definieras beskrivs i nästa kapitel.

3 Inställningar

För att definiera krisplanen ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Apparatöversikt.




En inställningsmeny visas.

För att komma till Krisplans inställningar väljer man Krisplan på sida 1. Vyn till höger visas.

Här definierar man krisplaner och väljer vilken krisplan som ska vara aktuell. Hur krisplanerna definieras beskrivs i separata avsnitt nedan.


För att välja aktuell krisplan markerar man den och trycker på OK.

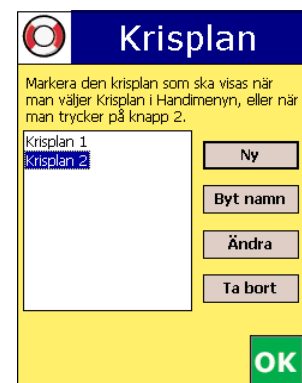

I *Inställningar|Handimenyn* ställer man in om ikonen Krisplan ska visas och därmed att knapp 1 (se Apparatöversikt) initierar den valda krisplanen.

3.1 Ny krisplan

För att skapa en ny krisplan trycker man på knappen *Ny*.

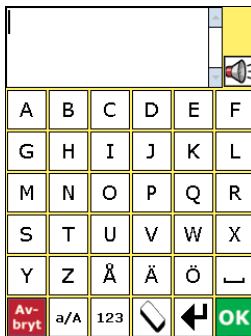

Man skriver in krisplanens text via tangentbordet.

När man trycker *OK* läggs krisplanen in i listan.

3.2 Byt namn på krisplan

För att byta namn på en krisplan markerar man den och trycker på knappen "Byt namn". Då visas tangentbordet och man får skriva in ett nytt namn.

3.3 Ändra krisplan

För att ändra en krisplan markerar man den och trycker på *Ändra*-knappen. Krisplanen ändras via samma vy som i *Ny krisplan* ovan.

3.4 Ta bort krisplan

För att ta bort en krisplan markerar man den och trycker på *Ta bort*-knappen. Man bekräftar att krisplanen ska tas bort.