

Bruksanvisning Handi

Krisplan



För Handi med telefonfunktion

Version 3.10



Handitek
Ågatan 1, 795 31 Rättvik
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983
www.handitek.se

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Krisplan	3
2.1 Telefon-knappen.....	3
2.1.1 Ett telefonnummer angivet	3
2.1.2 Två eller tre telefonnummer angivna.....	4
2.1.3 Misslyckad kontakt.....	4
2.2 SMS-knappen	5
3 Inställningar	5
3.1 Ny krisplan	5
3.2.1 Ange text.....	6
3.2.2 Ange telefonnummer.....	6
3.2.3 Ange sms-nummer.....	7
3.2.4 Ange sms-meddelande	7
3.3 Byt namn på krisplan	7
3.4 Ändra krisplan.....	7
3.5 Ta bort krisplan	7

1 Inledning

Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Om funktionerna Telefon och SMS används kan man i Krisplan lägga in en knapp som direkt ringer upp 1-3 fördefinierade telefonnummer samt en knapp som gör att man kan skicka ett färdigskrivet textmeddelande till 1-3 sms-nummer.

Det är mycket enkelt att få fram Krisplan.

Det går att ringa SOS-Alarm "112" även om funktionen Telefon inte används (inget SIM-kort insatt).

2 Använda Krisplan

Det är enkelt att få fram Krisplan; antingen väljer man funktionen i Handimenyn eller så trycker man 2 sekunder på Krisknappen (Se Apparatöversikt).

OBS! För att Krisplan ska visas måste funktionen väljas i Inställningar|Handimenyn.



Om 1-3 telefonnummer har angivits till krisplanen visas *Telefon*-knappen.


Om 1-3 sms-nummer och ett textmeddelande har angivits till krisplanen kan man skicka detta genom att trycka på *SMS*-knappen.

Vad som händer när man trycker på Telefon- och SMS-knappen beskrivs i varsitt avsnitt nedan.

2.1 Telefon-knappen


2.1.1 Ett telefonnummer angivet

När ett telefonnummer är angivet visas vyn *Vill du ringa?*. När man trycker på JA kopplas samtalet.

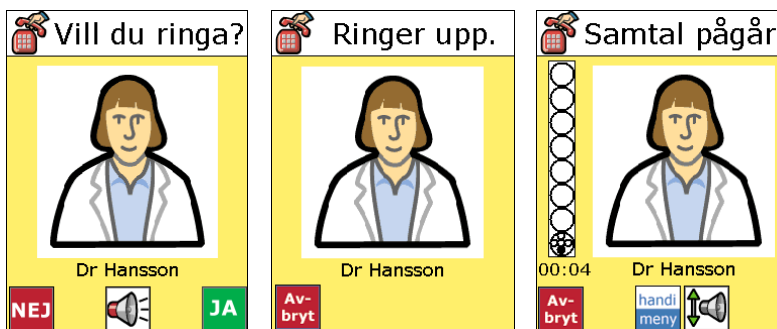

2.1.2 Två eller tre telefonnummer angivna

När två eller tre telefonnummer är angivna visas en vy där man får välja vem man vill ringa till. Det första telefonnumret är förvalt, och när man trycker på JA kopplas samtalet.

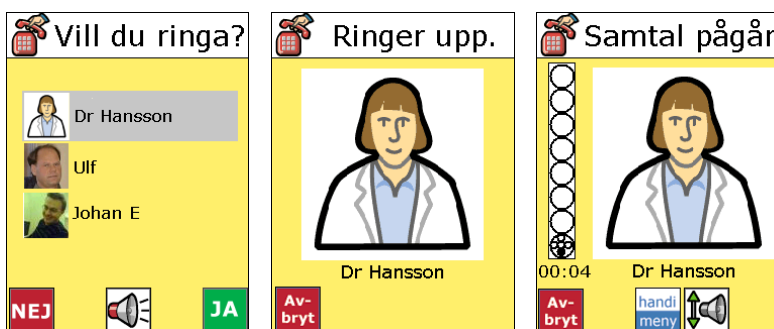

2.1.3 Misslyckad kontakt

I en krissituation är det förstås mycket viktigt att användaren får kontakt med önskad person. Därför bör de angivna telefonnumren vara sådana som är tillgängliga dygnet runt. Men av olika skäl kan kontakten ändå misslyckas:


Det går inte att ringa

Om SIM-kortets PIN-kod inte är inmatad eller om det är för dålig täckning för att kunna ringa, visas följande felmeddelande:

Ingen kontakt med operatören.

Upptaget, telefonen är avstängd, telefonsvarare

Om det är upptaget, mottagarens telefon är avstängd eller man kopplas till en telefonsvarare ska man trycka på Avbryt i Ringa-vyn (OK-knappen när det är upptaget). När **flera telefonnummer finns angivna** visas då vyn *Vill du ringa?* på nytt med nästa telefonnummer markerat. När man trycker på JA kopplas samtalet.

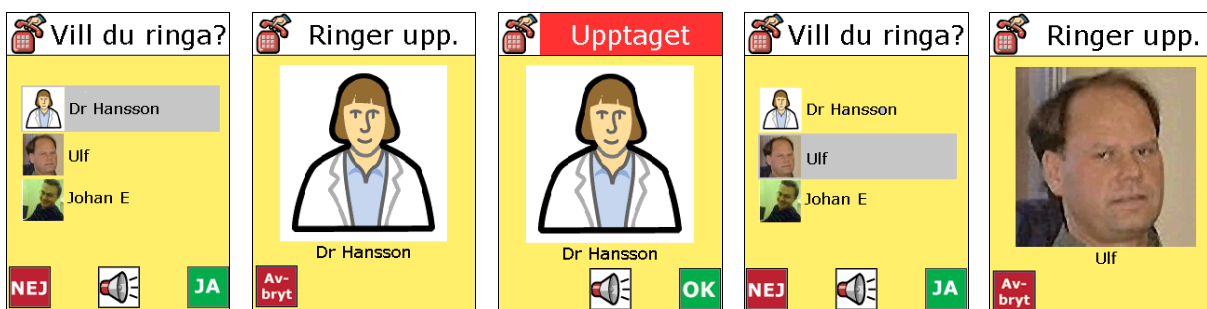

Mottagaren svarar inte

Om mottagaren inte svarar **och flera telefonnummer finns angivna** avbryts uppringningen efter 30 sekunder. Vyn *Vill du ringa?* visas på samma sätt som ovan.

Dålig mottagning


Om mottagningen är mindre än 2 prickar visas en varning. Man kan dock ringa ändå.

2.2 SMS-knappen

1 sms-nummer



2-3 sms-nummer

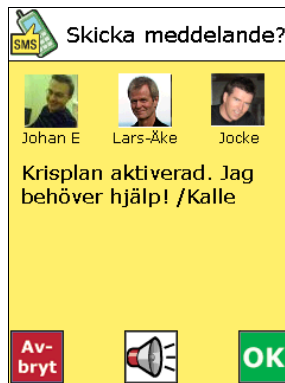

När man trycker på SMS-knappen visas vyn *Skicka meddelande?*. Vyn ser lite olika ut beroende på om 1 eller 2-3 sms-nummer har angivits.

När man trycker på OK skickas meddelandet till de angivna sms-numren.

3 Inställningar

För att definiera krisplanen ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.




En inställningsmeny visas.

För att komma till Krisplans inställningar väljer man Krisplan på sida 1. Vyn till höger visas.

Här definierar man krisplaner och väljer vilken krisplan som ska vara aktuell. Hur krisplanerna definieras beskrivs i separata avsnitt nedan.

För att välja aktuell krisplan markerar man den och trycker på OK.

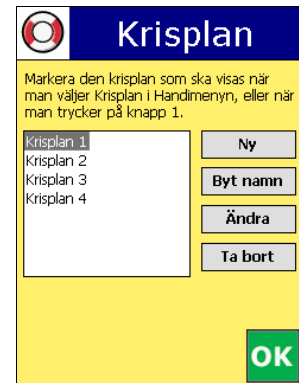

I *Inställningar/Handimenyn* ställer man in om ikonen Krisplan ska visas och därmed att knapp 1 (se Apparatöversikt) initierar den valda krisplanen.

3.1 Ny krisplan

För att skapa en ny krisplan trycker man på knappen *Ny*.

Text		
Telefon 1	Telefon 2	Telefon 3
SMS 1	SMS 2	SMS 3
SMS meddelande		
Av-bryt		OK

Här finns det knappar för Text, Telefonnummer, SMS-nummer och SMS-meddelande.

Via respektive knapp skriver man in data. Beroende på vilken knapp man trycker på visas olika vyer, se nedan.

När man trycker OK läggs krisplanen in i listan.

3.2.1 Ange text

Ring till jouren.]					
Fråga efter Dr					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	!	?
;	,	.	'	/	\
()	:	"	-	*
+	@	%	€	ü	_
Av-bryt	ABC				OK

Här skriver man in den text som ska visas i Krisplan-vyn

Krisplan	
Ring till jouren.	
Fråga efter Dr Hansson.	
Telefon	SMS
OK	

3.2.2 Ange telefonnummer

Välj kontakt Sid 1/13		Välj nummer	
Nytt nummer	Inget nummer	Anna Hansson	
Anders L	Anna Hansson	0248111111	
Annelie	Annelie E	0701111111	
Av-bryt			OK

Här väljer man kontakt/telefonnummer.


Om kontakten har ett nummer angivet läggs det in i vyn "Definiera krisplan" när man trycker OK.

Om kontakten har båda numren angivna visas vyn "Välj nummer" när man trycker på *grön högerpil*. Man får nu välja vilket nummer som ska läggas in och sedan trycka på OK.

För att skriva in nytt nummer väljer man "Nytt nummer. (Detta bör undvikas – krissamtal bör gå till en definierad kontakt)

För att ta bort tidigare angivet nummer väljer man "Inget nummer".

3.2.3 Ange sms-nummer

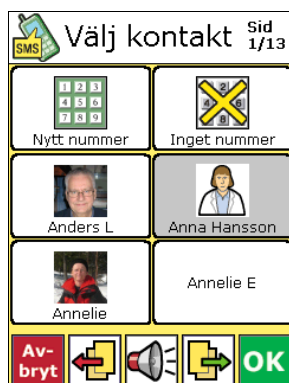

Här väljer man kontakt/sms-nummer.

Numret läggs in i vyn "Definiera krisplan" när man trycker på OK.

För att skriva in nytt nummer väljer man "Nytt nummer. (Detta bör undvikas – krismeddelanden bör gå till en definierad kontakt)

För att ta bort tidigare angivet nummer väljer man "Inget nummer".

3.2.4 Ange sms-meddelande



Här skriver man in krismeddelandet.



3.3 Byt namn på krisplan

För att byta namn på en krisplan markerar man den och trycker på knappen "Byt namn". Då visas tangentbordet och man får skriva in ett nytt namn.

3.4 Ändra krisplan

För att ändra en krisplan markerar man den och trycker på *Ändra*-knappen. Krisplanen ändras via samma vy som i *Ny krisplan* ovan.

3.5 Ta bort krisplan

För att ta bort en krisplan markerar man den och trycker på *Ta bort*-knappen. Man bekräftar att krisplanen ska tas bort.