
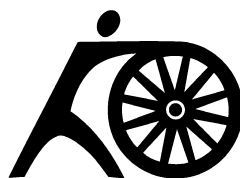


Bruksanvisning Handi

Röstanteckningar

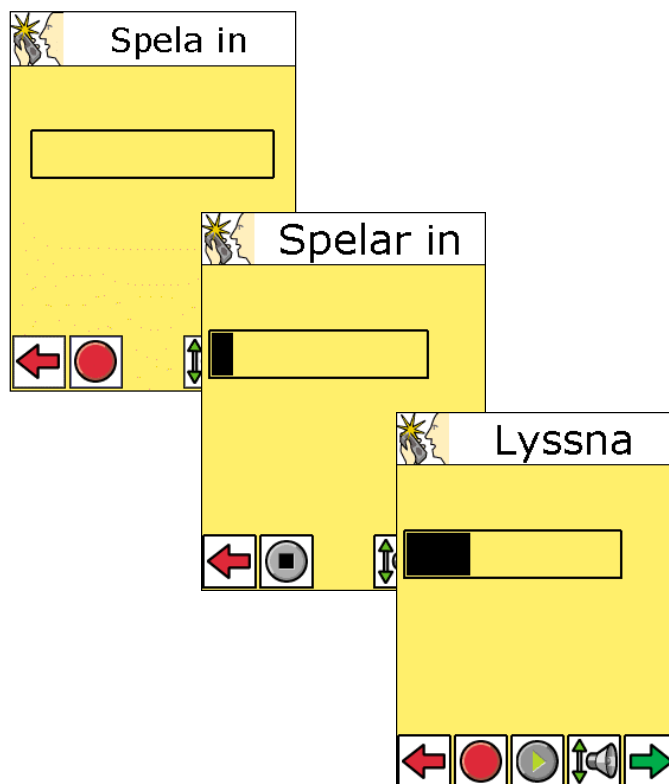

Handitek

Handitek
Ågatan 1, 795 31 Rättvik
Tel 0248-798980 Fax 0248-798983
www.handitek.se

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Röstanteckningar	3
2.1 Tala in ny röstanteckning.....	3
2.2 Lyssna på en röstanteckning	5
2.3 Ta bort en röstanteckning	5

1 Inledning

Med Röstanteckningar talar man in information. Det är enkelt att spara och öppna röstanteckningar.

Röstanteckningar ställer inget krav på förmåga att skriva, men funktionen kan också användas som ett väldigt enkelt och snabbt sätt att lägga in information även om man kan skriva.

2 Använda Röstanteckningar

När man väljer Röstanteckningar i Handimenyn visas följande vy:




Första gången man kommer till Röstanteckningar är det tomt, dvs det finns inga röstanteckningar. Se den vänstra vyn.

När man har gjort röstanteckningar visas de i en lista, se den högra vyn.


2.1 Tala in ny röstanteckning




För att tala in ny anteckning ska man trycka på knappen "Ny". Inspelningsvyn visas.

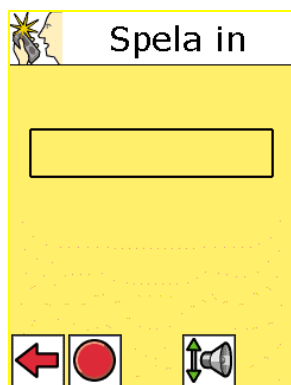


Se Apparatöversikt var mikrofonen sitter. Man ska tala direkt in i mikrofonen på ca 10 cm avstånd.


För att starta inspelning trycker man på *Spela in*-knappen .

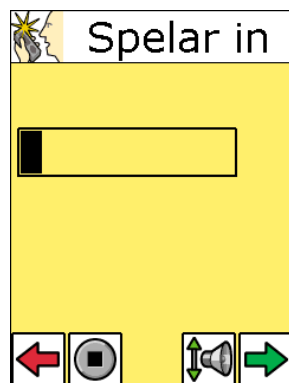



När inspelning pågår visas inspelningstiden i den svarta liggande stapeln.

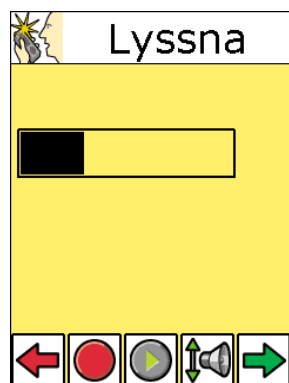När man är klar med inspelningen trycker man på *Stopp*-knappen



Man kan sedan lyssna på det som spelats in genom att trycka på *Play*-knappen .

Är man inte nöjd spelar man in igen genom att trycka på .

Volymen kan justeras i sex steg. Man kommer åt inställningen av volymen genom att trycka på *Volym*-knappen .

När man är nöjd med inspelningen trycker man på *grön högerpil*.




I denna vy kan man ge röstanteckningen ett namn. Om man inte skriver in något namn så blir namnet automatiskt *Röstanteckningar* följt av ett nummer.

När man trycker på OK sparas röstanteckningen.




Röstanteckningen läggs in först i listan med röstanteckningar.


2.2 Lyssna på en röstanteckning

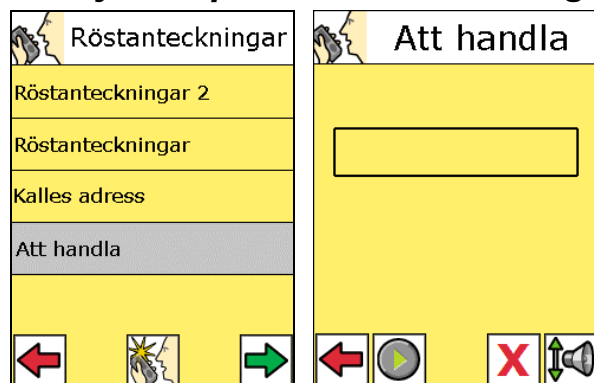


För att lyssna på en röstanteckning markerar man den i listan med Röstanteckningar och trycker på *grön högerpil* (den gröna högerpilen visas inte förrän en röstanteckning markerats).

I uppspelningsvyn kan man lyssna på det inspelade meddelandet genom att trycka på *Play*-knappen .

2.3 Ta bort en röstanteckning

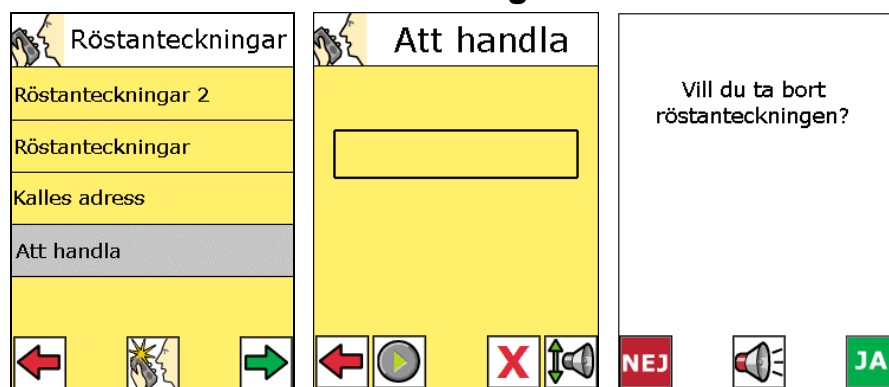

För att ta bort en röstanteckning markerar man den i listan i Röstanteckningar, trycker på *grön högerpil* och sen på knappen . Man får bekräfta att man vill ta bort röstanteckningen genom att trycka på Ja. Röstanteckningen tas bort från listan.