

Bruksanvisning FlexiKom

Version 3




FlexiWord

+



FlexiView

+

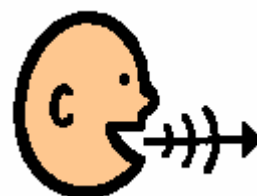

Talsyntes



Introduktion

I **FlexiKom** ingår programmen **FlexiWord** och **FlexiView** samt den bundlade talsyntesen **Acapela Multimedia**.

FlexiWord är ett skrivprogram där man kan skriva med symboler, bilder, blockord och bokstäver. Till det som skrivs kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud.

FlexiView är ett bildvisningsprogram som visar en bild åt gången. Till varje bild kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud. Det är också möjligt att visa bokstäver, ord och meningar samt spela upp videosekvenser.

FlexiWord, FlexiView och Acapela Multimedia beskrivs i separata bruksanvisningar.

Datorkrav

Flexiboard och tillhörande programvaror kan användas på datorer med Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista installerat. Datorn måste ha en USB-port.

Installation

I FlexiKom-installationen ingår följande:


- Flexiladdaren inkl FlexiUSB (drivrutin till Flexiboard)
- FlexiWord
- FlexiView
- Bundlad talsyntes (Acapela Multimedia)
- Demobildbaser
- Bruksanvisningar
- Bildbaskontoret

Tillsammans med installations-CDn medföljer ett **serienummer**.

Gör så här för att installera:

1. Sätt i installations-CDn i CD-enheten. Installationsprogrammet startar automatiskt. Om huvudmenyn inte visas: Gå till *Start*-menyn, Välj *Kör* och skriv **d:\install.exe** (byt ut d om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på **OK**.
2. Se till att det som ska installeras är förbockat och klicka på **Nästa**. (Om du har valt ”Bruksanvisningar” får du även ange vilka bruksanvisningar som ska installeras.)
3. Välj ”Standardinstallation” och klicka på **Nästa**.
4. Fyll i Företag/Organisation och det serienummer som finns angivet på installations-CDn. Klicka på **Nästa**.
5. Installationen startar. Demobildbaserna installeras endast om de riktiga bildbaserna inte finns. Det tar en stund att installera talsyntesen.
6. Ta ut CDn och när installationen är klar.

När installationen är klar och Flexiboard är ansluten blinkar den gröna dioden på Flexiboard. FlexiUSB-ikonen visas i Aktivitetsfältet längst ned till höger på bildskärmen och ser ut som på bilden:

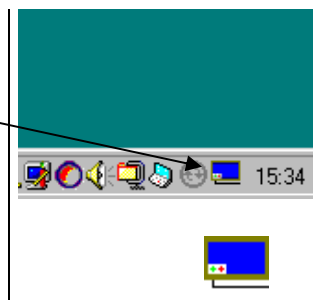

(Mera information om FlexiUSB finns i Flexiboards bruksanvisning.)

Innan man börjar göra sina egna överlägg är det viktigt att kontrollera att den optiska koden skrivs ut på exakt rätt plats på överläggen. Detta görs i programmet Flexiladdaren, se *Justera den optiska kodens placering* i Flexiladdarens bruksanvisning.

Information om Flexiboard

Mer information om Flexiboard och Flexi-programmen samt uppgraderingar finns på Gewas hemsida www.gewa.se och på Handiteks hemsida www.handitek.se.

På Handiteks hemsida finns även tips på användning, färdiga överlägg att ladda hem och ett diskussionsforum under fliken Forum där man kan gå in och skriva in både frågor och egna erfarenheter kring Flexiboard.

Gewa AB

BOX 92, 191 22 SOLLENTUNA, SWEDEN

TEL: 08-594 694 00 • TEXTTEL: 08-594 694 18 • FAX: 08-594 694 19

E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Art.nr: 20091028-1245, Dok: Bruksanvisning FlexiKom Ver: A A5, Dat: 2009-10-28