

Flexiboard


# Bruksanvisning FlexiKom



FlexiWord



FlexiView

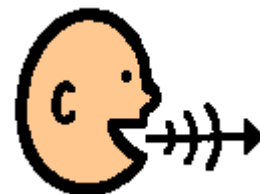

Talsyntes

Version 3.0.13 och senare

## Introduktion

I **FlexiKom** ingår programmen **FlexiWord** och **FlexiView** samt den bundlade talsyntesen **Acapela Multimedia**.

FlexiWord är ett skrivprogram där man kan skriva med symboler, bilder, blockord och bokstäver. Till det som skrivs kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud.

FlexiView är ett bildvisningsprogram som visar en bild åt gången. Till varje bild kan man koppla syntetiskt tal eller inspelat ljud. Det är också möjligt att visa bokstäver, ord och meningar samt spela upp videosekvenser.

Talsyntesen Acapela Multimedia version 7 har två typer av röster:

- High Quality (HQ). Är baserad på inspelat tal och håller därför hög kvalitet. Tar mycket systemresurser.
- High Density (HD). Relativt låg kvalitet, men tar i gengäld lite systemresurser.

Följande röster är bundlade i FlexiKom (kan alltså bara användas i Flexi-programmen):

- Emma (HQ)
- Erik (HQ)
- Elin (HQ)
- AnnMarie (HD)
- Ingmar (HD)

FlexiWord, FlexiView och Acapela Multimedia beskrivs i separata bruksanvisningar.

## Datorkrav

Flexiboard och tillhörande programvaror kan användas på datorer med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 installerat. Datorn måste ha en USB-port.

För att kunna installera talsyntesen krävs ca 800 MB ledigt utrymme på hårddisken.

## Installation

I FlexiKom-installationen ingår följande:

- Flexiladdaren inkl FlexiUSB (drivrutin till Flexiboard)
- FlexiWord
- FlexiView
- Bundlad talsyntes (Acapela Multimedia version 7)
- Demobildbaser
- Bruksanvisningar
- Bildbaskontoret

Tillsammans med installations-DVD:n medföljer ett **serienummer**.


Gör så här för att installera:

1. Sätt i installations-DVD:n i DVD-enheten. Installationsprogrammet startar automatiskt. [Om huvudmenyn inte visas: Gå till *Start*-menyn, Välj *Kör* och skriv **d:\install.exe** (byt ut d om din DVD-enhet har en annan beteckning). Klicka på **OK**.]

2. Se till att det som ska installeras är förbockat och klicka på **Nästa**. (Om du har valt "Bruksanvisningar" får du även ange vilka bruksanvisningar som ska installeras.)
3. Välj "Standardinstallation" och klicka på **Nästa**.
4. Fyll i Företag/Organisation och det serienummer som finns angivet på installations-DVD:n. Klicka på **Nästa**.
5. Installationen startar. Demobildbaserna installeras endast om de riktiga bildbaserna inte finns. Det tar en stund att installera talsyntesen.
6. Ta ut DVD:n när installationen är klar.

När installationen är klar och Flexiboard är ansluten blinkar den gröna dioden på Flexiboard. FlexiUSB-ikonen visas i Aktivitetsfältet längst ned till höger på bildskärmen och ser ut som på bilden:

(Mera information om FlexiUSB finns i Flexiboards bruksanvisning.)

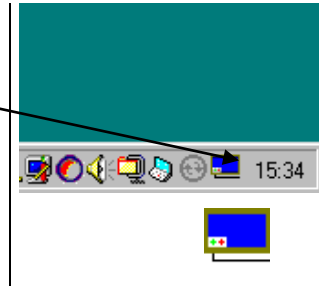

Innan man börjar göra sina egna överlägg är det viktigt att kontrollera att den optiska koden skrivs ut på exakt rätt plats på överläggen. Detta görs i programmet Flexiladdaren, se *Justera den optiska kodens placering* i Flexiladdarens bruksanvisning.

## Information om Flexiboard

Mer information om Flexiboard och Flexi-programmen samt uppgraderingar finns på Abilias hemsida [www.abilia.se](http://www.abilia.se) och på Handiteks hemsida [www.handitek.se](http://www.handitek.se).

På Handiteks hemsida finns även ett diskussionsforum under fliken Forum där man kan gå in och skriva in både frågor och egna erfarenheter kring Flexiboard.