


Handi 4

# Funktionsbeskrivning

## Användare

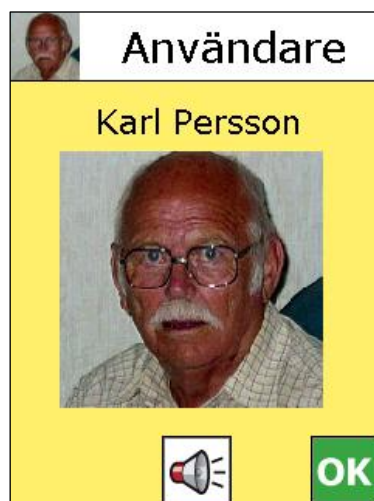

Programversion 4.2.0 eller senare


# 1. Inledning

Funktionen Användare gör att användaren kan visa en vy med sitt namn och en bild på sig själv.

Namn och bild på användaren läggs in via Handi eller PC-programmet HandiTools.

# 2. Använda Användare

När man väljer Användare i Handimenyn/Startmenyn visas följande vy.

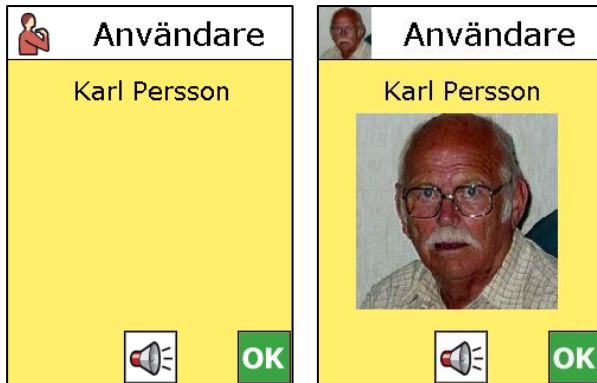

Om man trycker på *Talstöd*-knappen läses namnet upp med talsyntes.

Hur namnet skrivs in beskrivs i nästa kapitel.

# 3. Inställningar

För göra inställningar för Användare ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Användares inställningar väljer man *Användare* på sida 3. Vyn till höger visas.

Här kan man namnge Handi samt välja användarbild.

När man trycker på Namn-knappen visas tangentbordet och man får skriva in ett namn.

När man trycker på Bild-knappen visas vyn "Välj bild" och man får välja önskad bild (eller ta en ny bild om Handi har kamera).

