

Handi 4

Funktionsbeskrivning

Krisplan



För Handi utan telefonfunktion

Programversion 4.2.0 eller senare

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Använda Krisplan	3
3 Inställningar.....	3
3.1 Definiera krisplaner	4
3.1.1 Ny krisplan	4
3.1.2 Ändra krisplan	4
3.1.3 Ta bort krisplan.....	4

1. Inledning

Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet.

Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes.

Det är mycket enkelt att få fram *Krisplan*.

2. Använda Krisplan

Det är enkelt att få fram *Krisplan*; antingen väljer man funktionen i Handimenyn/Startmenyn eller så trycker man 2 sekunder på Krisknappen (Se i Handboken).


OBS! För att *Krisplan* ska visas måste funktionen väljas i *Inställningar*|*Handimenyn*/*Startmenyn*.



Informationen är i form av text, och kan läsas upp med talsyntes.

3 Inställningar

För att definiera krisplanen ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.

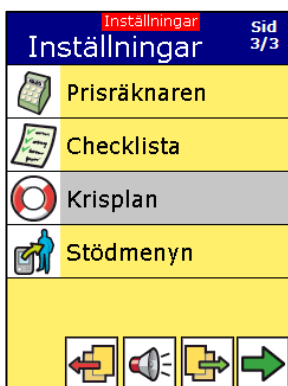


En inställningsmeny visas.

För att komma till Krisplans inställningar väljer man Krisplan på sida 3. Vyn till höger visas.


Här definierar man krisplaner och väljer vilken krisplan som ska vara aktuell. Hur krisplanerna definieras beskrivs i separata avsnitt nedan.

De olika inställningarna beskrivs nedan.

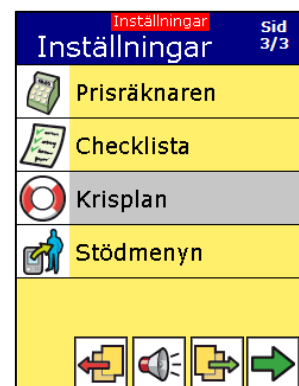

I *Inställningar*|*Handimenyn*/*Startmenyn* ställer man in om ikonen Krisplan ska visas och därmed att knapp 1 (se Apparatöversikt i Handboken) initierar den valda krisplanen.

3.1 Definiera krisplaner

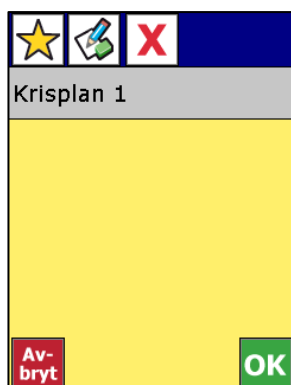

Via **Inställningar|Krisplan|Definiera krisplaner** definierar man krisplaner och väljer vilken krisplan som ska vara aktuell.


Överst i vyn finns det en knapprad med redigeringsfunktionerna "Ny", "Ändra" och "Ta bort". (Om ingen krisplan är markerad visas bara knappen "Ny".)

Hur krisplanerna definieras beskrivs i separata avsnitt nedan.

För att välja aktuell krisplan markerar man den och trycker på OK.

3.1.1 Ny krisplan

- ★ För att skapa en ny krisplan trycker man på knappen *Ny*. En guide visas där man först får namnge krisplanen och sedan ange vad som ska ingå i den.

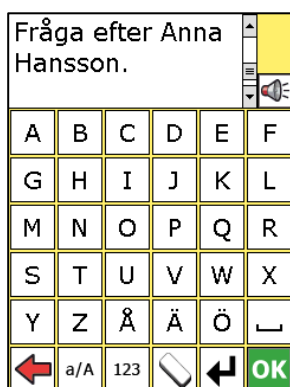


Krisplanen får automatiskt ett ledigt namn.


I den andra vyn skriver man in krisplanens information.

När man trycker *OK* läggs krisplanen in i listan.

3.1.2 Ändra krisplan

-  För att ändra namn eller information för en krisplan markerar man den och trycker på knappen "Ändra". Då visas samma guide som i 3.1.1 *Ny krisplan* och man kan ändra krisplanen.

3.1.3 Ta bort krisplan

-  För att ta bort en krisplan markerar man den och trycker på *Ta bort*-knappen. Man får bekräfta att krisplanen ska tas bort.