


Handi 4

Funktionsbeskrivning Spelaren

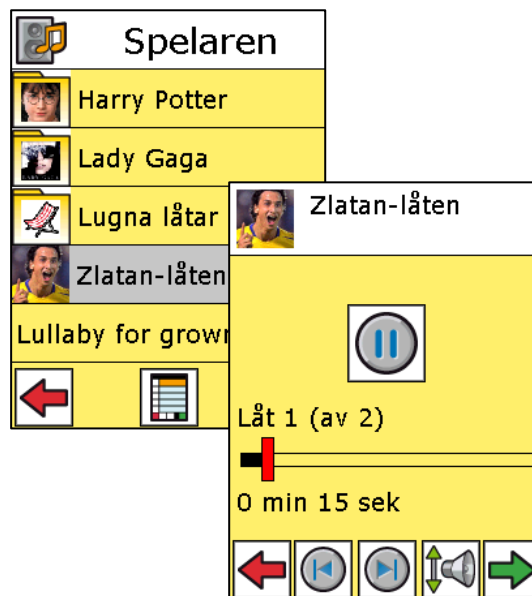

Programversion 4.4.4 eller senare

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Låtinformation.....	3
3. Använda Spelaren.....	3
3.1 Spellistan.....	3
3.2 Uppspelningsvyn.....	4
3.2.1 Spela i bakgrunden eller spara som bokmärke.....	5
3.3 Gå till bokmärke.....	5
4. Praktisk användning.....	6
4.1 Lyssna med hörlurar.....	6
4.2 Lyssna via den inbyggda högtalaren.....	6

1. Inledning

I *Spelaren* kan man lyssna på musik och ljudböcker i formaten mp3 och wma.

Låtarna kan sorteras "fysiskt" i mappar, men inte på något annat sätt (t ex Album, Artist etc).

Spelaren har automatiska spellistor. Alla låtar som ligger i samma mapp ingår i en spellista, och när man börjar spela någon av låtarna kommer nästa låt i listan att spelas upp när den första låten är slut.

Det är möjligt att spara ett bokmärke. På så sätt kan man enkelt komma tillbaka till där man slutade lyssna i t ex en ljudbok.

Låtarna läggs in via PC-programmet HandiTools. Här kan man strukturera låtarna i mappar, och välja bilder till låtarna/mapparna.

2. Låtinformation

Mediafiler, t ex mp3- och wma-filer, har nästan alltid information som Titel, Album, Spårnummer, Klassificering, Album etc. (Denna information kallas ibland för "låttaggar".)

Den här informationen används för att ge en mer komplett beskrivning av en mediafil än bara filnamnet, och används på olika sätt i olika mediaspelare.

I *Spelaren* används informationen "Titel" och "Artist". Om ingen sådan information finns för låten används istället filnamnet.

I mediaspelare kan man vanligtvis sortera och gruppera låtarna efter låtinformation samt göra valfria spellistor. Detta är ofta komplicerat, så för att förenkla användningen har *Spelaren* automatiska spellistor: Alla låtar som ligger i samma mapp sorteras efter filnamnen i bokstavsordning och spelas upp i den ordningen.

3. Använda Spelaren

3.1 Spellistan

När man väljer Spelaren i Handimenyn/Startmenyn visas spellistan.



Här visas mappar och låtar. Om låtarna har Titel- och Artistinformation visas den informationen i listan, annars visas filnamnet. (Det är inställbart om Artistinformation ska visas i listan.)


Om det finns fler än 5 mappar/låtar visas *Bläddra*-knapparna.


När man trycker på en mapp/låt blir den gråmarkerad. Namnet på låten/mappen kan då läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen. (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)


När en låt är markerad trycker man på *Nästa* för att komma till 3.2 *Uppspelningsvyn* och spela upp låten.

För att se innehållet i en **mapp** markerar man den och trycker på *Nästa*, och stegar på så vis ned "en nivå" i listan.

Man väljer låt genom att markera och trycka på *Nästa*.

För att komma tillbaka till översta nivån trycker man på *Tillbaka*-knappen .

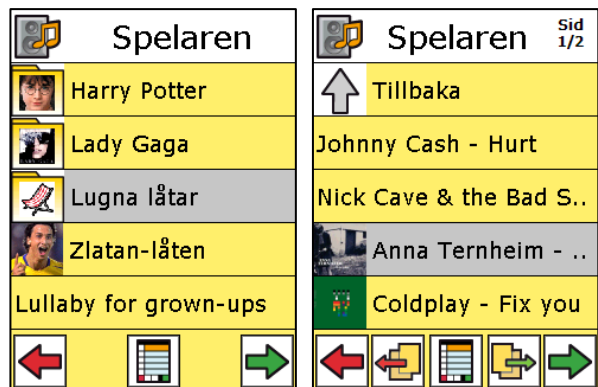

 När man trycker på *Meny*-knappen kommer man till Spelarmenyn.

Här kan man välja att gå till bokmärke, se 3.3 *Gå till bokmärke*.



3.2 Uppspelningsvyn



När uppspelningsvyn visas börjar låten spela direkt och en *Paus*-knapp visas.






Diverse information visas i vyn:

- Låtens namn och ev bild.
- Låtens position i spellistan "Låt 3 (av 5)".
- Speltiden, som en förloppsindikator och i minuter och sekunder.

Man kan ändra positionen ("snabbspola") genom att ändra i förloppsindikatorn. Denna funktion beskrivs i ett separat avsnitt.

När låten har spelat klart fortsätter nästa låt i spellistan att spela automatiskt.

Knapparnas funktioner beskrivs nedan.

-  Man trycker på *Paus*-knappen för att stanna låten. Då visas *Play*-knappen istället.
-  Man trycker på *Play*-knappen för att fortsätta att spela låten.
-  För att stänga av låten trycker man på *Backa* och kommer då tillbaka till spellistan.
-  För att byta till föregående låt trycker man på *Föregående*-knappen. Om nuvarande låt är först i spellistan kommer man till den sista låten i spellistan. *Denna knapp visas endast om det finns flera låtar i spellistan.*
-  För att byta till nästa låt trycker man på *Nästa*-knappen. Om nuvarande låt är sist i spellistan kommer man till den första låten i spellistan. *Denna knapp visas endast om det finns flera låtar i spellistan.*



Man trycker på *Volym*-knappen för att justera ljudvolymen.



Via *Nästa* väljer man om man vill *spela musiken i bakgrunden* eller *spara bokmärke*, se nedan.

3.2.1 Snabbspolning

Det är möjligt "snabbspola" genom att ändra positionen i förloppsindikatorn (om så är inställt). Man kan göra på följande sätt:

- Tryck på reglaget i högerkanten av förloppsindikatorn och dra höger/vänster till önskad position.
- Tryck på önskad position i förloppsindikatorns ruta.

3.2.2 Spela i bakgrunden eller spara som bokmärke


När man trycker *Nästa* i uppspelningsvyn visas följande vy:



Här väljer man mellan följande alternativ:

- **Fortsätt spela.** Då stängs uppspelningsvyn och musiken fortsätter att spelas i bakgrunden. När musiken spelas i bakgrunden och man öppnar Spelaren igen, kommer man direkt till uppspelningsvyn med den aktuella låten.
- **Spara bokmärke.** Ett bokmärke sparas (5 sekunder före nuvarande position), uppspelningsvyn stängs och ljudboken/musiken slutar att spela. Hur man fortsätter spela från bokmärket beskrivs i 3.3 *Gå till bokmärke*.


3.3 Gå till bokmärke

För att fortsätta uppspelning från ett bokmärke ska man gå till Spelarmenyn  och välja "Gå till bokmärke".

Då kommer man till 3.2 *Uppspelningsvyn* där ljudboken/musiken fortsätter att spelas på rätt position.

4. Inställningar

För göra inställningar för Spelaren ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.

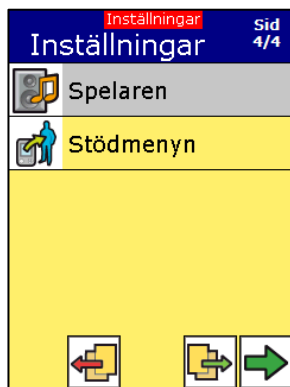

En inställningsmeny visas. För att komma till Spelarens inställningar väljer man *Spelaren* på sida 4. Vyn till höger visas.

Här kan man göra följande inställningar:

- "Artistinformation i låtlista". När det är ikryssat visas Artistinformation i 3.1 *Spellistan*.
- "Reglage för snabbspolning". När det är ikryssat finns ett reglage på förloppsindikatorn i 3.2 *Uppspelningsvyn*.



4. Praktisk användning

4.1 Lyssna med hörlurar

Det är lämpligt att använda hörlurar (eller extern högtalare) när man lyssnar på musik/ljudböcker.

Förutom att hörlurarna ger mycket bättre ljud så ger de även möjlighet att stänga av skärmen helt när man lyssnar, vilket i sin tur gör att strömförbrukningen blir väsentligt lägre samt att man utan problem kan stoppa ner Handi i fickan när man lyssnar.

Man stänger av skärmen genom att trycka på Power-knappen. Om man inte trycker på Power-knappen så släcks bakgrundsbelysningen efter 1 minut (inställbart). Skärmen är dock fortfarande aktiv och reagerar om man trycker på den.

4.2 Lyssna via den inbyggda högtalaren

Man kan lyssna på musik/ljudböcker med den inbyggda högtalaren.

Om man låter apparaten ligga orörd när musiken spelar slocknar skärmens bakgrundsbelysning automatiskt efter 1 minut (inställbart), men skärmen är då aktiv och reagerar för tryck.

Om man trycker på Power-knappen **slutar musiken att spela**. Den fortsätter sedan automatiskt när man trycker på Power-knappen igen.