


Handi 4

# Funktionsbeskrivning Album

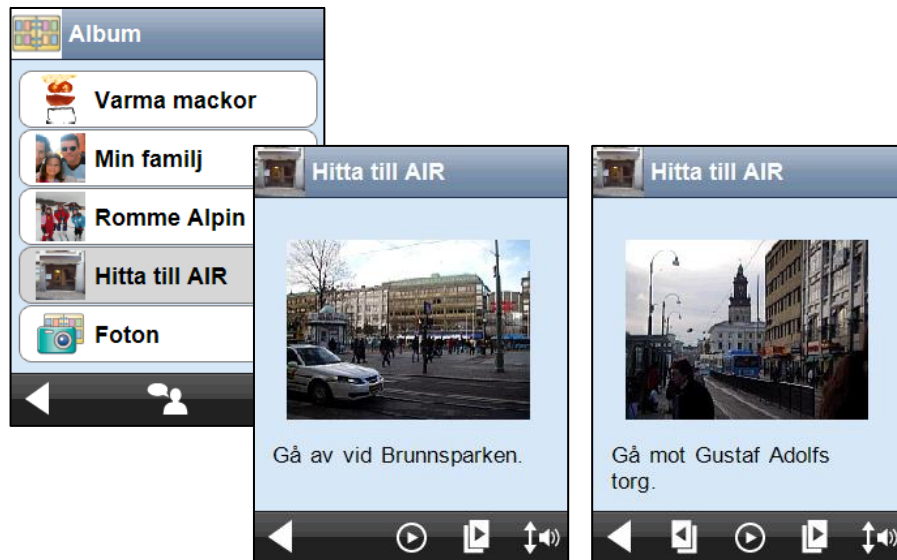

Programversion 4.4.4 eller senare

# Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda Album.....	3
2.1 Bildspelsvyn.....	3
3 Inställningar.....	4
3.1 Nytt album.....	4
3.2 Ändra album.....	5
3.3 Ta bort album.....	6
3.4 Flytta album.....	6

# 1. Inledning

I Album kan man ha bildspel med bilder och inspelat ljud. Det kan vara sociala bildspel av typen "Min familj", eller bildspel som ger en historia, t ex "Semester 2010".

Album kan också användas för mer praktiskt inriktade bildspel som recept eller arbetsinstruktioner.

Albumen skapas direkt i Handi eller via PC-programmet HandiTools.

## 2. Använda Album

När man väljer Album i Handimenyn/Startmenyn visas följande vy:



Albumen visas med namn och ev symbol i listan.


Om det inte finns några album är listan tom. Om det finns fler än 5 album visas *Bläddra*-knapparna.

Om Handi har kamera och det finns bilder i kameraalbumet visas detta sist i listan.

När man trycker på ett album blir det gråmarkerat. Namnet på albumet kan då läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen. (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)


När man trycker på *Nästa* öppnas albumet.


### 2.1 Bildspelsvyn

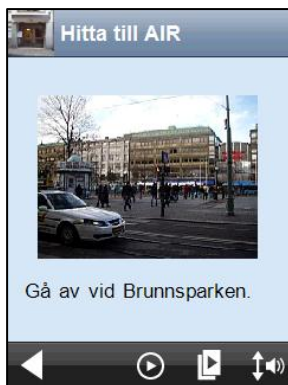


Längst upp i bildspelsvyn visas albumets namn och ev symbol.

Bilderna i bildspelet kan ha stödtext och inspelat ljud.

Om det finns inspelat ljud till den aktuella bilden visas *Play*-knappen . När man trycker på den spelas ljudet upp.

Ljudvolymen justeras med *Volym*-knappen .

Om bilden har stödtext men inget inspelat ljud (och talstöd i menyer är valt) visas *Talstöd*-knappen . När man trycker på den läses stödtexten upp.

Man kan även trycka på bilden och få dess namn uppläst, samt trycka på stödtexten och få den uppläst.

Man stegar framåt och bakåt i bildspelet med *Bläddra*-knapparna. (När man har kommit till den sista bilden kan man bara bläddra bakåt.)

Albumet stängs genom att trycka på *Backa*.

## 3. Inställningar


För att redigera eller skapa nya album ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



För att komma till inställningarna för Album bläddrar man till sidan 2 och väljer Album. Redigeringsvyn till höger visas.

Här visas albumen och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna "Ny", "Ändra", "Ta bort", "Flytta uppåt" och "Flytta nedåt". (Om inget album är markerat visas bara knappen "Ny".)


Hur man redigerar albumen beskrivs nedan.

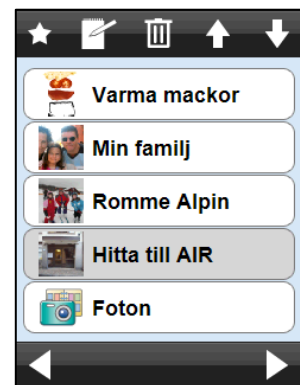

### 3.1 Nytt album



För att skapa ett nytt album trycker man på knappen "Ny" i Redigeringsvyn. En guide startar där man först får ange albumets namn och ev symbol och sedan lägga in bilder.

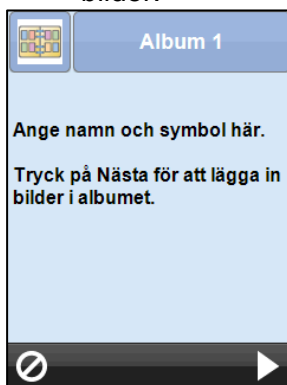


#### Namnge album

Albumet får automatiskt första lediga namn, t ex "Album 1".

Genom att trycka på knappen "Album 1" kan man ge albumet ett annat namn. Tangentbordet visas och man kan skriva in det nya namnet.

För att välja en symbol för albumet trycker man på Bild-knappen längst upp till vänster. Vyn "Välj bild" visas och man får välja en symbol från bildarkivet (eller ta en ny bild om Handi har kamera).


Man trycker på Nästa för att börja lägga in albumets bilder.

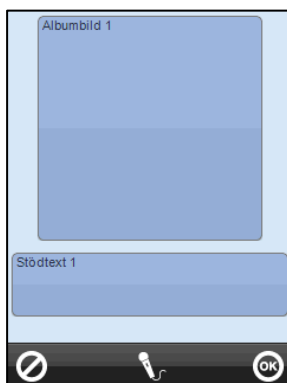


#### Lägga in bild

Här väljer man bild genom att trycka på den stora Albumbild-knappen. Vyn "Välj bild" visas och man får välja en bild från bildarkivet (eller ta en ny bild om Handi har kamera).

Man kan lägga in stödtext till bilden genom att trycka på Stödtext-knappen. Tangentbordet visas och man kan skriva in stödtexten.

Om man vill att bilden ska ha inspelat ljud trycker man på Rec-knappen  och spelar in ljudet.

Man trycker på OK för att gå vidare.

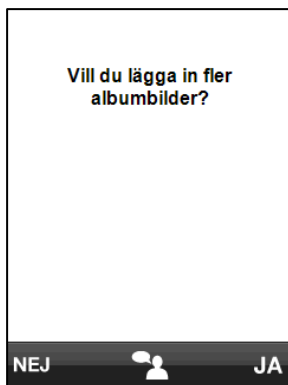

### **Vill du lägga in fler albumbilder?**


Om man svarar JA visas vyn "Lägga in bild" igen (se ovan) och man får lägga in ytterligare en bild i albumet.

Om man svarar NEJ sparas albumet och man kommer tillbaka till Redigeringsvyn.

## **3.2 Ändra album**



För att ändra ett album markerar man det i Redigeringsvyn och trycker på knappen "Ändra". En guide startar där man först kan ändra albumets namn och ev symbol och sedan kan ändra bildspelet.

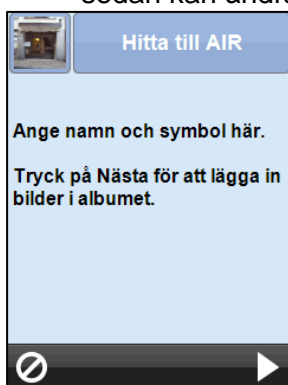

### **Namnge album**

Genom att trycka på Namn-knappen kan man ge albumet ett annat namn. Tangentbordet visas och man kan skriva in det nya namnet.

Genom att trycka på Bild-knappen kan man välja en symbol för albumet. Vyn "Välj bild" visas och man får välja en symbol från bildarkivet (eller ta en ny bild om Handi har kamera).

Man trycker på Nästa för att ändra albumets bilder.



### **Albumöversikt**

I vyn Albumöversikt kan man se hela albumets innehåll.


Varje bild visas i miniatyr, och under resp bild visas dess nummer i listan och ev stödtext.

Överst i vyn finns det en knapprad med redigeringsfunktionerna "Ny", "Ändra", "Ta bort", "Flytta till vänster" och "Flytta till höger". (Om ingen albumbild är markerat visas bara knappen "Ny".)

Hur man redigerar albumbilderna beskrivs nedan.



**Ny albumbild.** För att lägga in en ny albumbild ska man trycka på Ny-knappen. Då öppnas samma vy som i 3.1 Nytt album ovan.

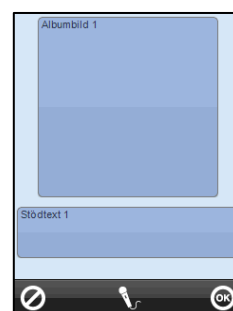



**Ändra albumbild.** För att ändra en albumbild ska man markera den och sen trycka på *Ändra*-knappen. Då öppnas samma vy som i 3.1 *Nytt album* ovan.



**Ta bort albumbild.** För att ta bort en albumbild markerar man den och trycker på *Ta bort*-knappen. Meddelandet "Vill du ta bort bilden?" visas, och om man svarar JA tas bilden bort.



**Flytta albumbild.** För att flytta en albumbild framåt eller bakåt i bildspelet markerar man den och trycker på knappen "Flytta åt vänster" eller "Flytta till höger".



### 3.3 Ta bort album



För att ta bort ett album markerar man det i Redigeringsvyn och trycker på *Ta bort*-knappen. Meddelandet "Vill du ta bort albumet X?" visas, och om man svarar JA tas albumet bort.

### 3.4 Flytta album



För att ändra ordningen bland albumen markerar man önskat album i Redigeringsvyn och trycker på knappen "Flytta uppåt" eller "Flytta nedåt".

