

Handi 4

Funktionsbeskrivning

Användare



Programversion 4.2.0 eller senare


1. Inledning

Funktionen Användare gör att användaren kan visa en vy med sitt namn och en bild på sig själv.

Namn och bild på användaren läggs in via Handi eller PC-programmet HandiTools.

2. Använda Användare

När man väljer Användare i Handimenyn/Startmenyn visas följande vy.

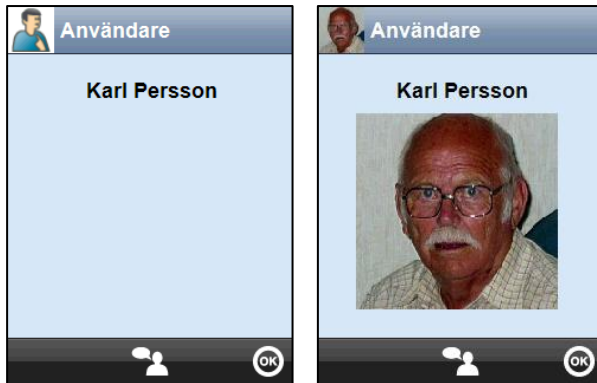

Om man trycker på *Talstöd*-knappen läses namnet upp med talsyntes.

Hur namnet skrivs in beskrivs i nästa kapitel.

3. Inställningar

För göra inställningar för Användare ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Användares inställningar väljer man *Användare* på sida 3. Vyn till höger visas.

Här kan man namnge Handi samt välja användarbild.

När man trycker på Namn-knappen visas tangentbordet och man får skriva in ett namn.

När man trycker på Bild-knappen visas vyn "Välj bild" och man får välja önskad bild (eller ta en ny bild om Handi har kamera).

