


Handi 4

# Funktionsbeskrivning Kamera

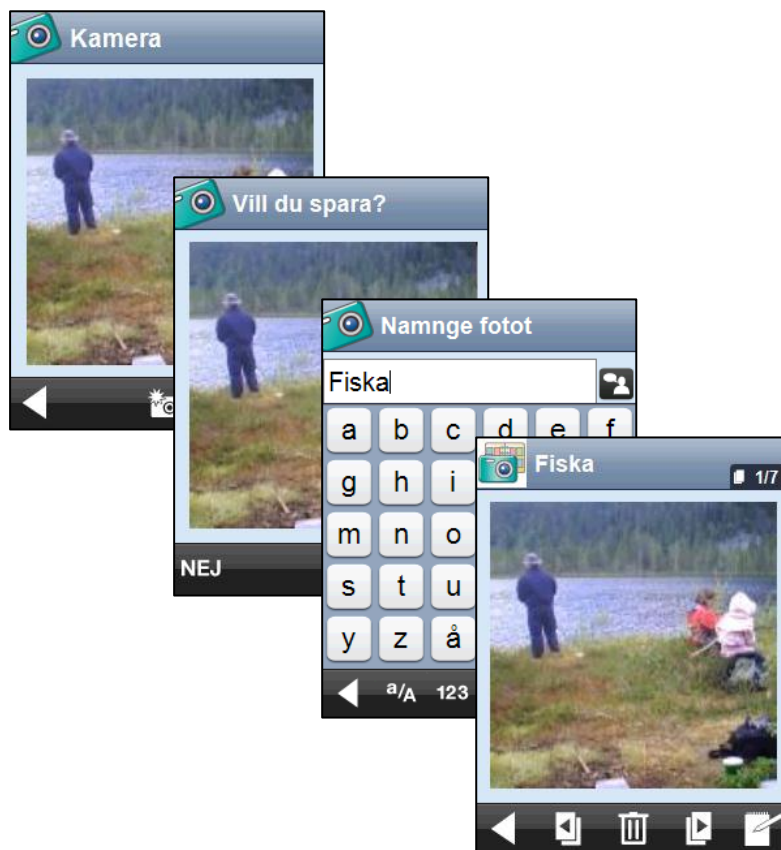

Programversion 4.2.0 eller senare

# Innehållsförteckning

|  |   |
|--|---|
| 1. Inledning.....                                | 3 |
| 2. Använda Kamera.....                           | 3 |
| 2.1 Fotografera från Handimenyn/Startmenyn ..... | 3 |
| 2.2 Fotografera från vyn "Välj bild" .....       | 4 |
| 3 Titta på bilderna i albumet Foton .....        | 4 |
| 4 Inställningar.....                             | 5 |
| 4.1 Namnge fotot .....                           | 5 |
| 4.2 Kategori i Bildarkiv .....                   | 5 |
| 4.3 Kamera-knapp i Välj bild-vyn .....           | 6 |
| 4.4 Hemknappen som avtryckare.....               | 6 |
| 5 Kamera i HandiTools.....                       | 6 |
| 6 Tips på användning av Kameran .....            | 6 |

# 1. Inledning

Funktionen *Kamera* är en förenklad version av apparatens inbyggda kamera.

Med *Kamera* kan man ta albumbilder och bilder till aktiviteter, timers, kontakter mm.

Med *Kamera* kan man två typer av bilder:

- Foton. Sparas i originalstorlek och visas i Album.
- Bildarkiv. Sparas i två storlekar i bildarkivet och visas i Välj bild-vyn där de kan användas till aktiviteter, timers kontakter mm.

När man startar *Kamera* från Handimenyn/Startmenyn sparas bilden både i Foton och i bildarkivet.

Bilder som sparats i Foton kan överföras till PC via PC-programmet HandiTools.

## 2. Använda Kamera


Kameran kan startas från Handimenyn/Startmenyn och vyn "Välj bild", dvs vyn där man väljer bilder för aktiviteter, kontakter mm.

Beroende på varifrån man startar är det lite olika funktionalitet, vilken beskrivs nedan.

### 2.1 Fotografera från Handimenyn/Startmenyn

När man startar kameran via Handimenyn/Startmenyn får man gå igenom följande guide.


*Sökarvyn*

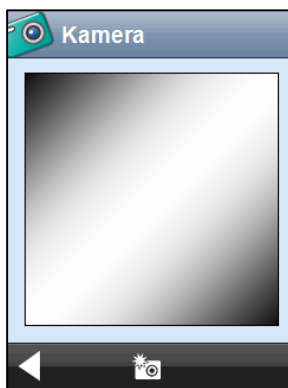


*Vill du spara?*



*Namnge foto*

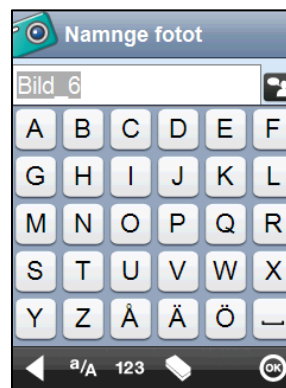

I *Sökarvyn* visas en rörlig sökarbild. När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden. (Man kan även trycka på Hemknappen, se Handboken, om så är inställt.)

I vyn *Vill du spara?* visas den bild man har tagit.


I vyn *Namnge foto* ger man bilden ett namn. Ett namn har redan angivits automatiskt, och detta kan man antingen behålla eller skriva in ett eget. Det är inställbart om denna vy ska visas.

När man trycker på *OK* sparas bilden i Album-mappen Foton och i kategorin Kamerabilder i bildarkivet.


Hur man senare tittar på bilden beskrivs i kapitel 3 *Titta på bilderna*.

## 2.2 Fotografera från vyn "Välj bild"


Vyn "Välj bild" visas i många Handi-funktioner i olika sammanhang, t ex när man ska välja bild till en aktivitet eller kontakt.

I vyn "Välj bild" kan man dels välja befintliga bilder i bildarkivet men även ta nya foton via Kamera-knappen  längst ned.


Då visas följande guide:

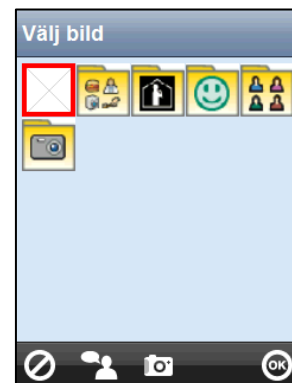


Sökarvyn

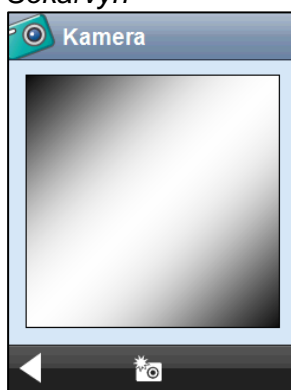

Vill du spara?

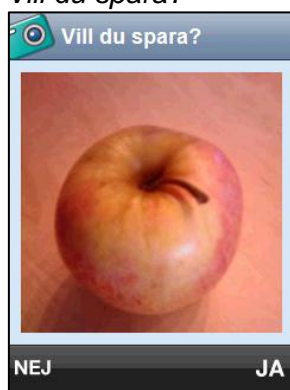

I Sökarvyn visas en rörlig sökarbild, När man trycker på avtryckarknappen  tas bilden.

I vyn *Vill du spara?* visas den bild man har tagit.

När man trycker på *JA* får bilden automatiskt ett namn och sparas. Var den sparas beror på i vilken Handi-funktion man är.

## 3 Titta på bilderna i albumet Foton

De bilder som har fotograferats via Handimenyn/Startmenyn visas i albumet *Foton*.



Det senast tagna fotot visas först.

Man bläddrar mellan bilderna via *Bläddra*-knapparna.



För ta bort ett foto trycker man på *Ta bort*-knappen.



För att byta namn på ett foto trycker man på *Ändra*-knappen. Samma vy som i *Namnge foto* visas. (Ändra-knappen visas endast om det är inställt att man ska kunna namnge foto.)

## 4 Inställningar

För att ändra inställningarna för Kamera ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.




En inställningsmeny visas.

För att komma till Kameras inställningar väljer man Kamera på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man göra följande inställningar:


- Namnge fotot.
- Kategori i Bildarkiv.
- Kamera-knapp i Välj bild-vyn.
- Hemknappen som avtryckare

De olika inställningarna beskrivs nedan.

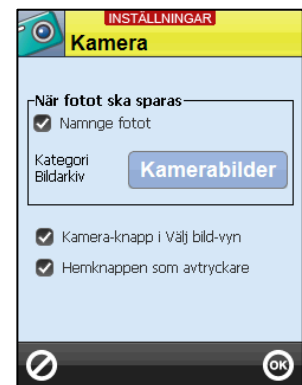

### 4.1 Namnge fotot

När "Namnge foto" är ikryssat kan man ge fotot ett namn. Vyn nedan visas då efter man har valt att spara fotot i kapitel 2.1 *Fotografera från Handimenyn/Startmenyn*.

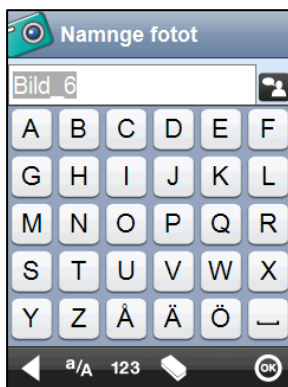


### 4.2 Kategori i Bildarkiv

När ett nytt foto sparas i bildarkivet läggs det automatiskt i den kategori som anges här.

Kategorin *Kamerabilder* ingår i installationen och är vald från början.

Om man vill ändra så att fotona sparas i någon annan kategori trycker man på Kategori-knappen, då öppnas vyn "Välj kategori" och bildarkivets översta nivå visas och lämplig kategori kan väljas.

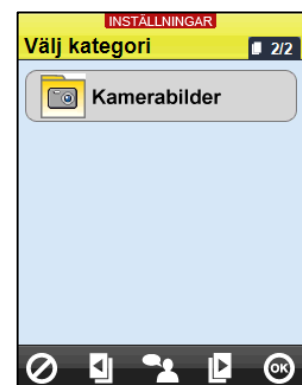


### 4.3 Kamera-knapp i Välj bild-vyn

När "Kamera-knapp i Välj bild-vyn" är ikryssat visas kameraknappen



i knappraden i Välj bild-vyn.

Om denna inställning inte är vald kan man endast fotografera via Handimenyn/Startmenyn.

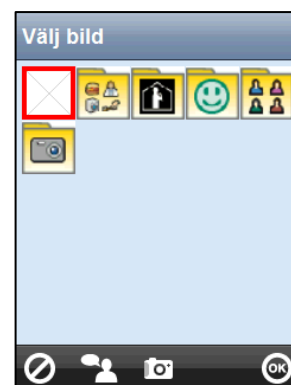

### 4.4 Hemknappen som avtryckare

När "Hemknappen som avtryckare" är ikryssat kan man trycka på Hemknappen (se *Handboken*) när man ska ta fotografera.

Det innebär också att Hemknappen inte fungerar som vanligt i sökarvyn, dvs man kan då inte aktivera den Handi-funktion som valts som autostart genom att trycka på Hemknappen.

## 5 Kamera i HandiTools

I HandiTools version 2 kan man se de bilder som tagits med kameran. De som tagits för bildarkivet finns under fliken Bildarkiv, och albumbilderna finns under fliken Album.

De bilder som ligger i Album kan importeras till PC:n och användas i andra sammanhang.

## 6 Tips på användning av Kameran

- Kameran i Handi har liksom de flesta inbyggda kameror inte särskilt bra prestanda. Bilderna blir lite suddiga, men framförallt har den begränsad ljuskänslighet. Det är alltså viktigt att ha bra ljus när man fotograferar.
- Om man vill ta så bra bilder som möjligt för att använda i bildarkivet, t ex på personer i Kontakter, så kan man spara bilderna i Album och sedan med HandiTools beskära och redigera bilden innan den läggs i bildarkivet. Det är betydligt krångligare än att ta bilden direkt i Välja bild-vyn, men det blir väsentligt bättre bilder.