


Handi 4

# Funktionsbeskrivning

## Röstanteckningar

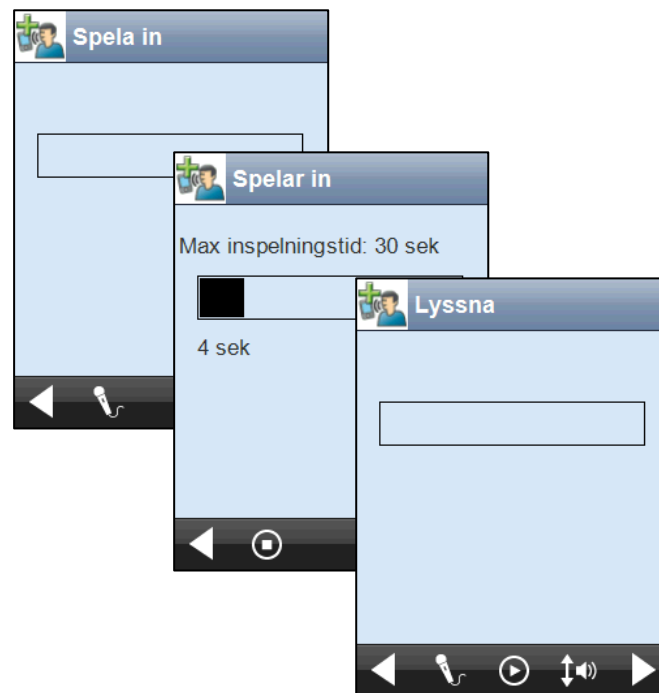

Programversion 4.4.4 eller senare

# Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Använda Röstanteckningar.....	3
2.1 Spela in ny röstanteckning .....	3
2.2 Lyssna på röstanteckning .....	4
2.2.1 Öppna och lyssna.....	4
2.2.1 Lyssna direkt i listan .....	5
2.3 Ta bort en röstanteckning .....	5
3. Inställningar.....	6
3.1 Namnförslag .....	6

# 1. Inledning

Med Röstanteckningar talar man in information. Det är enkelt att spara och öppna röstanteckningar.

Röstanteckningar ställer inget krav på förmåga att skriva, men funktionen kan också användas som ett väldigt enkelt och snabbt sätt att lägga in information även om man kan skriva.

## 2. Använda Röstanteckningar

När man väljer Röstanteckningar i Handimenyn/Startmenyn visas följande vy:



Röstanteckningarna visas med namn och/eller symbol i listan.

Om det inte finns några röstanteckningar är listan tom. Om det finns fler än 5 röstanteckningar visas *Bläddra*-knapparna.

När man trycker på en röstanteckning blir den gråmarkerad. Namnet på röstanteckningen kan läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen. (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)


Via knappen "Ny röstanteckning"  spelar man in nya röstanteckningar, se 2.1 *Spela in ny röstanteckning*.

Hur man lyssnar på befintliga röstanteckningar beskrivs i 2.2 *Lyssna på röstanteckning*.


### 2.1 Spela in ny röstanteckning




För att spela in ny röstanteckning trycker man på knappen "Ny". Inspelingsvyn visas.

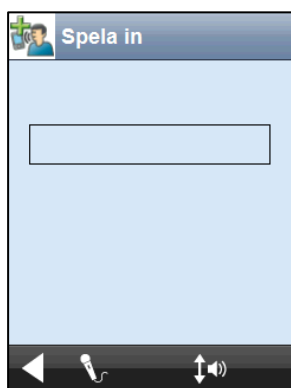


För bästa ljudkvalitet ska man tala direkt in i mikrofonen på ca 10 cm avstånd. I Handboken visas var mikrofonen sitter på apparaten.


För att starta inspelningen trycker man på *Spela in*-knappen .

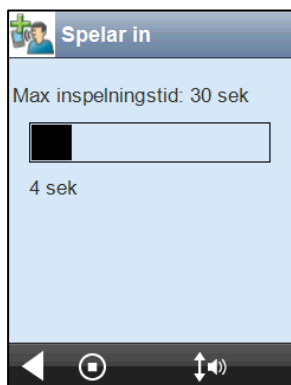



När inspelning pågår anges max inspelningstid överst.


Inspelad tid visas i den liggande stapeln. Under stapeln anges tiden i sekunder och/eller minuter.

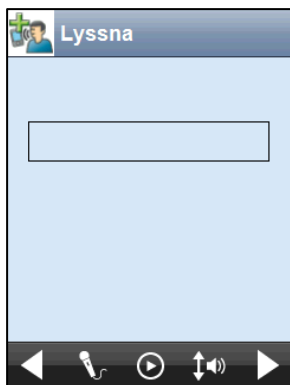När man är klar med inspelningen trycker man på *Stopp*-knappen .




Man kan sedan lyssna på det som spelats in genom att trycka på *Play*-knappen .

Är man inte nöjd spelar man in igen genom att trycka på .

Volymen kan justeras i sex steg. Man kommer åt inställningen av volymen genom att trycka på *Volym*-knappen .

När man är nöjd med inspelningen trycker man på *Nästa*.

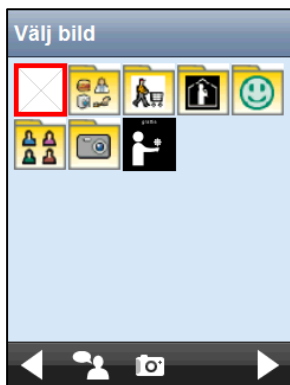

Efter att inspelningen är klar får man ge röstanteckningen en bild och ett namn. Det är inställbart vilka av vyerna "Välj bild" och "Namnge ljudet" som ska visas. Om ingen av dem är vald att visas får ljudet automatiskt ett namn.


I "Namnge ljudet" har ett namn fyllts i automatiskt, och man kan välja det eller skriva in ett eget namn.

När man trycker på OK sparas röstanteckningen och läggs in först i listan med röstanteckningar.

## 2.2 Lyssna på röstanteckning

För att lyssna på befintliga röstanteckningar kan man göra på två sätt.

### 2.2.1 Öppna och lyssna

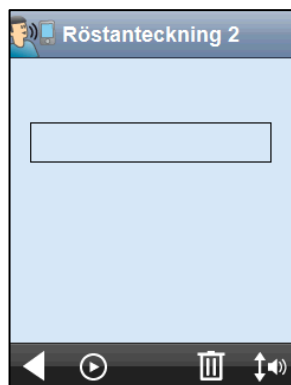

För att lyssna på en röstanteckning markerar man den i listan med Röstanteckningar och trycker på *Nästa*.


I uppspelningsvyn lyssnar man på det inspelade meddelandet genom att trycka på


*Play*-knappen .

## 2.2.1 Lyssna direkt i listan




Det går att lyssna på röstanteckningarna direkt i listan när inställningen "Lyssna direkt i listan" är vald.


Då visas en *Play*-knapp  när en röstanteckning är markerad i listan.

När man trycker på *Play*-knappen spelas röstanteckningen upp, och en *Stopp*-knapp  visas istället för *Play*-knappen.

(När inställningen är "Lyssna direkt i listan" kan inte *Talstöd*-knappen visas.)

## 2.3 Ta bort en röstanteckning

För att ta bort en röstanteckning markerar man den i listan i Röstanteckningar, trycker på *Nästa* och sen på knappen . Man får bekräfta att man vill ta bort röstanteckningen genom att trycka på Ja. Röstanteckningen tas bort från listan.

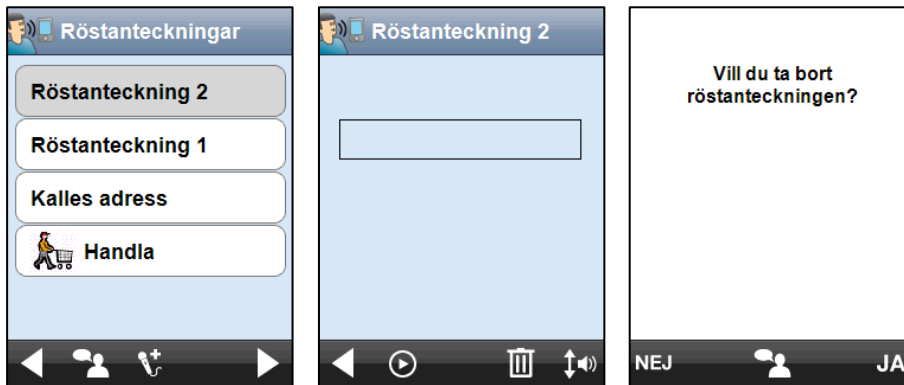

## 3. Inställningar

För att göra inställningar för Röstanteckningar ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



En inställningsmeny visas.

För att komma till Röstanteckningars inställningar väljer man Röstanteckningar på sida 2. Vyn till höger visas.

Här kan man göra följande inställningar:

- Om "Välj bild" och "Namnge ljudet" ska visas när röstanteckningen ska sparas.
- Namnförslag (beskrivs nedan).
- Max inspelningstid (30 sek eller 5 min)
- Om man ska kunna lyssna på röstanteckningarna direkt i listan



### 3.1 Namnförslag



Med "namnförslag" menas vilket namn som ska föreslås i vyn "Namnge ljudet". Ordet "Röstanteckning" är default.

När man trycker på knappen "Namnförslag" i *Inställningar|Röstanteckningar* visas tangentbordet (se vyn till vänster) och man får skriva in ett annat ord än "Röstanteckning", t ex "Tal".

När man trycker på OK visas det nya namnförslaget i *Inställningar|Röstanteckningar* (se vyn till höger).



För att ändra tillbaka till det ursprungliga namnförslaget "Röstanteckning" öppnar man "Namnförslag", suddar bort det egna namnet och trycker på OK.