

Handi 4

Funktionsbeskrivning SMS



Programversion 4.8.0 eller senare

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Använda SMS	3
2.1 Kontaktlistan	3
2.2 Skriva nytt SMS	4
2.3 Inkomna SMS	7
2.4 Sparade SMS	9
2.5 Skickade SMS	9
2.6 Vidarebefordra SMS	10
2.7 Utkast	10
2.8 Grupp-SMS.....	11
2.9 Spara som ny kontakt	12
2.10 Bild-SMS.....	13
2.11 SMS med telefonnummer	15
3 Inställningar.....	16
3.1 Kontaktlista	16
3.2 Ljud och signaler.....	17
3.3 SMS-inställningar.....	17
3.4 Bild-SMS.....	19
3.5 Basmeddelanden	20
3.6 Rensa meddelanden.....	21
3.7 SIM-kontakter	22
3.8 Testa kommunikation.....	23
3.9 Talstöd i tangentbordet	23
3.10 Tangentbord	24

1 Inledning

Via funktionen *SMS* kan man skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen gentemot en vanlig mobiltelefon är att det är mycket enkelt både att välja mottagare och att skriva in texten, bl a genom att använda förskrivna s k *basmeddelanden*. Dessutom kan man få talstöd både när man skriver egen text och när man läser mottagna meddelanden.

Det är möjligt att göra inställningar för *Bild-SMS*:

- Man kan ställa in om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Man kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes.
- Valbart tangentbord. Man kan ställa in om tangentbordet ska visa bildarkivet eller bildkartan i Bildsamtal. Finessen med att använda bildkarta är att den är anpassad för kommunikation, men också att man kan ha längre bildtexter till varje bild. När man skriver SMS kan man alltså lägga in en hel mening genom att bara trycka på en bild.

För bästa förståelse av funktionen *SMS* rekommenderas kännedom om Handi-funktionen *Kontakter*, se *Bruksanvisning Kontakter (med telefon)*.

2 Använda SMS

2.1 Kontaktlistan



Här visas användarens kontaktlista (bara de kontakter som har mobilnummer angivet) plus ikonen "Nytt nummer".


Kontakter och grupper visas i den ordning som definierats i Handi-funktionen *Kontakter*.


När man trycker på en kontakt eller grupp blir den gråmarkerad. Namnet på kontakten/gruppen kan då läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen. (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)

För att skicka SMS till en kontakt markerar man den och trycker på *Nästa*, se 2.2 *Skriva nytt SMS*.

För att stega ned i en grupp markerar man den och trycker på *Nästa*.

Man väljer kontakt genom att markera och trycka på *Nästa*.

För att komma tillbaka till översta nivån trycker man på *Tillbaka*-knappen .

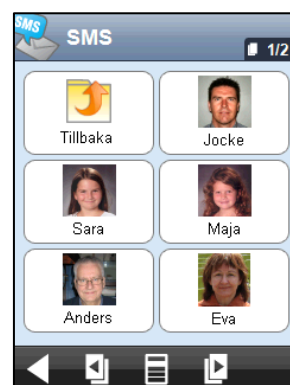

Genom att trycka på *Meny*-knappen kommer man till SMS-menyn.

Här kan man se inkomna, sparade, skickade och ej skickade meddelanden (utkast).

På raden för *Inkomna* visas antalet olästa meddelanden inom parentes.

Om listan för *Inkomna*, *Sparade*, *Skickade* eller *Utkast* är tom är den raden gråad i menyn.

Via *Grupp-SMS* kan man skicka SMS till flera mottagare samtidigt.

Funktionerna beskrivs i separata kapitel nedan.



2.2 Skriva nytt SMS

2.2.1 Skriva till definierad kontakt



För att skriva till en definierad kontakt väljer man önskad kontakt i kontaktlistan och trycker på *Nästa*.

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via *Talstöd*-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på *Nästa* för att gå vidare.

I vyn "Skicka meddelande?" trycker man på *OK* för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick iväg eller inte.

Om meddelandet inte kunde skickas visas ett felmeddelande.

Meddelandet läggs då i mappen *Utkast* som man kommer till via SMS-menyn, se kapitel 2.7 *Utkast*.

Eftersom meddelandet ligger i *Utkast* kan man göra ett nytt försök att skicka det senare.



2.2.2 Skriva till nytt nummer



För att skriva till ett nytt nummer väljer man "Nytt nummer" i kontaktlistan och trycker på *Nästa*. Nu får man skriva in numret och sedan trycka på *Nästa*.

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via *Talstöd*-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på *Nästa* för att gå vidare.


I vyn "Skicka meddelande?" trycker man på *OK* för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick iväg eller inte.


2.2.3 Använda basmeddelande

För att göra det ännu enklare och snabbare att skriva meddelanden kan man använda s k *basmeddelanden*.



Man väljer önskat basmeddelande och går sedan vidare med *Nästa*. Hur man skapar basmeddelanden beskrivs i kapitel 3.5 *Basmeddelanden*.

Texten kan redigeras i vyn "Skicka meddelande?" genom att man trycker på  och då får upp tangentbordet. Det går alltså att ha "halvfärdiga" basmeddelanden, t ex "Jag är hemma hos", och skriva färdigt dem först när de ska skickas. Se exemplet nedan.

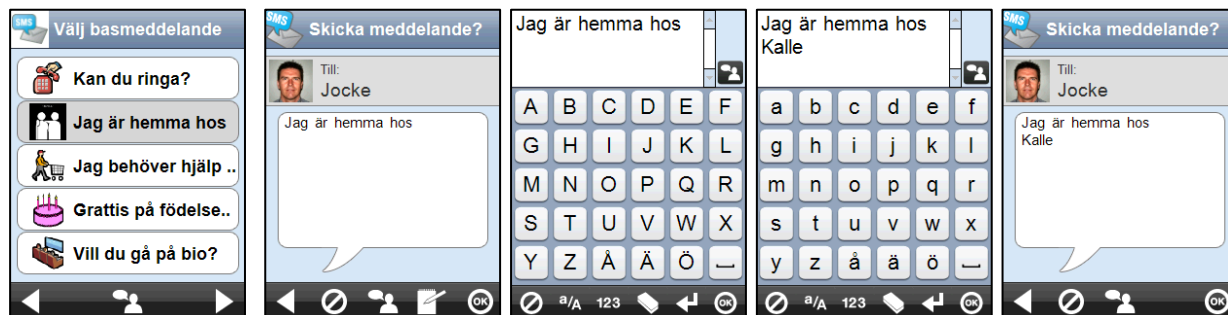


2.2.4 Använda smileys

Man kan använda smileys i SMS.


Smileys, eller "emotional icons", är symboler som används i SMS, mail, chatt etc för att uttrycka olika slags känslor. Man "ritar" smileys med hjälp av tecken på tangentbordet, t ex :) betyder "glad". För att se vad symbolen föreställer får man betrakta den med huvudet lutande i 90 graders vinkel åt vänster.

I Handi kan man "rita" de vanligaste smilisarna via tangentbordets 123-läge. Enklast är dock att välja dem via smileyknappen som visas till höger om tangentbordet. Det är inställbart om smileyknappen ska visas.

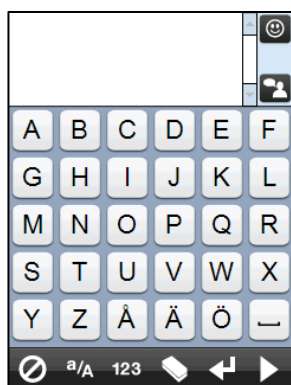

När man trycker på smileyknappen 😊 i tangentbordet visas smileyvyn, se vyn till höger.

För att komma tillbaka till föregående vy trycker man på **a/A** eller **123**.

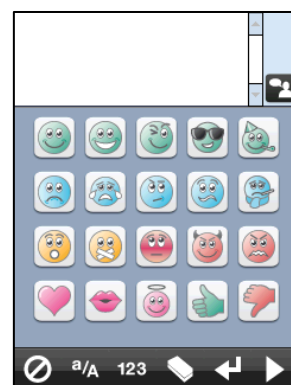


Även i mottagna meddelanden visas smileybilder, förutsatt att det är någon av teckenkombinationerna i listan nedan som står i meddelandet.

Förteckning över smileys i Handi

😊 Glad	:)	😬 Skeptisk	:/	😡 Arg	:[
😄 Skrattar	:D	😞 Förvirrad	:-/	❤️ Hjärta	:-[
😉 Blinkar	:D	😵 Sjuk	:-S	💋 Puss	<3
😎 Cool	:)	🤔 Sjuk	+(💋 Puss	.*
😭 Fira	;-)	😞 Åh nej!	+o(👼 Ängel	:-*
😞 Ledsen	B)	😞 Förtegen	:o	👼 Ängel	o:)
😭 Gråter	B-)	😞 Generad	:-o	👍 Ja	o:-)
	<:o)	😞 Djävul	:X	👎 Nej	(Y)
	:(:-X		
	:-(;(;-(:\$		(N)
			>:)		
			>:-)		

OBS! Smileybilderna visas bara i de vyer där meddelandet är öppnat. I listorna *Inkomna*, *Sparade*, *Skickade* och *Utkast* visas teckenkombinationen.

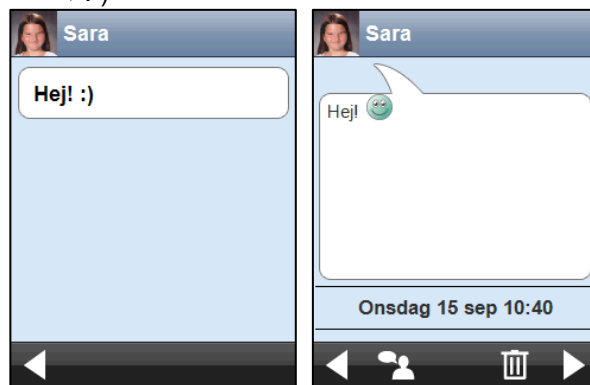

2.3 Inkomna SMS

2.3.1 Nya inkomna SMS

När Handi tar emot SMS visas ett meddelande om nya inkomna SMS. Om man har ett nytt SMS visas kontakten eller numret i meddelandet. Om man har flera nya SMS visas antalet SMS.


Ett nytt SMS från känd kontakt



Ett nytt SMS från ej definierad kontakt



Flera nya SMS

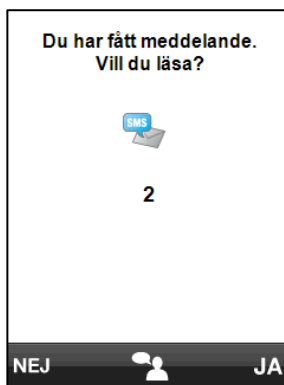


Om man trycker på *JA* kommer man till Inkomna-vyn.

Om man trycker på *NEJ* visas den funktion där man var innan. Då kan man välja att titta på nya inkomna meddelanden senare, se nedan.

2.3.2 Inkomna-vyn

Man kommer till Inkomna-vyn när man väljer *JA* i *Nya inkomna SMS* (se ovan). För att senare se inkomna meddelanden går man till SMS-menyn och väljer *Inkomna*.

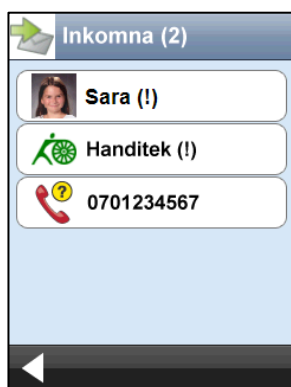

I denna vy visas inkomna meddelanden i kronologisk ordning med det nyaste meddelandet först.

I rubriken anges antalet **olästa** meddelanden inom parentes.

Om meddelandet kommer från en känd kontakt visas namnet och ev bild. Om kontakten är okänd visas numret.

De meddelanden som är olästa är märkta med **(!)**.

För att läsa meddelandet markerar man det och går vidare med *Nästa*.

Meddelandet och den tid det blev mottaget visas.


När man trycker på *Talstöd*-knappen läses meddelandet upp av talsyntesen.

För att ta bort meddelandet trycker man på *Ta bort*-knappen .

För att få ytterligare stöd i hanteringen av meddelandet trycker man på *Nästa* och går vidare. Beroende på om inställningen är "Spara när SMS besvarats" eller "Ange om SMS ska sparas" visas olika vyer:




Inställning "Spara när SMS besvarats"

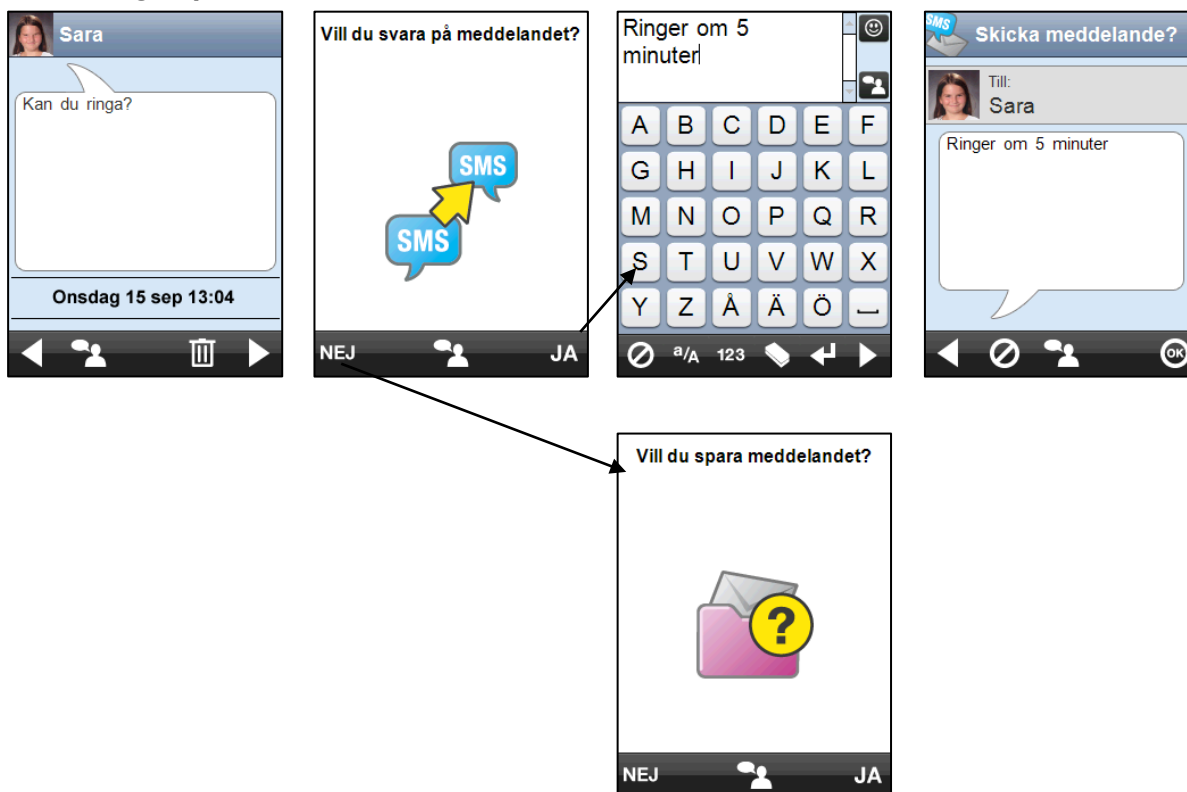

När inställningen är "Spara när SMS besvarats" och man trycker på *Nästa* visas "Vill du svara på meddelandet?". Om man trycker på JA kommer man direkt till 2.2 *Skriva nytt SMS*. Kontakt/mobilnummer är då förvalt.

Om man trycker på NEJ visas "Vill du spara meddelandet?". Trycker man då på JA sparas meddelandet, dvs flyttas till *Sparade*. Om man trycker på NEJ händer ingenting med meddelandet – det ligger kvar i *Inkomna*.

Inställning "Ange om SMS ska sparas"

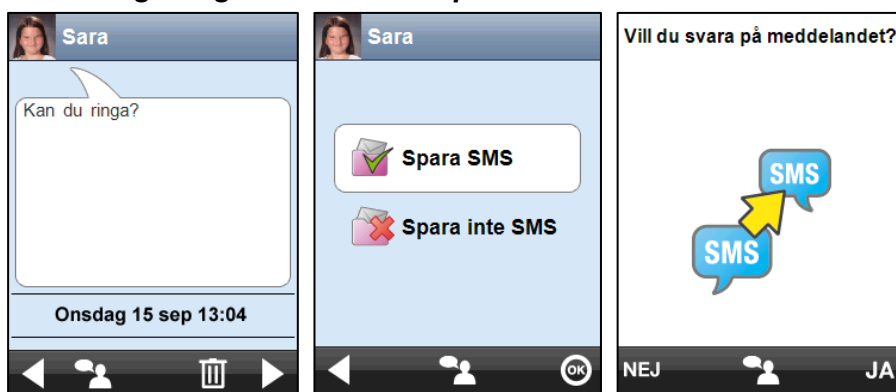

När inställningen är "Ange om SMS ska sparas" och man trycker på *Nästa* får man välja om meddelandet ska sparas eller inte. När man trycker på *OK* tas meddelandet bort från *Inkomna*. Om man har valt att spara meddelandet läggs det i mappen *Sparade*, annars raderas det.

Sedan visas "Vill du spara på meddelandet?" Om man trycker på *JA* kommer man direkt till 2.2 *Skriva nytt SMS*. Kontakt/telefonnummer är då förvalt. Trycker man på *NEJ* kommer man tillbaka till Inkomna-vyn.


2.4 Sparade SMS

För att se sparade meddelanden går man till SMS-menyn och väljer *Sparade*.



I Sparade-vyn visas de avsändare som det finns sparade meddelanden från.

Man väljer avsändare genom att markera den och trycka på *Nästa*. Här visas sparade meddelanden från den valda avsändaren i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först.

Ta bort-knappen  visas när ett meddelande är markerat. Genom att trycka på Ta bort-knappen kan man radera meddelandet.

Man öppnar ett meddelande genom att markera det och trycka på *Nästa*.

Meddelandet visas i samma vy som inkomna meddelanden, se 2.3.2 *Inkomna-vyn*. Om man trycker på *Nästa* får man frågan om man vill svara på meddelandet.


2.5 Skickade SMS

För att se skickade meddelanden går man till SMS-menyn och väljer *Skickade*.



I Skickade-vyn visas de mottagare som man har skickat meddelanden till.

Man väljer mottagare genom att markera den och trycka på *Nästa*. Här visas meddelanden till den valda mottagaren i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först.

Ta bort-knappen  visas när ett meddelande är markerat. Genom att trycka på *Ta bort*-knappen kan man radera meddelandet.

Meddelandet visas i samma vy som inkomna meddelanden, se 2.3.2 *Inkomna-vyn*.

För att skicka meddelandet igen till en annan person trycker man på *Nästa*, se kap 2.6 *Vidarebefordra SMS* nedan.

2.6 Vidarebefordra SMS

Om man vill vidarebefordra ett redan skickat meddelande får man börja med att öppna det, se kap 2.5 *Skickade SMS* ovan. När man trycker på *Nästa* visas frågan "Vill du skicka meddelandet igen?".



Om man svarar *JA* kommer man vidare till vyn "Välj kontakt". Här får man bestämma vem meddelandet ska skickas till. När man har valt mottagare klickar man på *Nästa*, och sedan på *OK* i vyn "Skicka meddelande". Meddelandet skickas nu.

2.7 Utkast

I Utkast finns meddelanden som inte har kunnat skickas av olika skäl. För att se dessa meddelanden går man till SMS-menyn och väljer *Utkast*.




Meddelandena visas i kronologisk ordning, med det nyast skrivna meddelandet först. Man öppnar det meddelande man vill skicka genom att markera det och trycka på *Nästa*. Meddelandet visas i samma vy som i 2.2 *Skriva nytt SMS*.

När man trycker på *OK* skickas meddelandet. Man får en bekräftelse på om meddelandet kunde skickas eller inte.

2.8 Grupp-SMS

Genom att välja "Grupp-SMS" i SMS-menyn kan man skicka ett SMS till flera personer samtidigt.



Lägg till mottagare genom att trycka på Ny-knappen . Vyn "Välj kontakt" visas, välj önskad kontakt i kontaktlistan eller välj "Nytt nummer" och tryck på OK. Den valda kontakten/telefonnumret läggs till i sändlistan.

Tryck på Ny-knappen igen för att lägga till ytterligare en mottagare till sändlistan. När alla mottagare finns med i sändlistan trycker du på Nästa för att gå vidare och skriva meddelandet.

2.8.1 Skriva meddelandet



Beroende på om man har valt inställningen "Visa basmeddelanden vid nytt SMS" visas olika vyer för inmatning av meddelandet. Välj ett basmeddelande eller skriv ett nytt meddelande. När texten är klar trycker man på Nästa för att gå vidare.

I vyn "Skicka meddelande?" visas den översta kontakten i sändlistan som mottagare. Om man trycker på +-knappen visas hela sändlistan, se 2.8.2 Redigera sändlistan nedan. Tryck på OK för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick iväg eller inte.


Om meddelandet inte kunde skickas till någon av mottagarna visas ett felmeddelande.


Meddelandet läggs då i mappen *Utkast* som man kommer till via SMS-menyn, se kapitel 2.7 *Utkast*.


Eftersom meddelandet ligger i *Utkast* kan man göra ett nytt försök att skicka det senare.




2.8.2 Redigera sändlistan

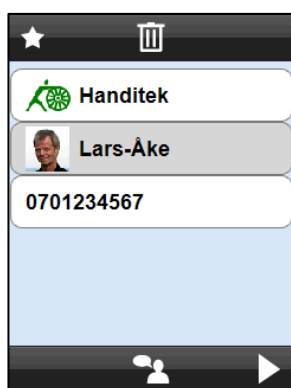


Via *Ny*-knappen  lägger man till en ny mottagare till sändlistan.

För att ta bort en kontakt/telefonnummer från sändlistan, markera den och tryck sedan på *Ta bort*-knappen .

2.9 Spara som ny kontakt

När en ej definierad kontakt, dvs ett nummer, markeras i vyerna *Inkomna*, *Sparade*, *Skickade* och *Utkast* visas knappen *Ny kontakt* , se exemplet till höger.


Genom att trycka på *Ny kontakt* kan man spara numret som en kontakt.

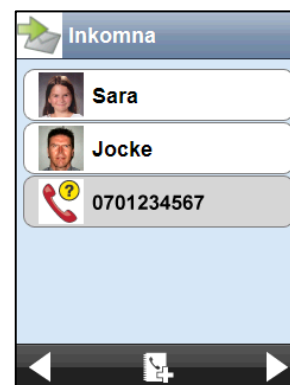


Den nya kontakten läggs in via vyn "Definiera kontakt".

Mobilnumret är redan inlagt.

När man trycker på *OK* sparas kontakten.

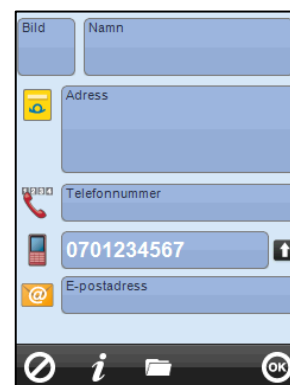

Textläge

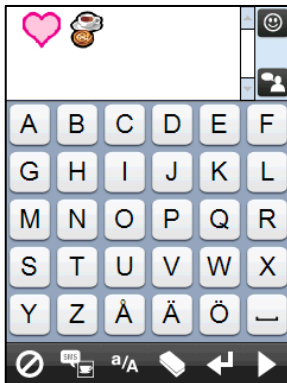


Här skriver man med bokstäver och siffror på vanligt sätt.
(Förutom att **a/A** och **123** ligger på samma plats. Man måste alltså byta mellan gemener, versaler och siffror/tecken via samma knapp.)

Man trycker på *Bild*-knappen  för att komma tillbaka till bildläget.

Man trycker på *Nästa* för att gå vidare till [2.10.2 Skicka bild-SMS](#).

2.10.2 Skicka bild-SMS

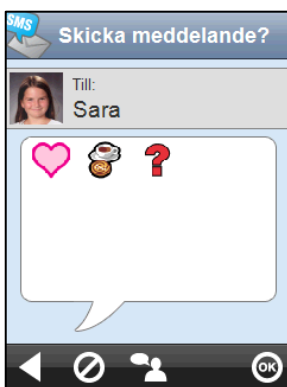

Meddelandet visas med bilder och ev text i denna vy. Det skickas som ett vanligt textmeddelande när man trycker på *OK*.

För övrig funktionalitet, se [2.2 Skriva nytt SMS](#).

2.10.3 Läsa bild-SMS

Om inställningen är "Läs SMS med bilder" kan bilder visas i meddelandet.




Om det finns en bild som exakt motsvarar ett ord i meddelandet visas bilden istället för ordet.

För övrig funktionalitet, se 2.3.2 *Inkomna-vyn*.

2.11 SMS med telefonnummer



Om ett mottaget SMS innehåller ett telefonnummer så visas det som en "länk" (numret måste innehålla minst 7 sammanhängande siffror inkl. ev. mellanslag eller bindestreck). Det är inställbart om telefonnummer ska visas som länk, se 3.3.5 *Visa nummer som länk*.

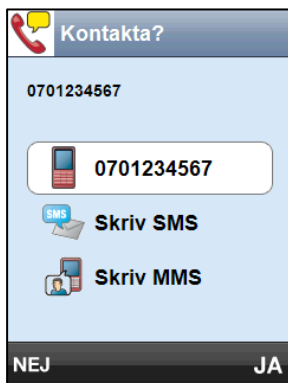

Trycker man på länken kommer man till vyn "Kontakta?", och därifrån kan man ringa, skicka SMS eller MMS till numret i den mottagna länken.

3 Inställningar



För att göra inställningar för SMS ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se Handboken.



En inställningsmeny visas.

För att komma till inställningarna för SMS väljer man *Telefon/SMS/MMS* på sida 1.

En inställningsmeny för Telefon/SMS/MMS visas, se nedan.

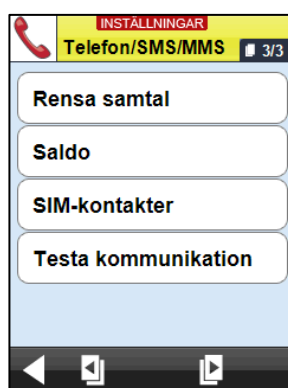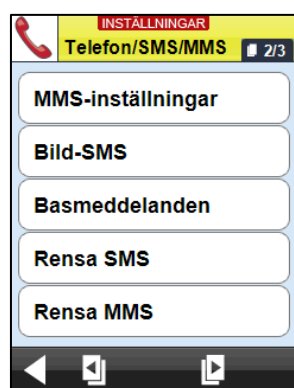

De inställningar som är relevanta för SMS beskrivs nedan.

3.1 Kontaktlista



I *Inställningar*|*Telefon/SMS/MMS*|*Kontaktlista* anger man hur kontaktlistan ska visas i Telefon och SMS. Själva kontakterna definieras via Handi-funktionen *Kontakter*.

Här kan man göra följande inställningar:

- Ikonstorlek (3x3 ikoner, 2x3 ikoner, 2x3 ikoner, 5 rader, 3 rader)
- Visa "Nytt nummer" i kontaktlistan
- Visa senast uppringda nummer i "Nytt nummer"


Inställningarna beskrivs nedan.

3.1.1.1 Visa "Nytt nummer" i kontaktlistan


När "Nytt nummer" är ikryssat visas en sådan ikon först i kontaktlistan. (Se 2.2.2 *Skriva till nytt nummer*.)




3.1.1.2 Senast uppringda nummer i "Nytt nummer"

När "Senast uppringda i Nytt nummer" är ikryssat visas knappen  i vyn "Ange telefonnummer".

Via denna knapp tar man fram det nummer som man ringde till förra gången.

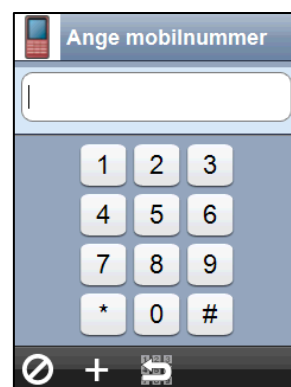

3.2 Ljud och signaler

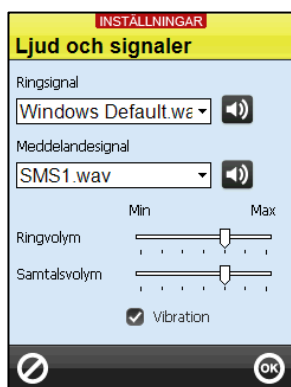

I **Inställningar|Telefon/SMS/MMS|Ljud och signaler** ställer man in ringsignal, Meddelandesignal, ringvolym, samtalsvolym samt vibration av/på.

3.3 SMS-inställningar



I **Inställningar|Telefon/SMS/MMS|SMS-inställningar** kan man göra följande inställningar för SMS:

- Visa basmeddelanden vid nytt SMS
- Smiley-knapp
- Långa SMS
- Extra bekräftelse innan meddelande skickas
- Om telefonnummer i inkomna SMS ska visas som länk
- Spara när inkommet meddelande besvarats, alternativt ange om det inkomna meddelandet ska sparas

Inställningarna beskrivs nedan.

3.3.1 Visa basmeddelanden vid nytt SMS

När "Visa basmeddelanden vid nytt SMS" är ikryssat visas vyn "Välj basmeddelande" när man skriver nytt meddelande eller svarar på ett meddelande. Se 2.2.3 *Använda basmeddelande*.

3.3.2 Smiley-knapp

När "Smiley-knapp" är ikryssat kan man använda smileybilder när man skriver SMS. En liten smileyknapp visas längst upp till höger i tangentbordet. Se 2.2.4 *Använda smileys*.

3.3.3 Långa SMS

När "Långa SMS" är ikryssat kan man skriva ett meddelande som är längre än 160 tecken.

När meddelandet skickas delas det upp på 2 eller flera SMS beroende på hur många tecken som man har skrivit. I vyn "Skicka meddelande" visas antalet SMS (om det är fler än ett).



3.3.4 Extra bekräftelsevy innan meddelande skickas

När "Extra bekräftelsevy innan meddelande skickas" är ikryssat visas vyn till höger som ett sista steg innan meddelandet skickas.

Denna inställning är till för de personer som trycker lite för snabbt på *Nästa*/OK och därför ofta skickar meddelanden oavsiktligt.



3.3.5 Visa nummer som länk

När "Visa nummer som länk" är valt visas telefonnummer i inkomna SMS som en länk. Man kan då trycka på länken och välja om man vill ringa, skicka SMS eller MMS till telefonnumret, se 2.11 SMS med telefonnummer. (Ett telefonnummer måste innehålla minst 7 sammanhängande siffror inkl ev mellanslag eller bindestreck för att visas som länk).

3.3.6 Spara inkommet meddelande

När man trycker på *Nästa* i 2.3.2 *Inkomna-vyn* och "Ange om SMS ska sparas" är valt visas en vy där man får välja om meddelandet ska sparas eller raderas. När man trycker på *OK* visas sedan "Vill du svara på meddelandet".

När "Spara när SMS besvarats" är valt visas "Vill du svara på meddelandet?" direkt när man trycker på *Nästa*. När meddelandet har besvarats flyttas det till Sparade. Detta ger en enklare hantering av inkomna meddelanden.

3.4 Bild-SMS



I **Inställningar**[Telefon/SMS/MMS]**Bild-SMS** väljer man om man vill skriva eller läsa SMS med bilder.

Man väljer även hur tangentbordet ska se ut.

3.4.1 Tangentbord


När "Bilder från Bildarkiv" är valt visas bildarkivet i tangentbordet.


När "Bilder från Bildsamtal" är valt visas Bildsamtals inmatningsvy. (Se mer om bildkartor i *Bruksanvisning Bildsamtal*.)



3.4.2 Textknapp

När "Textknapp" är valt visas en textknapp **ABC** på position 5 i knappraden längst ned, se bilden till vänster. Genom att trycka på den växlar man till textläge (se 2.10.1 *Skriva bild-SMS*).

Om "Textknapp" inte är valt visas ny rad-knappen  på position 5 i knappraden, se bilden till höger.

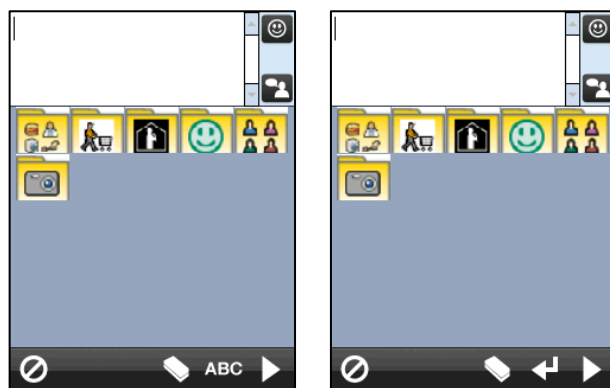

3.5 Basmeddelanden



I **Inställningar|Telefon/SMS/MMS|Basmeddelanden** definierar man basmeddelanden.

Här visas alla basmeddelanden och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna "Ny", "Ändra", "Ta bort", "Flytta uppåt" och "Flytta nedåt". (Om inget basmeddelande är markerat visas bara knappen "Ny".)

Hur man definierar basmeddelandena beskrivs nedan.

3.5.1 Nytt basmeddelande



För att skapa ett nytt basmeddelande trycker man på knappen *Ny*. Basmeddelandet läggs då in via följande sekvens:



Först väljer man en symbol och sedan skriver man in texten för basmeddelandet.

Symbolen bifogas inte i meddelandet utan är bara en hjälp för användaren att hitta rätt basmeddelande.

3.5.2 Ändra basmeddelande



För att ändra ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen *Ändra*. Basmeddelandet ändras via samma vy som i *Nytt basmeddelande* ovan.

3.5.3 Ta bort basmeddelande



För att ta bort ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen *Ta bort*. Man får bekräfta att basmeddelandet ska tas bort.


3.5.4 Flytta basmeddelande uppåt/nedåt



För att flytta ett basmeddelande markerar man det och trycker på knapparna *Flytta uppåt* eller *Flytta nedåt*. Basmeddelandet flyttas då.




3.6 Rensa meddelanden

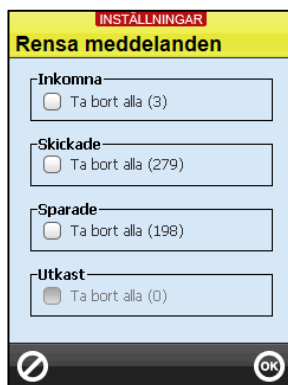

I *Inställningar* | *Telefon/SMS/MMS* | *Rensa meddelanden* kan man ta bort samtliga meddelanden i mapparna *Inkomna*, *Skickade*, *Sparade* och *Utkast*.

Man kryssar i de mappar som man vill rensa och trycker sedan på *OK*.

3.7 SIM-kontakter

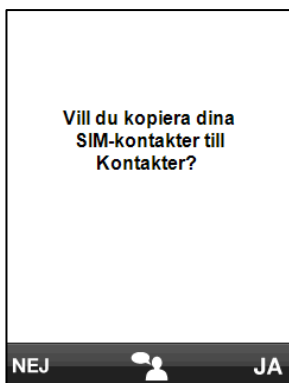

Via **Inställningar|Telefon/SMS/MMS|SIM-kontakter** kan man kopiera de kontakter som finns på SIM-kortet till Handis egen kontaktlista.

När man trycker på *OK* startar kopieringen.

SIM-kontaktens telefonnummer läggs in som mobilnummer i Kontakter. Detta kan behöva redigeras senare, se nedan.

Om det finns en exakt likadan kontakt (samma namn och nummer) på SIM-kortet och i Kontakter sker ingen kopiering. Om det finns en kontakt med samma namn men ett annat nummer skapas en dublett. När kopieringen är klar visas ett meddelande.

Efter kopieringen kan kontaktlistan behöva redigeras, se nedan.

3.7.1 Avancerad redigering

När man importerar SIM-kontakter läggs sannolikt många fasta telefonnummer in felaktigt som mobilnummer. Då behöver man flytta numret till rätt plats.

Man kan även behöva lägga ihop två kontakter till en enda, t ex "Kalle mobil" och "Kalle hem" till "Kalle" i kontaktlistan. Det gör man genom att kopiera ett nummer från den ena kontakten till den andra.

För att redigera kontakterna går man till Handi-funktionen *Kontakter*, markerar önskad kontakt och trycker sedan på *Nästa*. Då visas Kontaktvyn.

Flytta nummer



Om endast ett nummer finns angivet för kontakten kan man enkelt flytta telefonnummer till mobilnummer och vice versa.

Kopiera nummer mellan kontakter



1. Kopiera ett befintligt nummer via *Kopiera*-knappen.
2. Gå till en annan kontakt och klistra in numret via *Klistra in*-knappen.


3.8 Testa kommunikation



Via **Inställningar|Telefon/SMS/MMS|Testa kommunikation** kan man testa att SMS-kommunikationen fungerar.

För att testa SMS-kommunikationen trycker man på knappen **Starta** och får då skriva in ett mobilnummer att skicka ett testmeddelande till. Om det inte fungerar att skicka SMS måste man ta kontakt med sin telefonoperatör.

3.9 Talstöd i tangentbordet

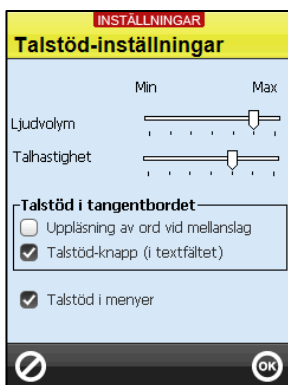


Via **Inställningar|System|Talstöd|Talstöd-inställningar** bestämmer man om och hur talstöd ska användas i tangentbordet:

- Uppläsning av ord vid mellanslag
- Talstöd-knapp i (textfältet)

3.9.1 Uppläsning av ord vid mellanslag


När "Uppläsning av ord vid mellanslag" är ikryssat läses orden upp medan man skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort man skriver mellanslag.

3.9.2 Talstöd-knapp i (textfältet)


När "Talstöd-knapp i textfältet" är ikryssat visas *Talstöd*-knappen  bredvid textfältet. Se bilden till vänster.

När "Talstöd-knapp i textfältet" inte är ikryssat visas ingen *Talstöd*-knapp. Se bilden till höger.


När man trycker på *Talstöd*-knappen läses hela meddelandet upp.

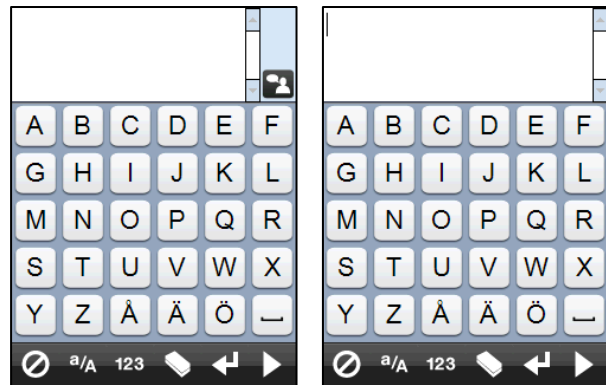

3.10 Tangentbord

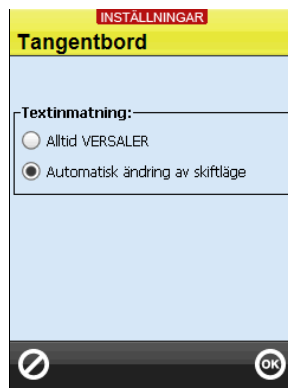

Via **Inställningar|System|Tangentbord** bestämmer man om bokstäverna i tangentbordet automatiskt ska ändras från versaler till gemener och vice versa.

När alternativet "Alltid VERSALER" är valt visas stora bokstäver i tangentbordet, så länge man inte trycker på knappen .

När alternativet "Automatisk ändring av skiftläge" är valt blir första bokstaven efter en punkt eller ny rad automatiskt versal. Andra bokstaven i ett ord blir sedan gemen.