

## Handi 4

Handi generation 4 är det största utvecklingssteg vi tagit sedan vi började med Handi år 2000. Handburet kognitivt stöd kommer att ta ett stort steg framåt.

Handi 4 kommer att testas intensivt hela våren och vi räknar med att kunna leverera seriemässigt direkt efter sommaren.

Utvecklingen av Handi 4 kan delas upp i tre delar:

1. Överföring av hela Handi-koden till ett modernare programmeringsspråk. (Inget som vare sig användare eller stödpersoner märker av, men det skapar flexibilitet och utvecklingsmöjligheter för framtiden.)
2. Införande av nya funktioner baserade på kommentarer vi fått de senaste 3 - 4 åren från förskrivare, entusiaster, marknadsförare och inte minst användare.
3. Anpassning av Handi för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, bl a modernare användargränssnitt och mer avancerad Formulärfunktion. Ett resultat av bl a samarbetet med företaget NeoCog kring personer med ADHD.

Nedan listas de viktigaste förändringarna i Handi 4, uppdelat per Handi-funktion:

### Generellt


- Tema. Nu kan man välja mellan två användargränssnitt; Klassiskt och Modernt.



- Talsyntes. Man kan välj mellan rösterna Erik, Emma, Elin, Ingemar och AnnMarie.
- Bildarkiv. Bilderna kan ordnas i mappar.
- Klocka. Klockan kan visas som en ikon i Handimenyn.
- Stödmeny. Förenklad inställningsmeny som kan anpassas för stödpersoner eller brukaren själv.
- Utökad användning av hemknapp och navigeringsknappar.


### Checklista

Ny funktion som innebär att man kan göra avbockningsbara listor. Uppgifterna kan vara med både bild och text.

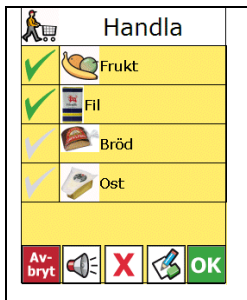


## Kalendern

- Kopplade aktiviteter. Formulär, album, checklista mm kan kopplas direkt till en aktivitet.
- Veckovy. Man se hela veckans aktiviteter i en veckovy
- Påminnelser. Nu kan man få ett påminnelserlarm en stund innan en aktivitet börjar.
- Klockvy. Nu finns en stor klockvy med bl a dygnsorientering.
- Helgdagar. Nu kan man se svenska helgdagar i kalendern.
- Sök aktivitet. Nu kan man söka aktiviteter i kalendern.
- Larm. Nu kan ljudlarm och vibration sättas per aktivitet. Aktiviteter som saknar både ljudlarm och vibration larmar nu inte, utan är endast ”orienterande”.
- Tidmätare och Tidbok. Hjälpmedel för att mäta tid och komma ihåg tidsmängder.

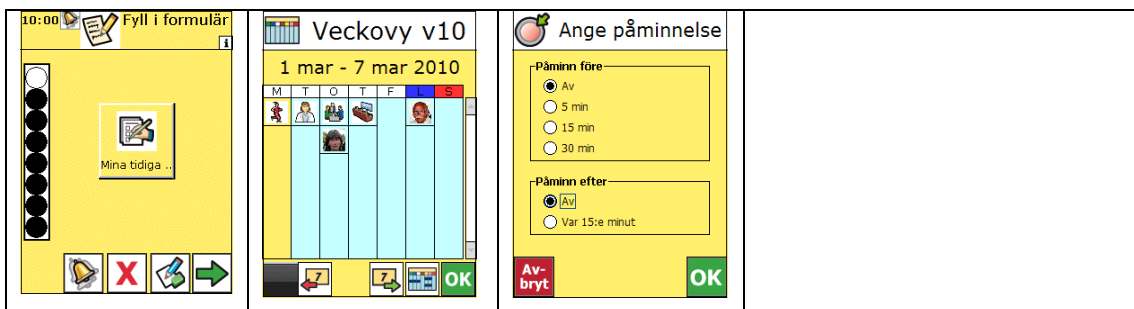


## Formulär

- Fyra typer av formulär. Ja/Nej, Sifferskala, VAS-skala och Siffertal.
- Feedback. Se poäng och betyg direkt i Handi.
- Sammanställningar. Se diagram över svaren direkt i Handi.
- HandiTools. Formulären skapas nu i HandiTools.

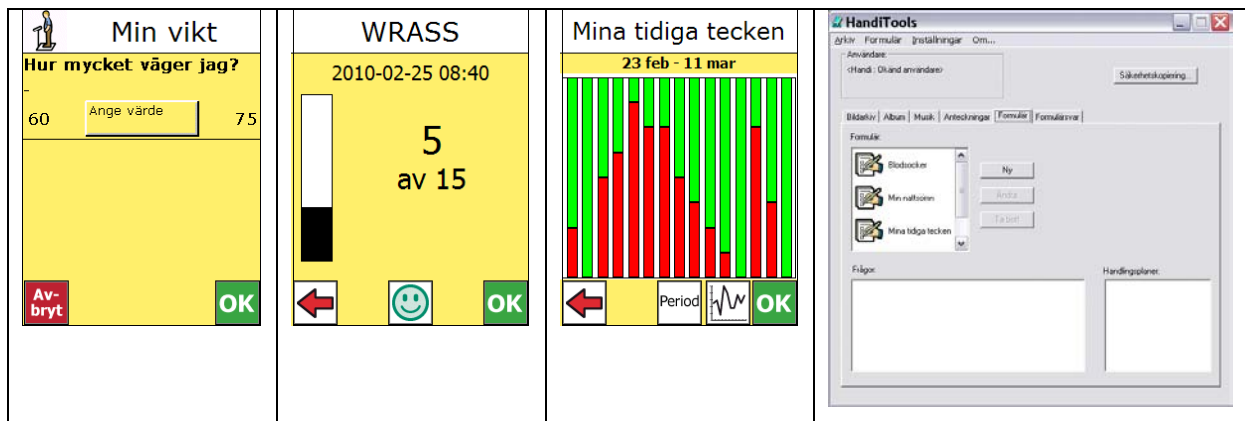

## Kontakter

- Grupper. Kontakterna kan nu ordnas i grupper.
- Sök kontakt. Nu kan man söka i kontaktlistan.
- Ordna kontakter. Kontaktlistan kan nu redigeras i brukarläget.

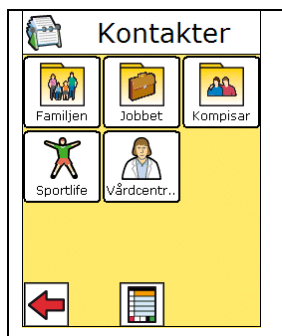

## Telefon

- Nya missade samtal. Bättre visning av nya missade samtal.
- Visa telefonnummer. Nu kan man även se kontaktens telefonnummer vid inkommande och uppringda samtal.



## **SMS**

- Nya inkomna meddelanden. Bättre visning av olästa inkomna meddelanden.
- Skicka SMS till grupp. Nu kan man skickas samma meddelande till en hel grupp.

## **Album**

- Bildtext. Nu kan man lägga in bildtext i bildspelen.
- Skapa album. Nu kan man skapa album direkt i Handi.

## **Musik**

- Fler funktioner. I uppspelningsvyn kan man nu byta till nästa låt mm.
- Ordna musik. Nu kan man ordna låtarna i mappar och på så vis kunna hantera större antal låtar.
- Bokmärke. Genom att spara bokmärke kan man fortsätta där man slutade lyssna på t ex en bok.

## **Röstanteckningar**

- Namnge röstanteckning. Nu kan röstanteckningen namnges med text och/eller bild.
- Inspelningstid. Inspelningstiden kan nu vara upp till 60 minuter.
- Lyssna direkt i listan. Nu behöver man inte ”öppna” en röstanteckning för att höra, utan kan lyssna på den direkt i listan.

Vill du vara med och testa Handi 4? Klicka på [www.handitek.se/handi4testning](http://www.handitek.se/handi4testning)