


Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart innebär att **Handi TC II** startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades.


Detta blir aktuellt om **Handi TC II** ska gå till en ny användare och alla användardata ska raderas. Det kan också bli aktuellt om man har haft något allvarligt fel.

Gör så här för att göra total omstart:

1. Stäng av **Handi TC II** helt. Det gör du genom att hålla in Power-knappen i 3sek. Följande dialog visas.
2. Klicka på *Yes*. **Handi TC II** stängs nu av helt.

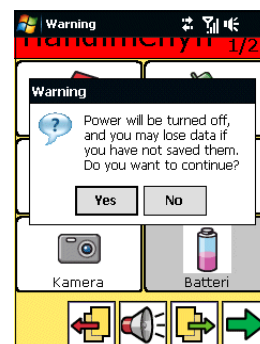

3. Tryck och håll in Hemknappen (5) och knappen Volym ner (20). Gör sedan ett kort tryck på Power-knappen (16)

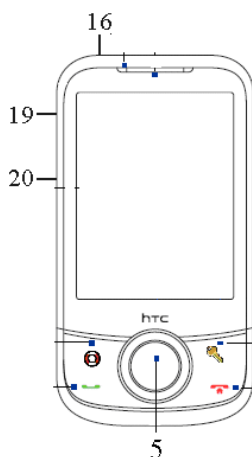


4. Släpp knapparna (20) och (5) när det hastigt visas breda färgreänder på skärmen. Texten ”This operation will delete all your personal data, and reset all settings to...” visas.
5. Tryck på knappen Volym upp (19) för att bekräfta total omstart.
6. En förloppsindikator visas. När texten ”RestoreCompleted, Press Volume up to restart” visas tryck på knappen Volym upp (19) för att slutföra omstarten.
7. **Handi TC II** startar nu om. Efter en stund visas ”smart mobility”, sedan Handi-vyn och sedan Windows Mobile bakgrunden med texten ”Preparing your device for first use ...” . . Vänta.
8. Tryck på skärmen när texten ”Tap the screen to set” visas..

9. Vyn "align screen" visas. Skärmen ska kalibreras genom att med pekpenan peka exakt i mitten på de små kors som visas på olika ställen på skärmen. Det är viktigt att göra detta noggrant. Man kan få upprepa flera gånger innan installationsprogrammet godkänner.
10. Vyn "date and time" visas. Klicka på *Next*. (Inget behöver ställas in)
11. Vyn "password" visas. Klicka på *Skip*.
12. Några vyer visas i snabb takt. Vänta. Så småningom kommer "Customization" igång. En förloppsindikator visas. Det tar ca 2 min.
13. Sedan blir det lite olika beroende på om det sitter ett SIM-kort i enheten eller inte
 - a. Om det sitter ett SIM-kort utan kontroll av PIN-kod i enheten kommer man till en sekvens för att ställa in telefonoperatör, *Connection setup*. Klicka på "Choose one" så visas en lista med alla inlagda operatörer. Välj aktuell telefonoperatör och tryck på OK, sedan på "Yes". Inställningen genomförs.

Sedan visas startvyn för installationen av Handi enligt punkt 12 nedan.


- b. Om det sitter ett SIM-kort med PIN-kodskontroll i apparaten kommer man till Windows-vyn *Phone*, där det står "Enter PIN.....".

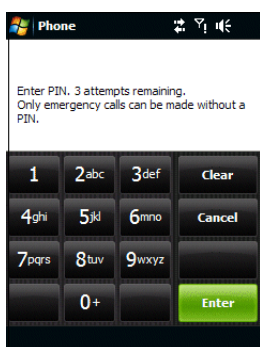

Slå in aktuell PIN-kod och tryck på *Enter*.

Sedan visas startvyn för installationen av Handi enligt punkt 12 nedan.

- c. Om det inte sitter något SIM-kort alls i enheten kommer man till följande vy

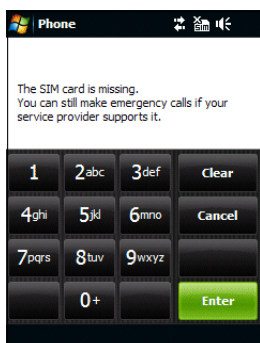

Tryck på *Cancel*.

Sedan visas startvyn för installationen av Handi enligt punkt 13 nedan


14. Installation av Handi.



Om **Handi TC II** är ny eller ska till en ny användare trycker man på **JA**, vilket alltså innebär att all användardata raderas. Man löper sedan igenom en komplett nyinstallation enligt punkt 14-17 nedan.

Om Total omstart har gjorts för att man haft ett allvarligt fel eller för att minneskortet satts i en ny apparat klickar man på **NEJ**. Då installeras programmet igen med de användardata som ligger på minneskortet.


15. . Installationen startar.

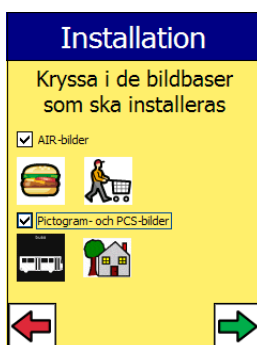

Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.

Bildbasen *AIR-bilder* innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st "Smileys".

Bildbasen *Pictogram- och PCS-bilder* innehåller 83 bilder.

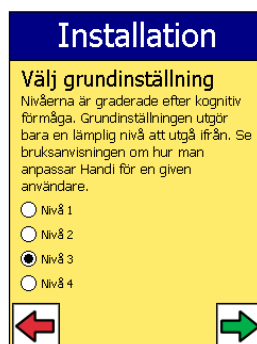

Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där "Nivå 1" har få förvalda Handifunktioner och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge.

Exakt vad som ingår i de olika nivåerna beskrivs i kapitel 7.





Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren.

De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts.

När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen.)

15. Efter installationen sker automatiskt en omstart.


16. Flera vyer visas, vänta tills vyn ”Välj datum” visas.

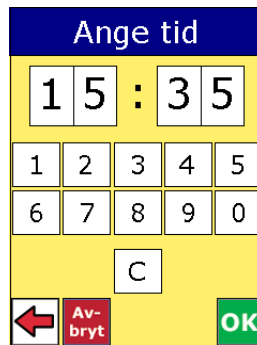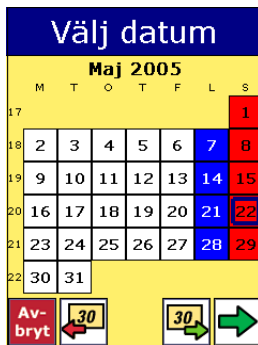

Bläddra med månadsknapparna för att komma fram till rätt år och månad. Markera sedan dagens datum och tryck *grön högerpil*.

Vyn ”Ange tid” visas nu. Ange aktuell tid med fyra siffror. Tryck *OK*.

17. Om ett SIM-kort inställt för PIN-kodskontroll är isatt visas följande vy:


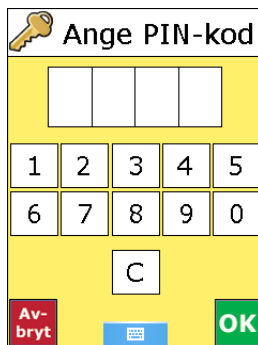


Mata in den aktuella PIN-koden.

Installationen är nu färdig och **Handi TC II** kan börja användas.

Om **Handi TC II** har ett SIM-kort isatt och är inställt för PIN-kodskontroll är det lämpligt att direkt ställa in telefonoperatör. (Om SIM-kortet inte är inställt för PIN-kodskontroll skedde detta under installationsprocessen.)

Klicka på Telefon-ikonen i Handimenyn och börja slå in ett nummer. Då visas följande inställningsvy:

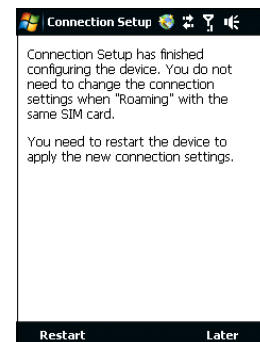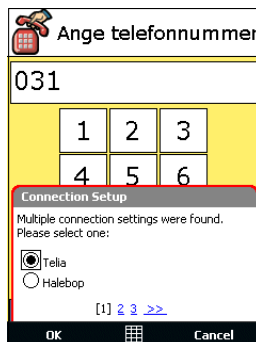

1. Välj telefonoperatör. Tryck på 2, 3 eller pilen för att se fler alternativ.
2. Tryck på **OK**. En ny vy visas.
3. Tryck på **Yes**. En ny vy visas, gör ingenting.

4. När vyn längst till höger "Connection Setup" visas, tryck på **Restart**.
5. Handi gör nu en omstart och kommer sedan tillbaka till utgångsläget. Telefonoperatör är sedan inställd.