


# Total omstart för Handifon HTC Touch Cruise

Total omstart innebär att Handifon startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Det blir aktuellt om Handifon ska gå till en ny användare och all användardata ska raderas.

Det kan möjligen också bli aktuellt om man har haft något allvarligt fel.

Gör så här:

1. Tryck in knapparna 1 och 4 och håll dem intryckta.
2. Tryck in Omstart-knappen med hjälp av pekpenan, skärmen slocknar. Efter någon sekund blinkar skärmen till, ta då bort pekpenan men fortsätt att hålla knapparna intryckta tills skärmen tänds upp och förblir tänd.
3. På skärmen står då en blå text mot vit bakgrund på engelska "This operation will...."
4. Tryck på "Send", dvs knapp 2 "grön lur".
5. Nu står det "Restore..." och en förlopps-bar syns. Färdigt står det "Press Send to boot". Tryck knapp 2 igen

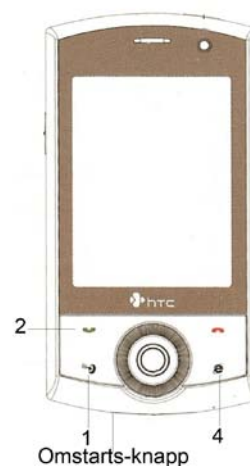

6. Skärmen slocknar, det står "smart mobility" under ca 20 sek. sedan visas Handifon vyn i ca 1 min.



7. Windows Mobile vyn visas i ca 1 min.
8. Det klingar till och står "Klicka på skärmen...". Klicka på skärmen.


9. Vyn "justera skärm" visas. Skärmen ska kalibreras genom att med pekpenan peka exakt i mitten på de små kors som visas på olika ställen på skärmen. Det är viktigt att göra detta noggrant.
10. Vyn "plats" visas. Klicka på "Nästa" direkt.
11. Därefter följer vyn "stylus-penna". Klicka på *Hoppa över*.
12. Vyn "datum och tid" visas. Klicka på *Nästa*.(behöver inte ställas in)
13. Vyn "Lösenord" visas. Klicka på *Hoppa över*.
14. Vyn "slutför" visas. Klicka någonstans på skärmen.
15. Några vyer visas i snabb takt, ser lite olika ut beroende på om man har SIM-kort eller ej insatt. Så småningom kommer "Customization" igång. En förloppsindikator visas. Det tar ca 2 min
16. Följande vy visas.



När man kommer till denna vy trycker man på "Ja", vilket alltså innebär att all användardata raderas. Man löper sedan igenom en komplett nyinstallation enligt nedan.

(Klickar man på "Nej", installeras programmet igen med de användardata som ligger på minneskortet. Detta kan vara aktuellt om programmet hängt sig på något speciellt sätt.)


17. Installationen av Handi startar.

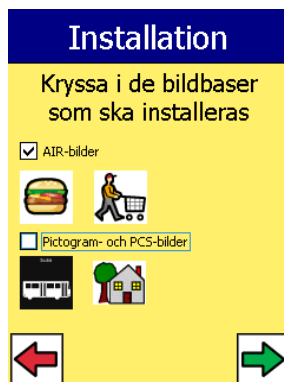

Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.

Bildbasen *AIR-bilder* innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st "Smileys".

Bildbasen *Pictogram- och PCS-bilder* innehåller 83 bilder.

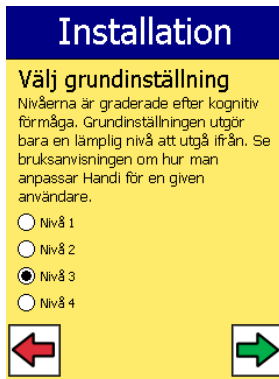

Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där "Nivå 1" har få förvalda Handifunktioner och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge.

Exakt vad som ingår i de olika nivåerna beskrivs i kapitel 7.





Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren.

De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts.

När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen)


18. Efter installationen sker automatiskt en omstart.
19. Flera vyer visas, vänta tills Vänj datum visas.

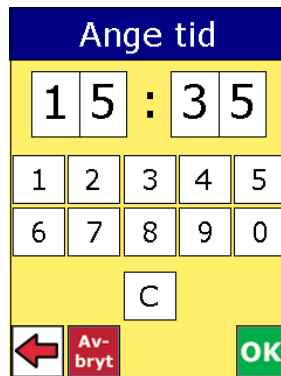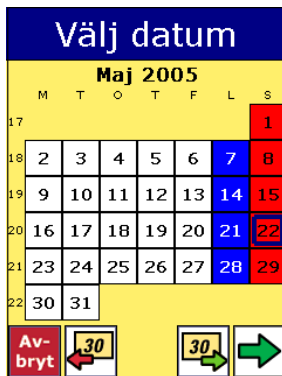

Bläddra med månadsknapparna för att komma fram till rätt år och månad. Markera sedan dagens datum och tryck *grön högerpil*.

Vyn "Ange tid" visas nu. Ange aktuell tid med fyra siffror. Tryck *OK*.

20. Om ett SIM-kort inställt för PIN-kodskontroll sitter i kommer följande dialog upp.

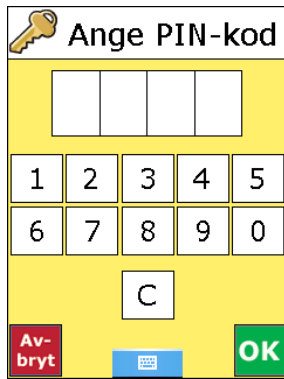

Mata in den aktuella PIN-koden.

Installationen är nu färdig och Handifon kan börja användas

När man startat om en Handifon med SIM-kort isatt får man upp en fråga om anslutningsinställningar enligt nedan. Tiden innan denna fråga dyker upp kan variera kraftigt så om den inte dyker upp direkt så får man hantera frågan om anslutningsinställningar när den dyker upp.




Klick på *Ja*.

När vyn längst till höger här bredvid visas klicka på *Starta om*.

Handifon startar om

När man startat om en Handifon får man också nedanstående fråga om att hjälpa till att göra Windows Mobile bättre.

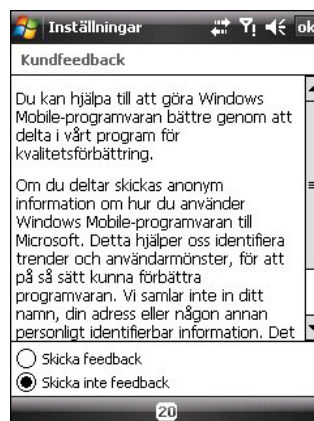

Om man inte gör något eller klickar på *Dölj* så dyker frågan upp då och då.

Det är alltså bättre att klicka på *Nästa*.

Då visas vyn "Kundfeedback". Se till "Skicka inte feedback" är valt och klocka på *ok* (uppe i högra hörnet).

(Feedbacken blir inte relevant eftersom inte Windows Mobile används)

Båda ovanstående frågor kan alltså dyka upp efter en tid. Omanvändaren kan förväntas få problem om de dyker upp så får man helt enkelt vänta tills man svarat innan man lämnar över till användaren.

