


Total omstart för Socket

Total omstart innebär att Handi startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Det blir aktuellt om Handi ska gå till en ny användare och all användardata ska raderas.

Det kan möjligen också bli aktuellt om man har haft något allvarligt fel.

OBS!! Total omstart görs på olika sätt för de olika handdatormodellerna iPAQ 2110, iPAQ 2190 och Socket. Denna bruksanvisning gäller Socket. Om handdatorn är en Socket så framgår det av loggan på handdatorn.

1. Tryck in knapparna 2, 3 och Program-knappen. Håll dem intryckta samtidigt som Reset-knappen trycks in en gång med hjälp av pekpenan.
2. Efter ett par sekunder visas en vy med Sockets logga. Fortsätt att hålla knapparna 2,3 och Program-knappen intryckta. När Windows Mobile vyn visas kan knapparna släppas. Efter ett tag visas Windows startvy med texten "Tap the screen to....".

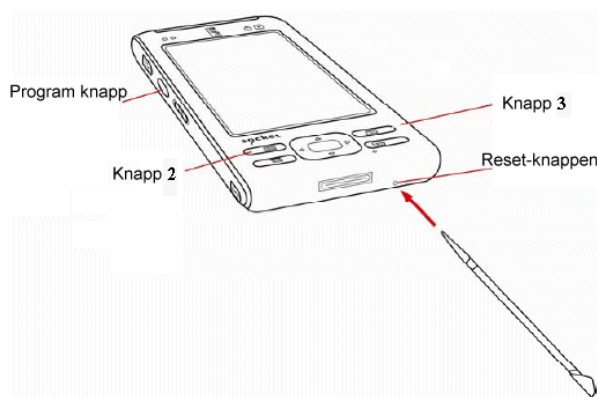


Följ instruktionerna på skärmen.

3. Först ska man bara peka på skärmen. Sedan ska man kalibrera skärmen genom att med pekpenan peka exakt i mitten på de små kors som visas. Det är viktigt att göra detta noggrant.
4. När det kommer upp en dialog som heter "Stylus" kan man bara hoppa över den, dvs tryck **Skip**.
5. Därefter ska man ställa in date and time, tryck på **Next** (detta sätts senare i Handi programmet).
6. OBS! När dialogrutan "Password" visas är det viktigt att trycka på **Skip**. (Trycker du av misstag på "Next" så börja om från början med steg 1.)

Det står nu "Setup is complete". Klicka på skärmen så startar installation av några standard-programvaror. Efter några sekunder startar sedan installationen av **Handi**-programvaran (under förutsättning att minneskortet sitter i).

7. Installationen av Handi startar, följande vy visas:

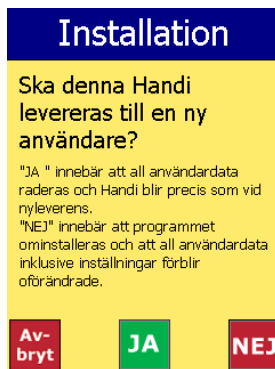

När man kommer till denna vy trycker man på ”Ja”, vilket alltså innebär att all användardata raderas. Man löper sedan igenom en komplett nyinstallation enligt nedan.

Klickar man på ”Nej”, installeras programmet igen med de användardata som ligger på minneskortet. Detta kan vara aktuellt om programmet hängt sig på något speciellt sätt.

8. Följande vy visas:




Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.

Bildbasen *AIR-bilder* innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st ”Smileys”.

Bildbasen *Pictogram- och PCS-bilder* innehåller 83 bilder.

Bocka för vad du vill installera och tryck på *grön högerpil*.

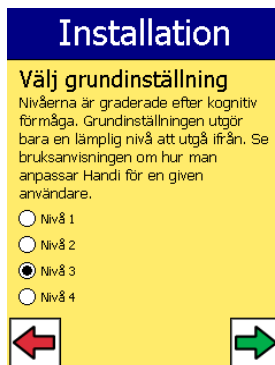

Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där ”Nivå 1” har få förvalda Handifunktioner och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge.

Exakt vad som ingår i de olika nivåerna beskrivs i kapitel 7.

Välj nivå och tryck på *grön högerpil*.



Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren.

De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts.

Kryssa för önskade funktioner och tryck på *grön högerpil*.

När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen)

9. När installationen är färdig startas Handi automatiskt om och man kommer till en vy för att ställa datum och tid.

Välj datum

Maj 2005

	M	T	O	T	F	L	S
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

Av-bryt ← 30 → 31 →

Ange tid

1 5 : 3 5

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

C

← Av-bryt OK

Bläddra med månadstangenterna för att komma fram till rätt år och månad. Markera sedan dagens datum och tryck *grön högerpil*.

Man kommer nu till "Ange tid". Ange aktuell tid med fyra siffror. Tryck *OK*.

Handi är nu klar och kan börja användas.